



Spare parts catalogue

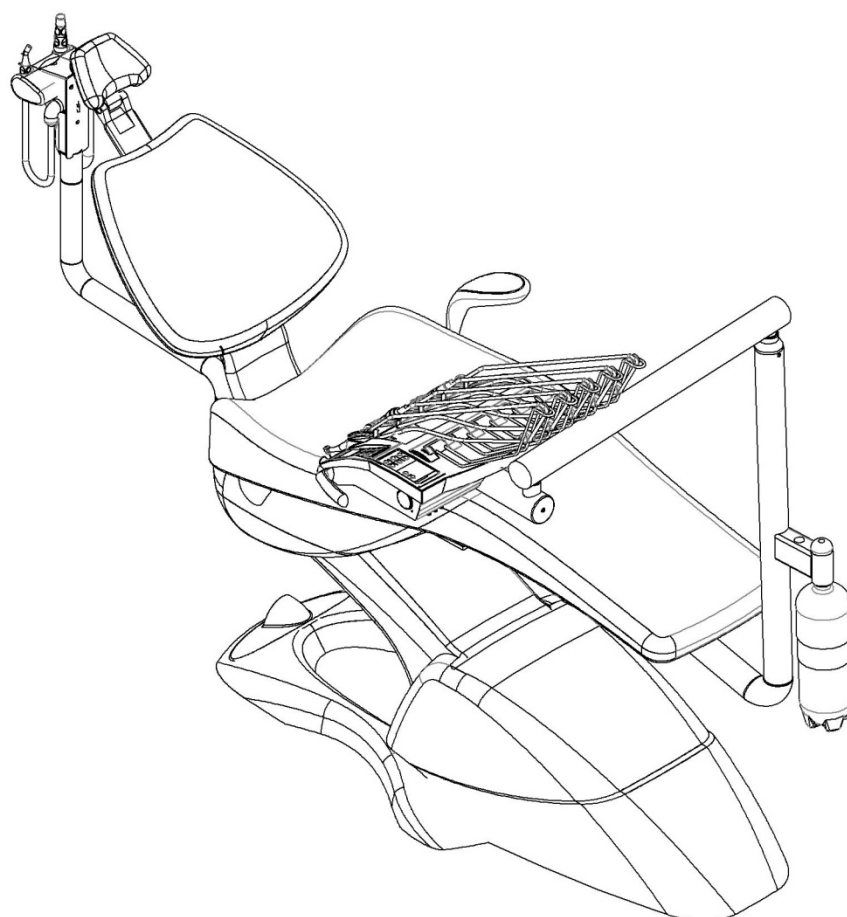


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.0	001	Крісло стоматологічне "Sting"	TECHNODENT	
5.1; 5.1.1	002	Важіль блока асистента	AEGA 4.260.006	
5.0	003	Тримач шлангів	System comfort AFK7603901 "Duerr"	
	004	Важіль блока лікаря	AEGA 4.260.007	
5.0	005	Консоль пантографічна	DENTMIX	
	006	Блок лікаря	AEGA 127.00.00.000	
	007	Блок вводу	AEGA 3.050.005	
5.0	008	Шайба	AEGA 8.949.003	
5.0	009	Підшипник	AEGA 8.250.004	
5.0	010	Вісь	AEGA 8.310.009	
5.0	011	Гайка	M16 DIN 439B	

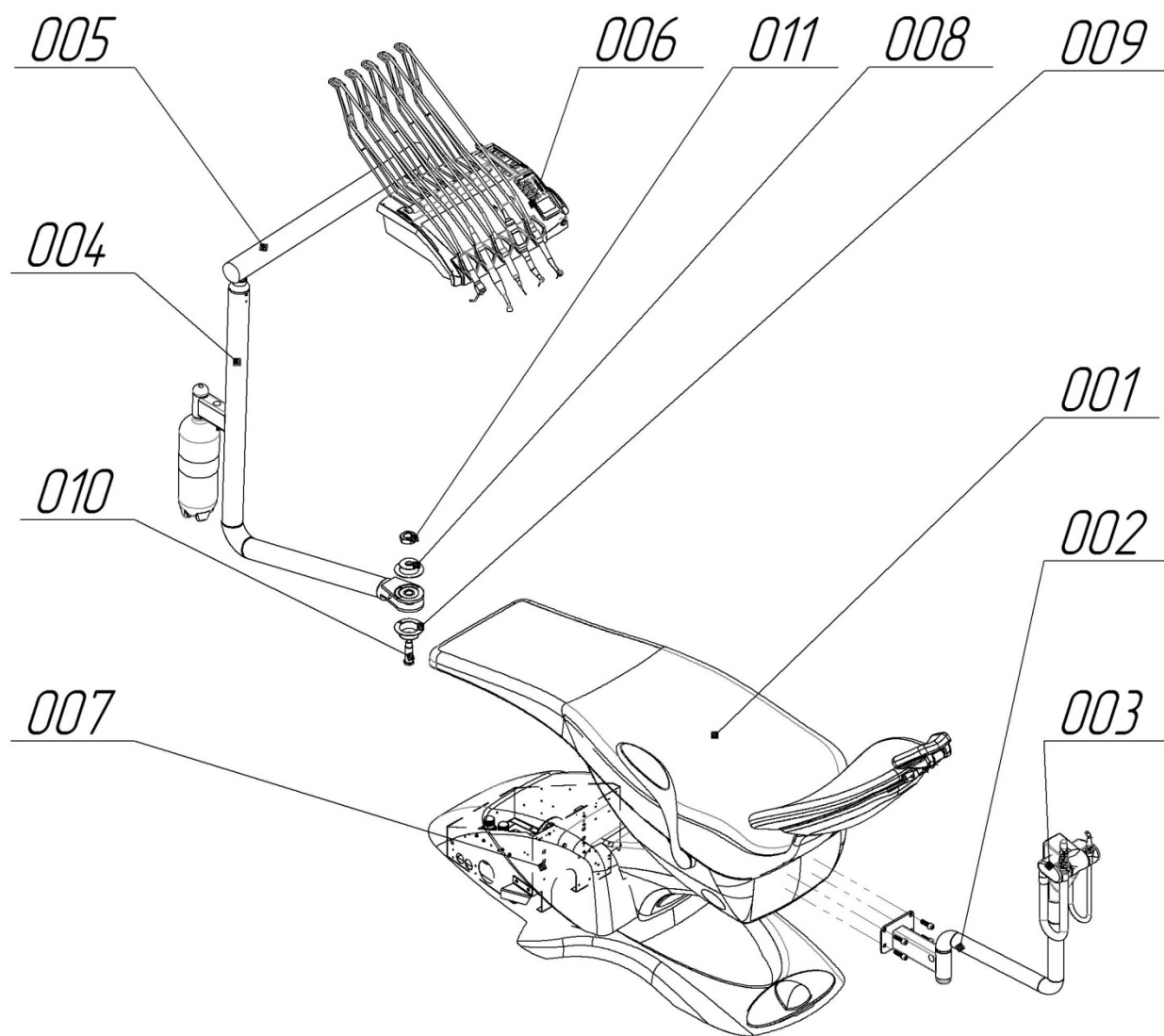

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopilv 47711, Ukraine

"Gallant" "AMBIDEXTRE"
List 5.0


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.1	001	Корпус	GAL 503.03.00.000	
5.1; 5.1.1	002	Важіль блока асистента	AEGA 4.260.006	
5.0; 5.1	003	Тримач шлангів	System comfort AFK7603901 "Duerr"	
5.1	004	Кільце	GAL 503.00.00.004	
5.1	005	Підшипник	MU P 3520	
5.1	006	Гвинт	M5x6 DIN 965	
5.1	007	Гвинт	M3x6 DIN 965	

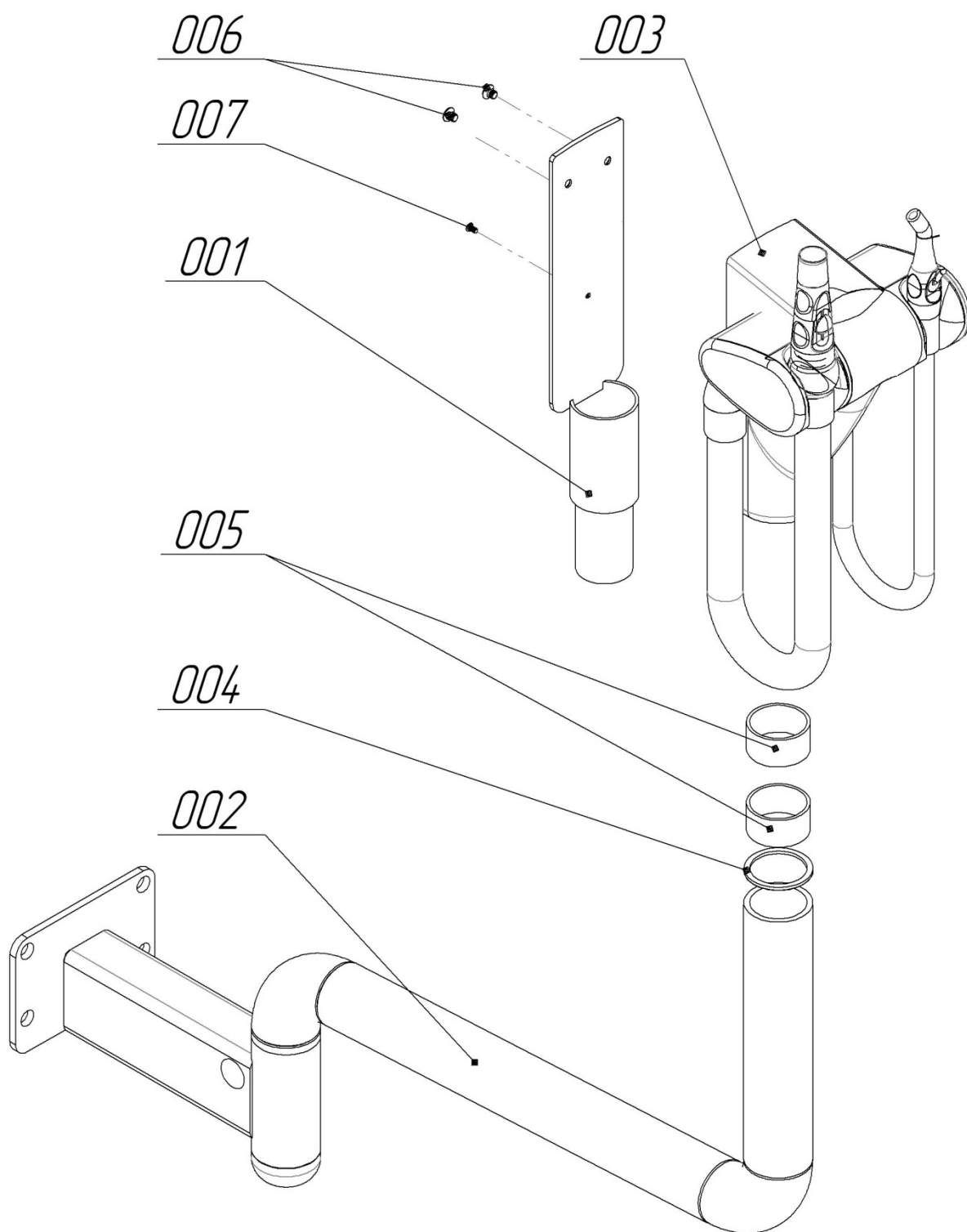

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.1*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.1.1	001	Консоль	AEGA 6.133.053	
5.1.1	002	Кронштейн	AEGA 6.133.049	
5.1.1	003	Кришка	AEGA 8.046.005	
5.1.1	004	Кільце	AEGA 8.683.002	
5.1.1	005	Кільце	ATGA 8.249.005	
5.1.1	006	Підшипник	GAL 522.01.00.001	
5.1.1	007	Підшипник	MU P 3220	
5.1.1	008	Заглушка	045.00.760 "Hafele"	
5.1.1	009	Гвинт	M4x6 DIN914	
5.1.1	010	Гвинт	M2x10 GOST 17473-88	
5.1.1	011	Мікроперемикач	SM5-02N-2G	

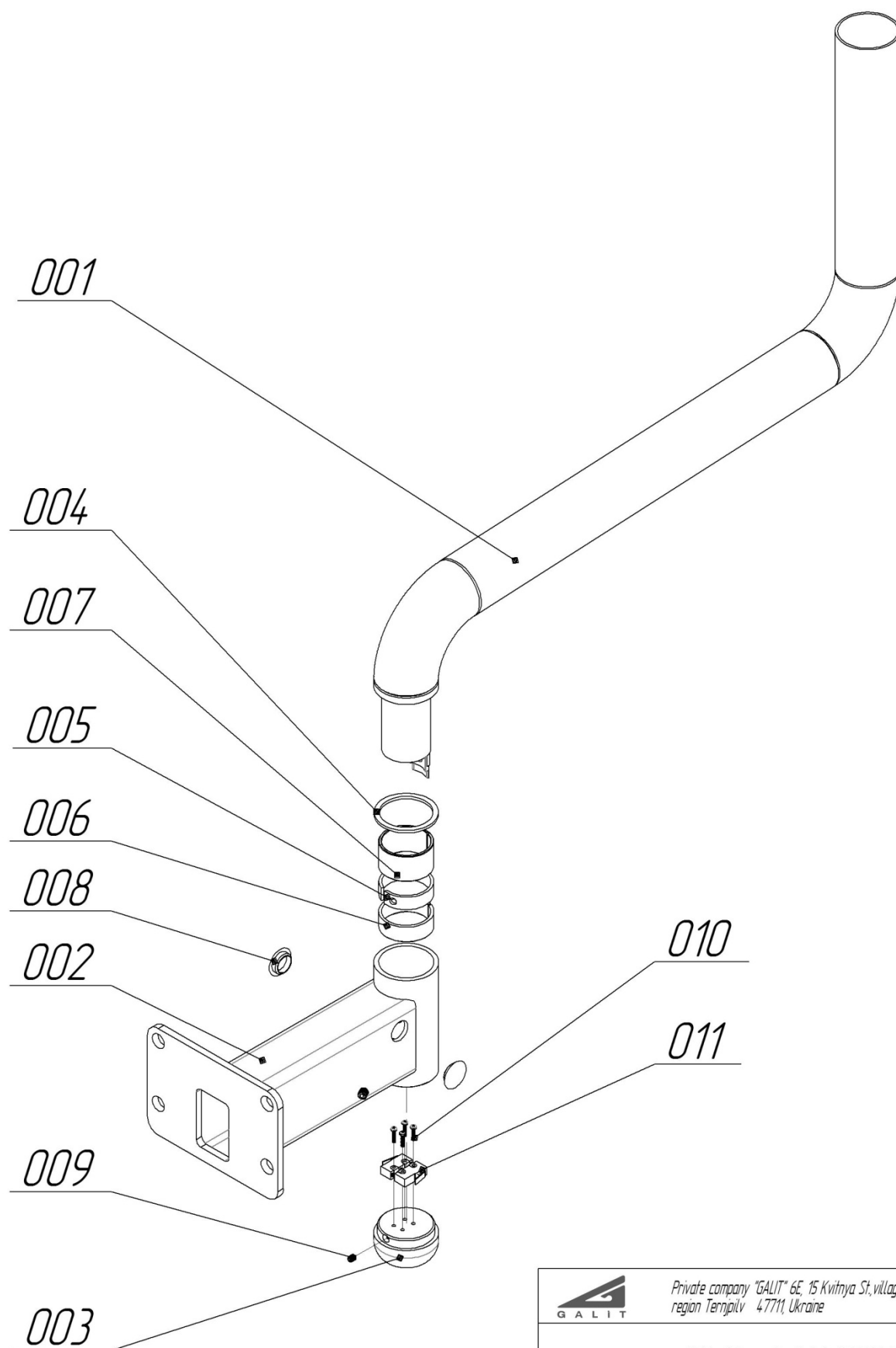

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.1.1


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.2	001	Пляшка	ACF-543-02	
5.2	002	Корок	AEGA 9.949.003	
5.2	003	Кришка	AEGA 8.046.006	
5.2	004	Консоль	AEGA 6.133.057	
5.2	005	Кришка	AEGA 8.048.007	
5.2	006	Фітінг	FIF -617-01	
5.2	007	Шайба	D5 FIF 607-01	
5.2	008	Пневматичний вимикач	VAF 451 -03	
5.2	009	Заглушка	045.00.760 "Hafele"	
5.2	010	Гвинт	M4x6 GOCT 17475-80	

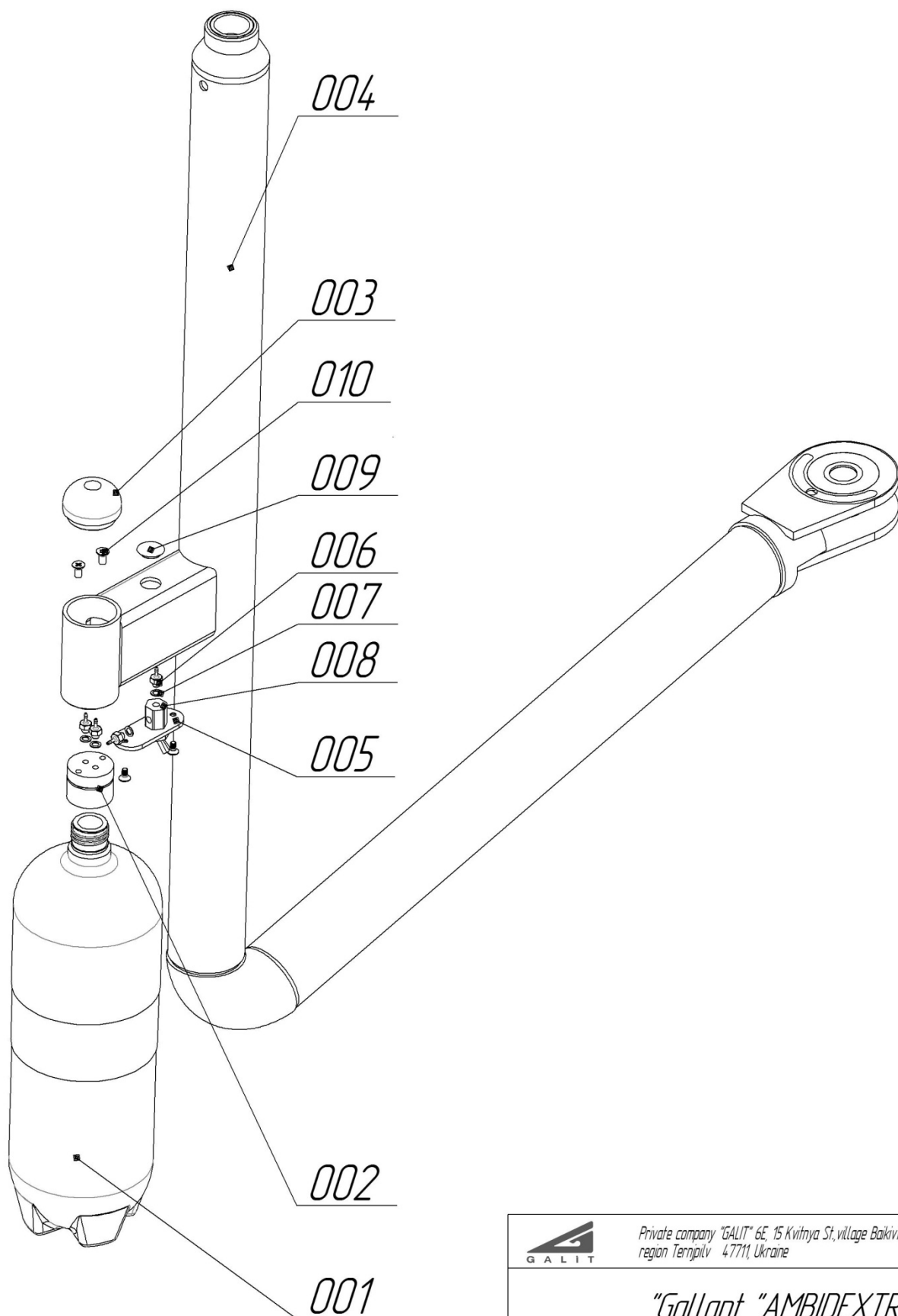

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

"Gallant" "AMBIDEXTRE"
List 5.2


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.3	001	Корпус	AEGA 6.113.008	
5.3	002	Блок регуляторів повітря	AEGA 5.886.001	
5.3	003	Блок регуляторів води	AEGA 5.886.002	
5.3	004	Тримач запобіжника	TLF -100-3	
5.3	005	Трансформатор	ZL300300-041	
5.3	006	Шайба	A6 DIN124	
5.3	007	Гайка	M6 DIN934	
5.3	008	Прокладка	AEGA 116.95.002	
5.3	009	Болт	M6x60 DIN931	
5.3	010	Прокладка	AEGA 116.95.002-01	

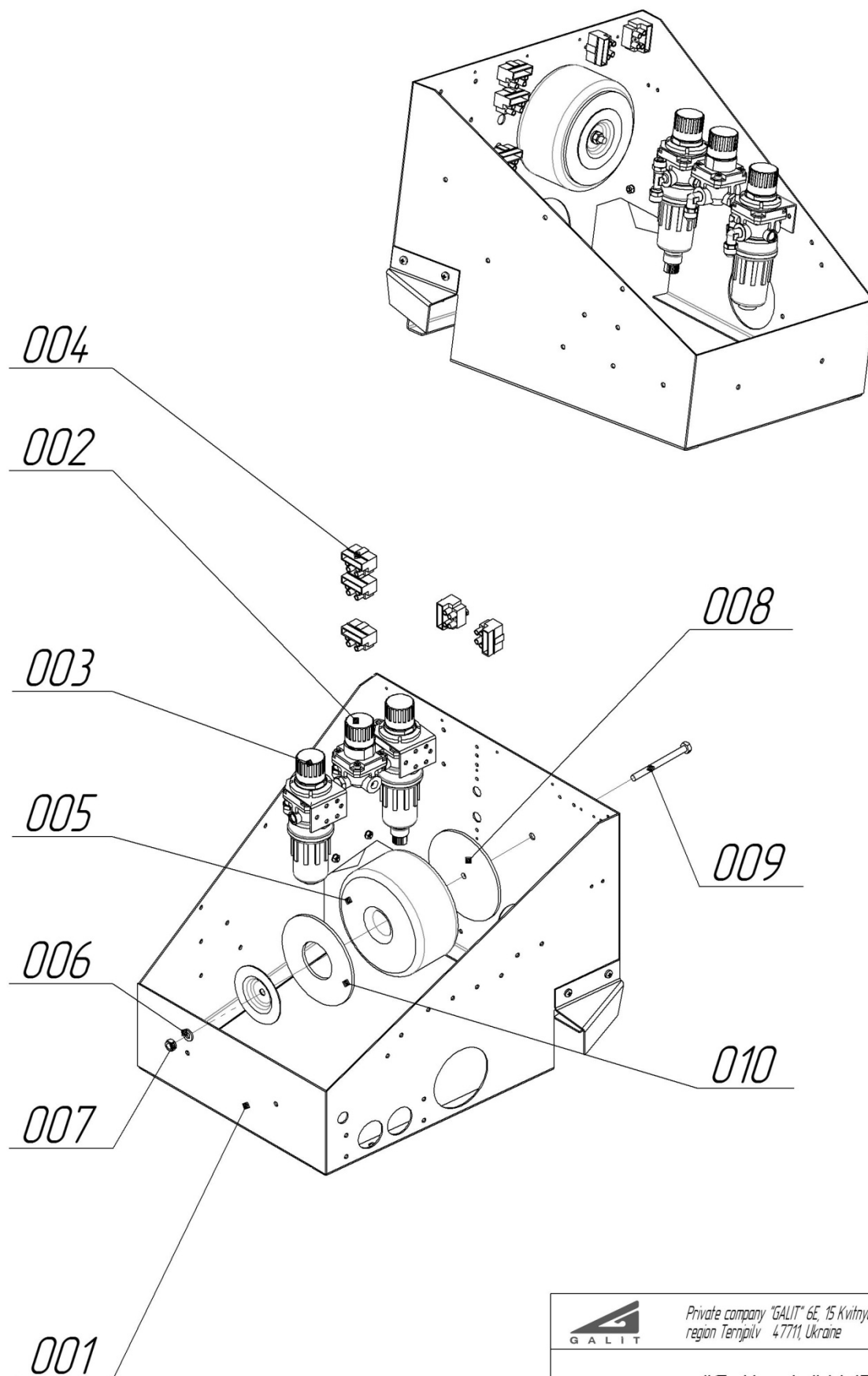

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.3*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.3.1	001	Кронштейн	AEGA 116.00.00.070	
5.3.1	002	Мікрорегулятор	M008-P00	
5.3.1	003	Фільтр регулятор	N108-D00	
5.3.1	004	Фітинг	1500 6/4-1/8	
5.3.1	005	Фітинг	1500 8/6-1/8	
5.3.1	006	Фітинг	200/1 1/8	
5.3.1	007	Фітинг	2500 1/8	

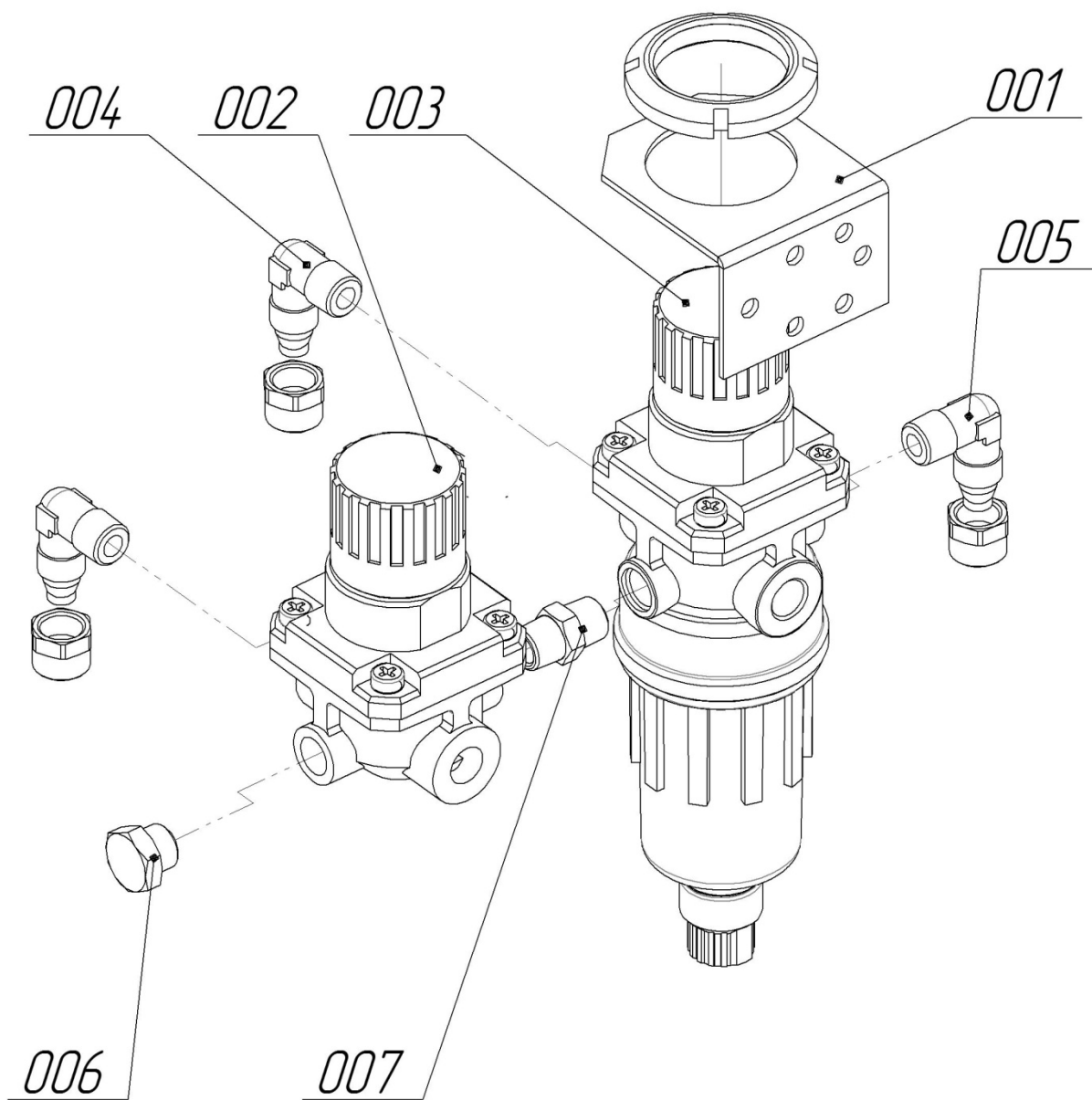

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.3.1*

LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.3.2	001	Кронштейн	AEGA 116.00.00.070	
5.3.2	002	Фільтр регулятор	N108-D01-CO1	
5.3.2	003	Фітинг	1500 8/6-1/8	
5.3.2	004	Фітинг	1500 6/4-1/8	
5.3.2	005	Фітинг	200/1 1/8	

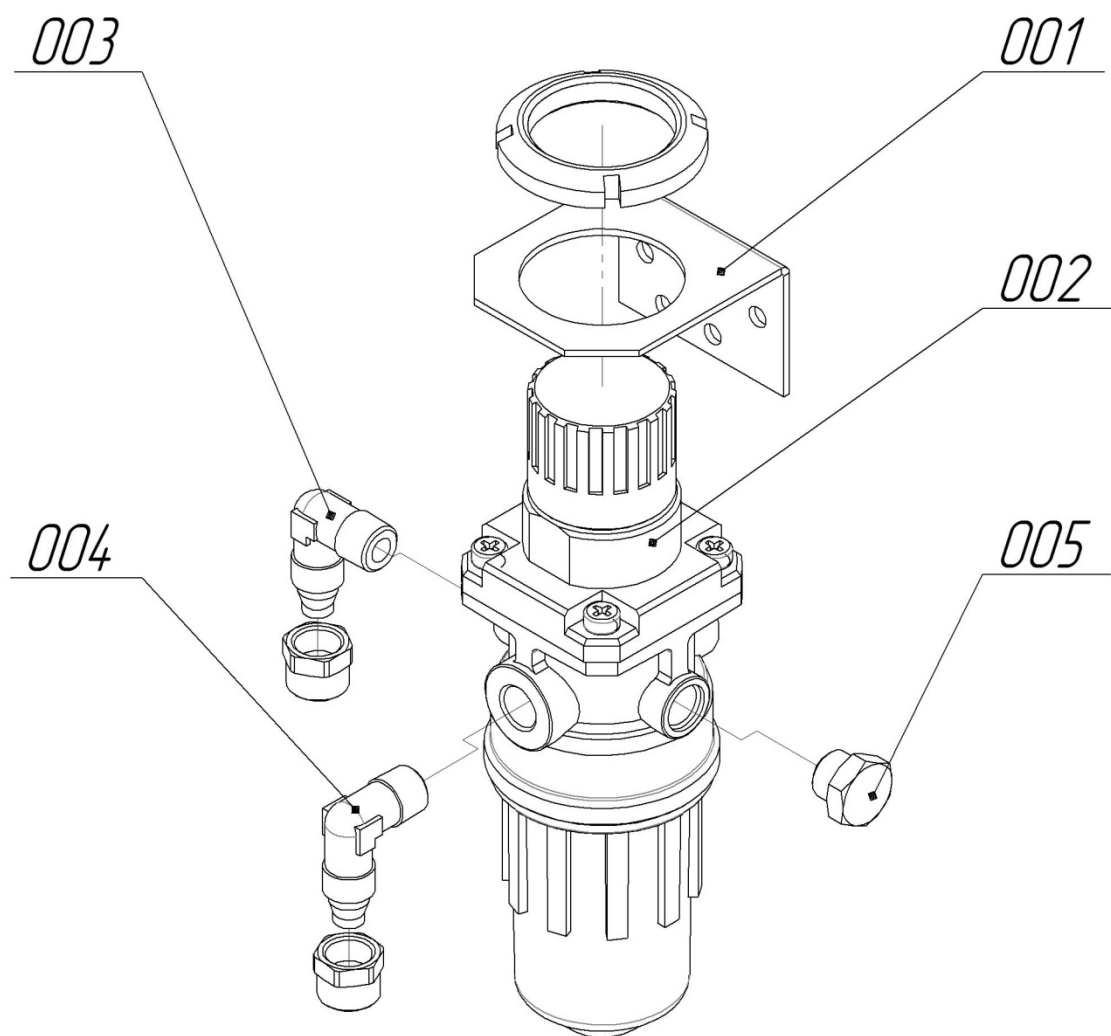

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.3.2*