

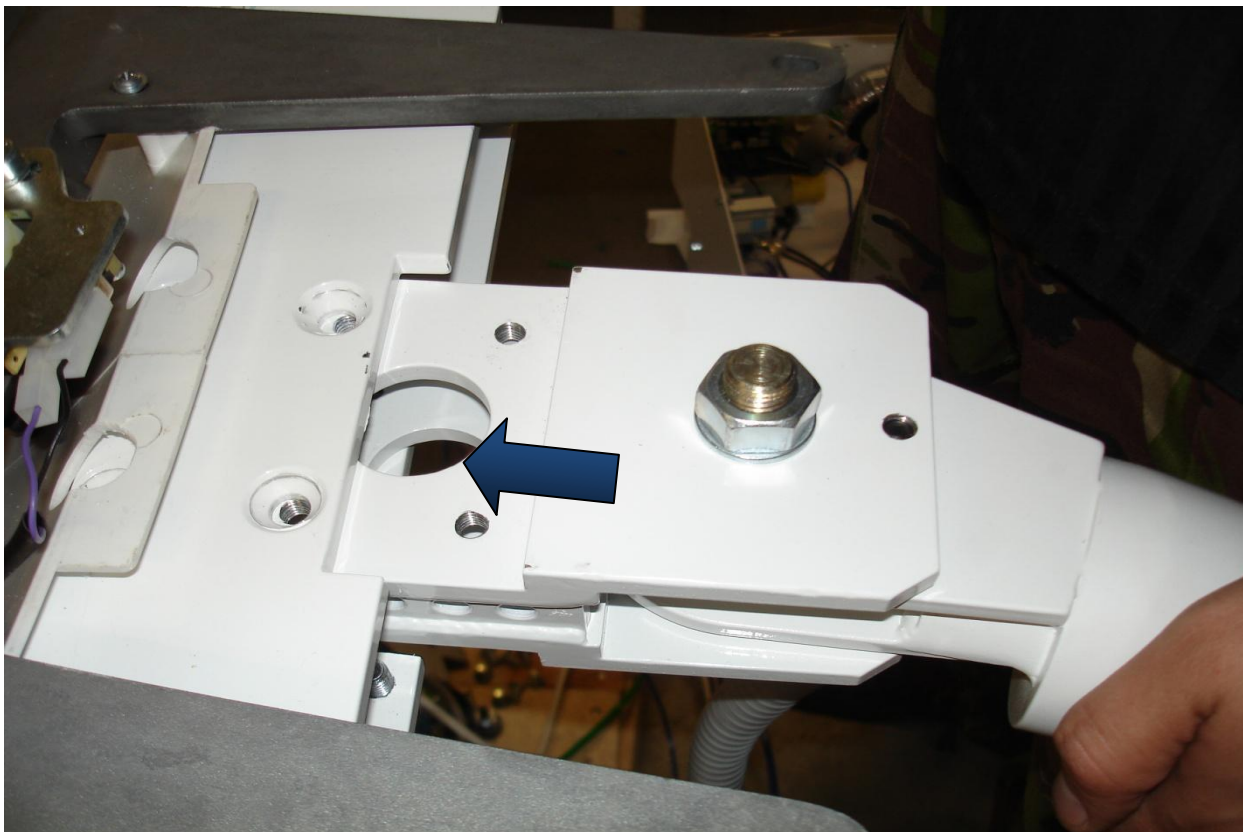



4.Опис послідовності монтажу установки.



1.Монтаж блоку вводу та важіля блоку лікаря.

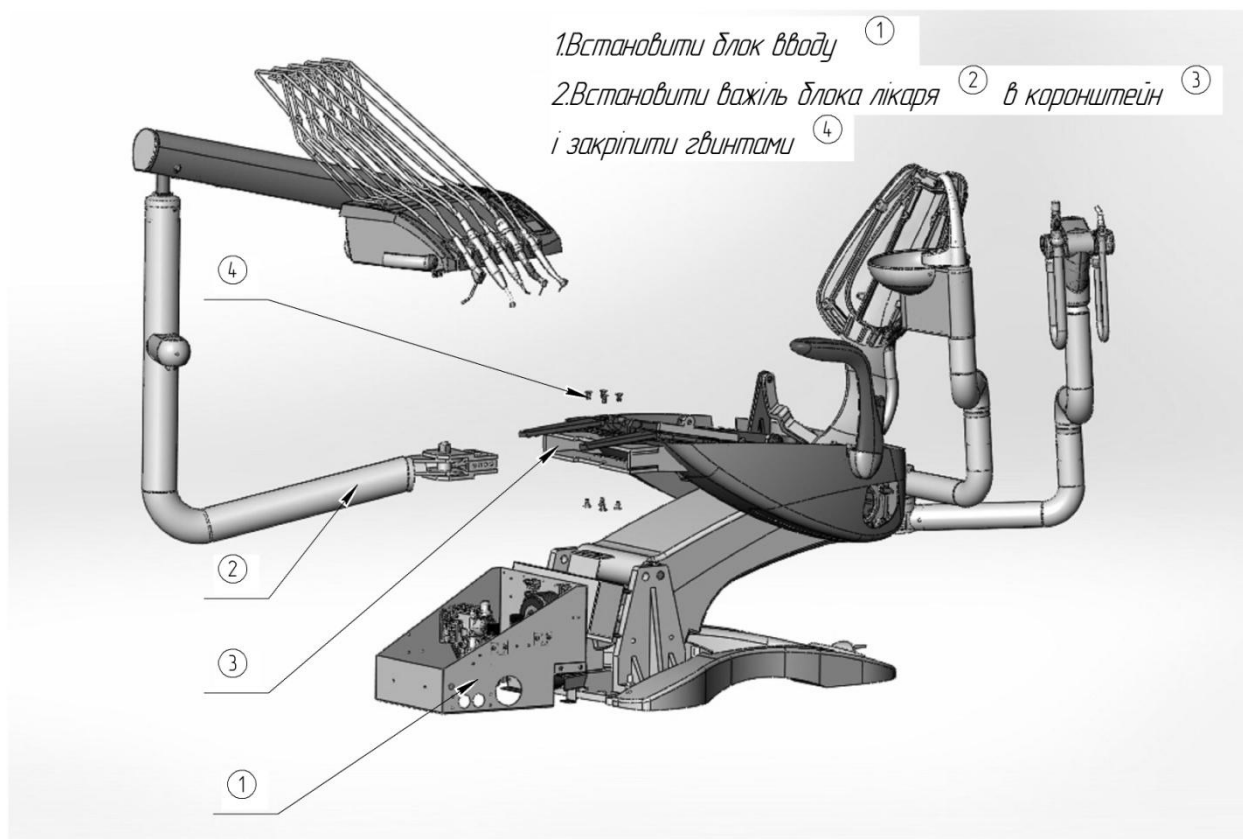

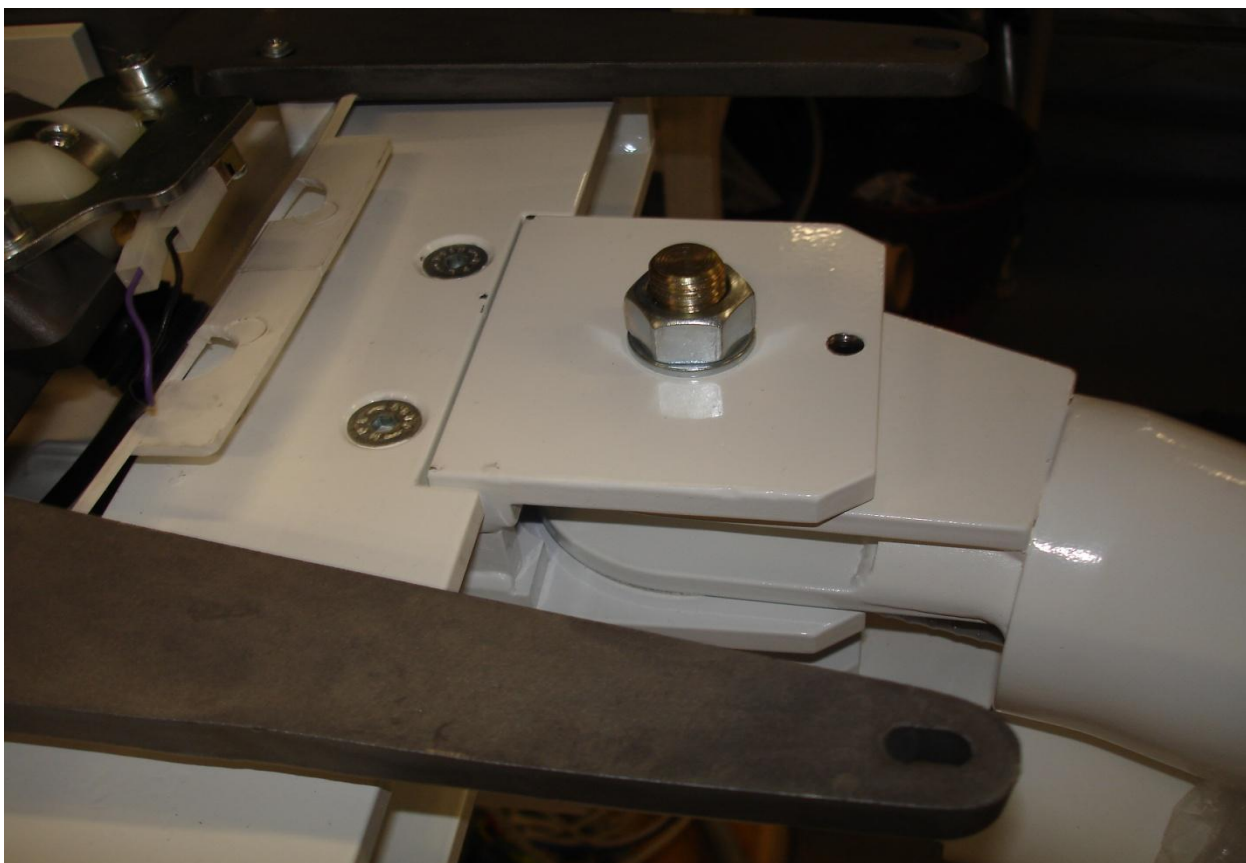


Проведення комунікацій через крісло.*

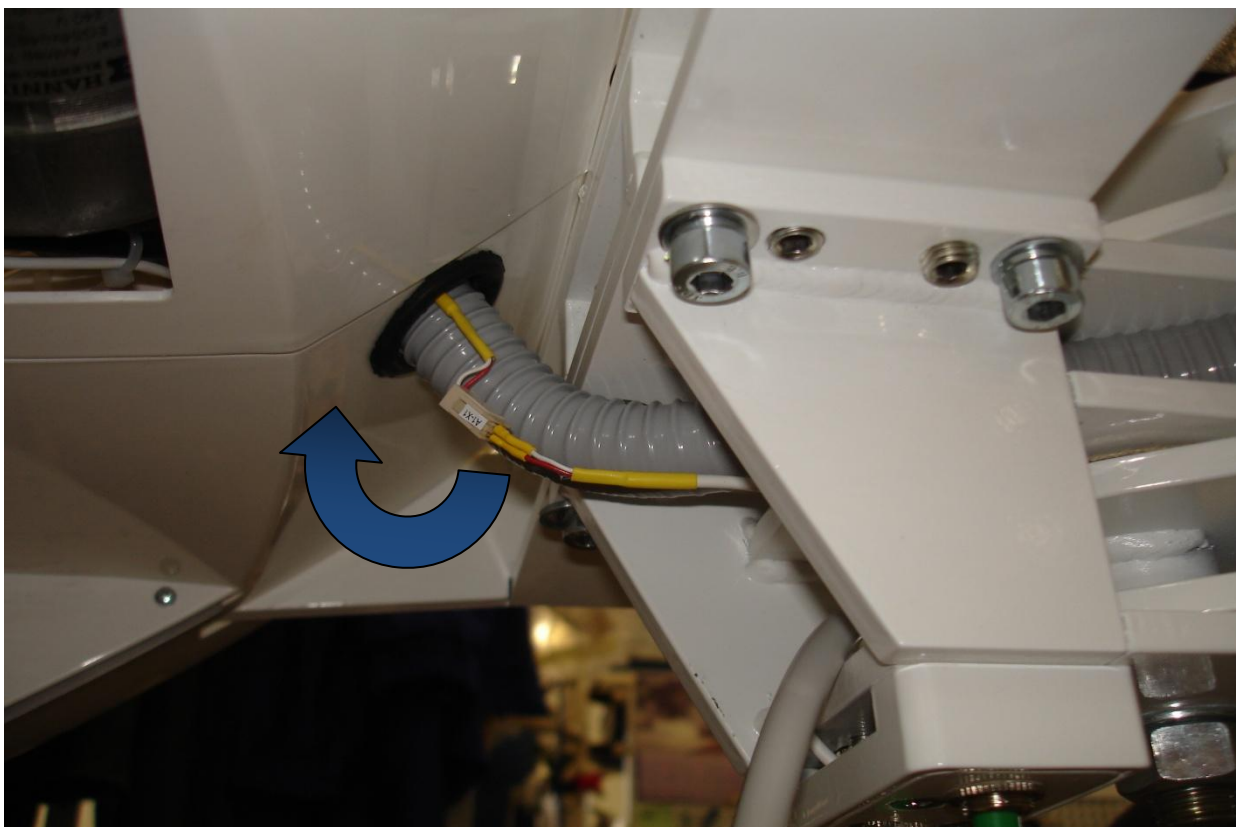

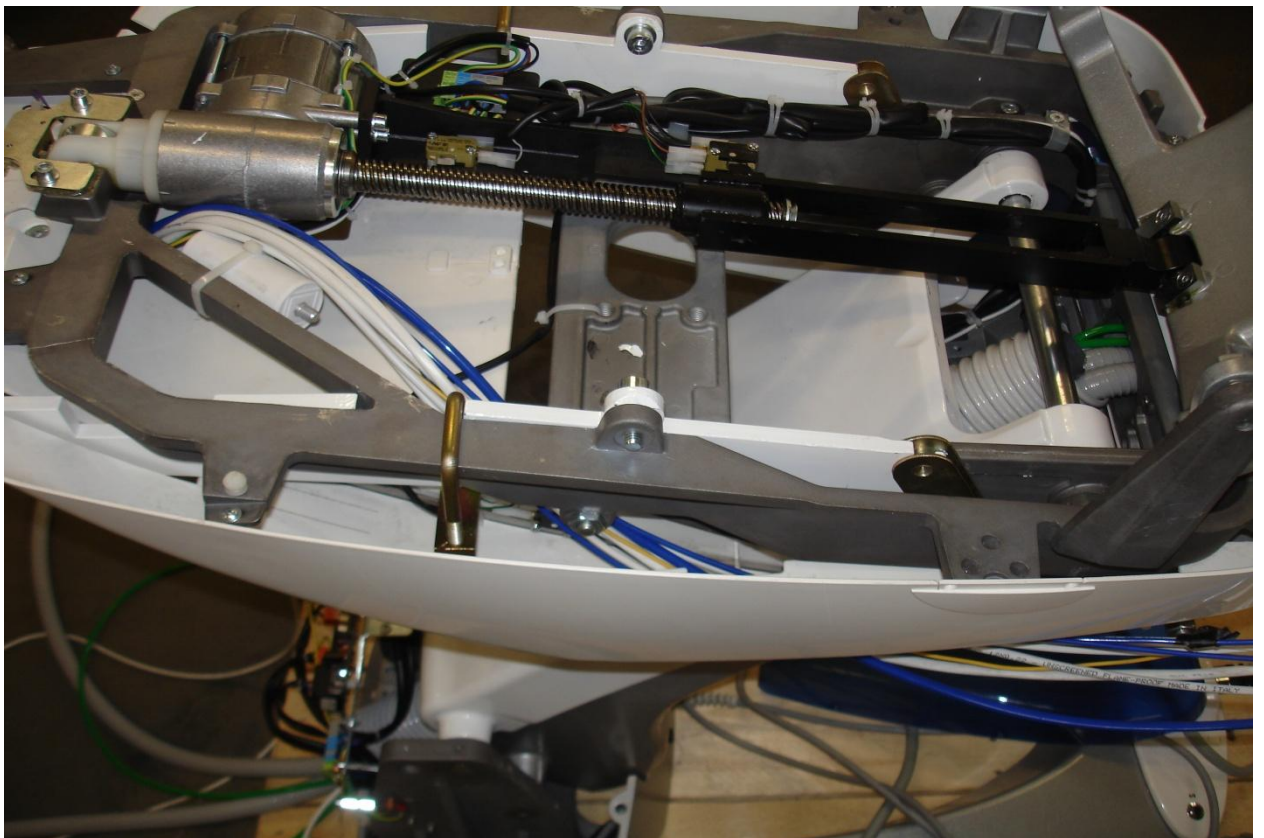
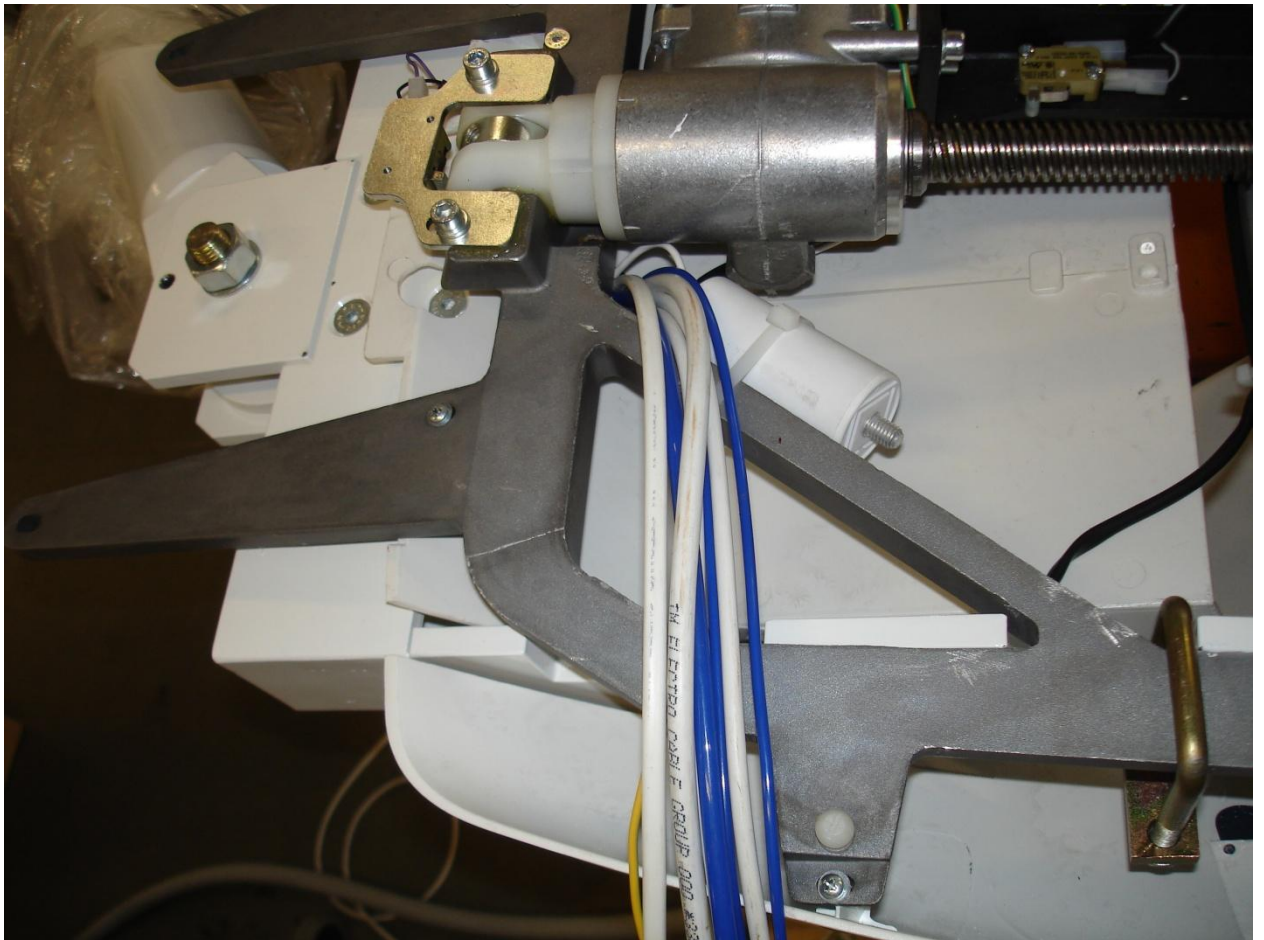





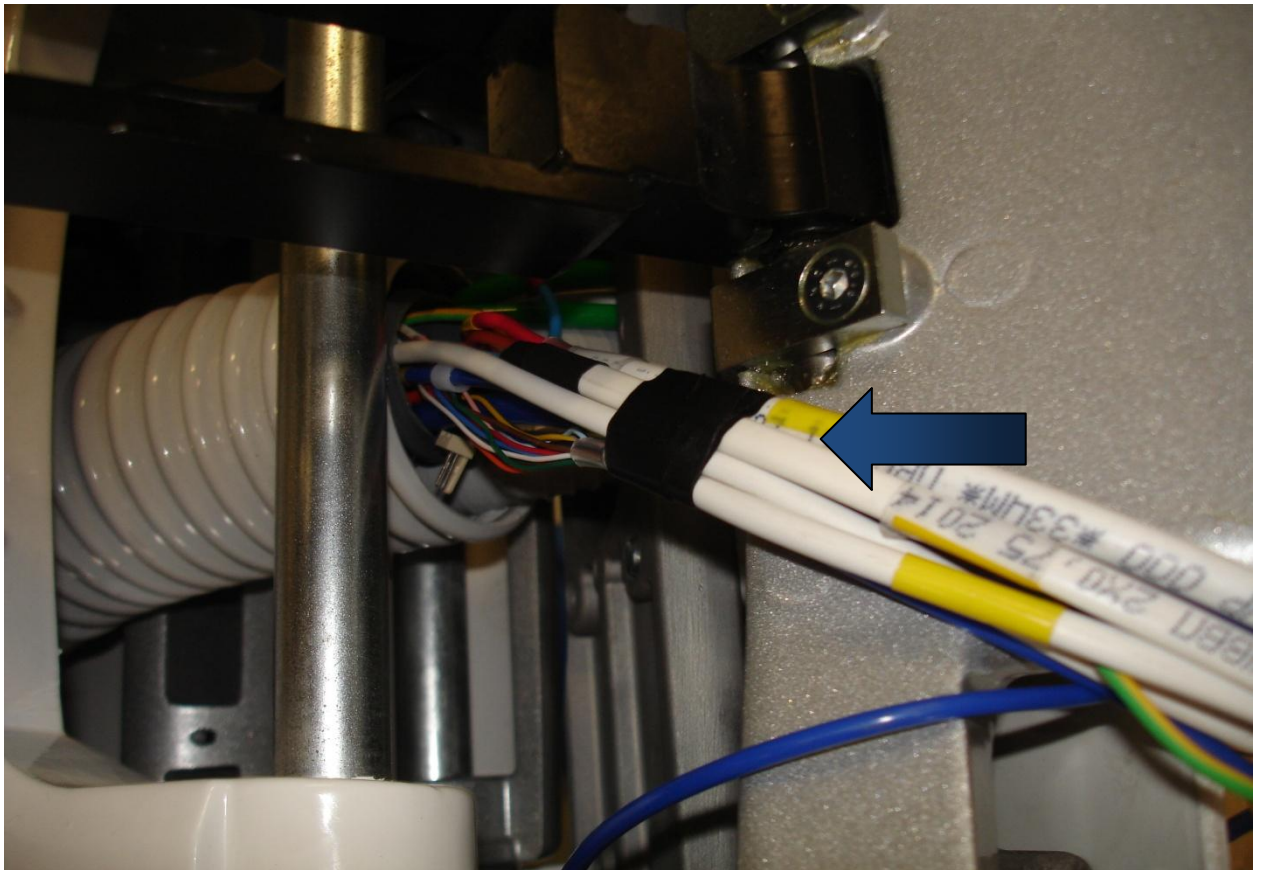

*По маршруту проведения коммуникацій протягнутий шнур.


II. Монтаж поворотного важілля світильника

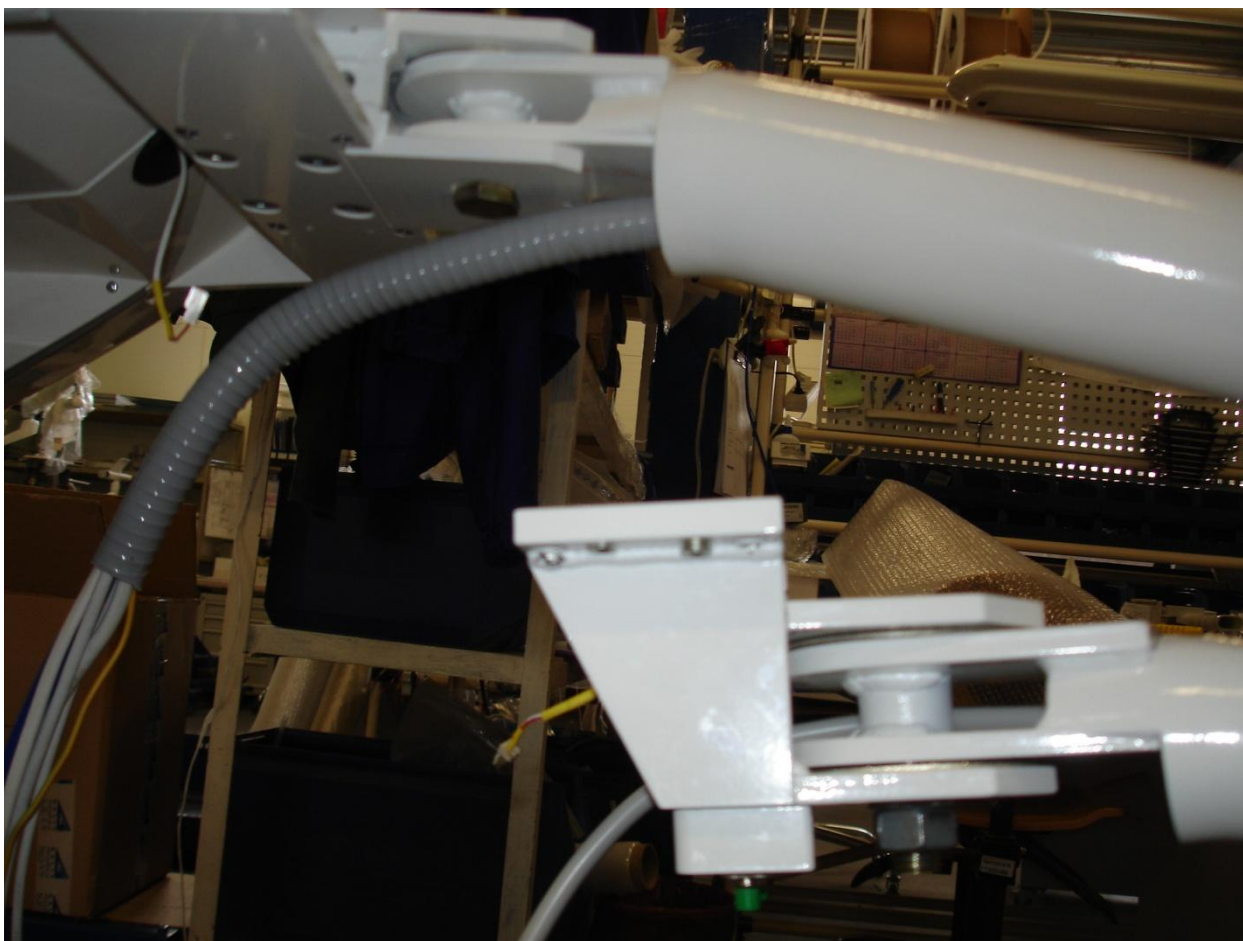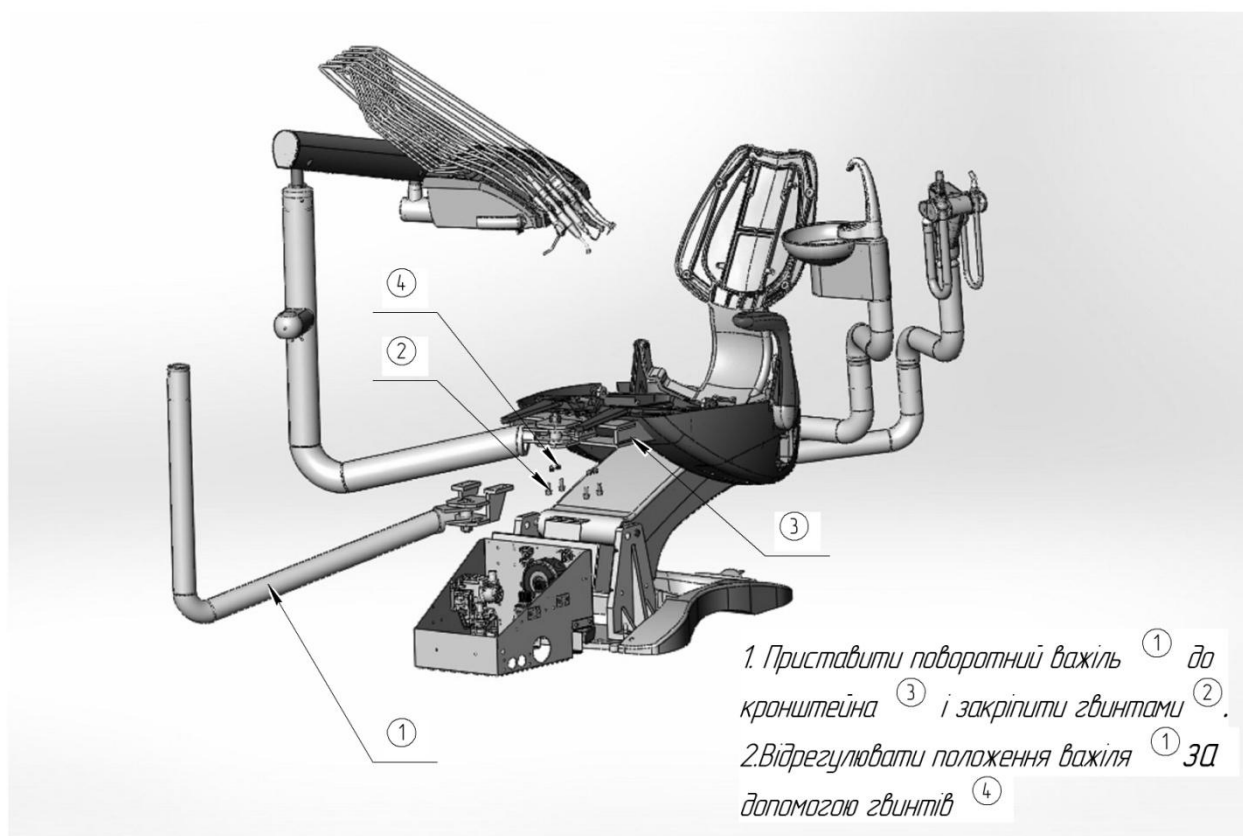

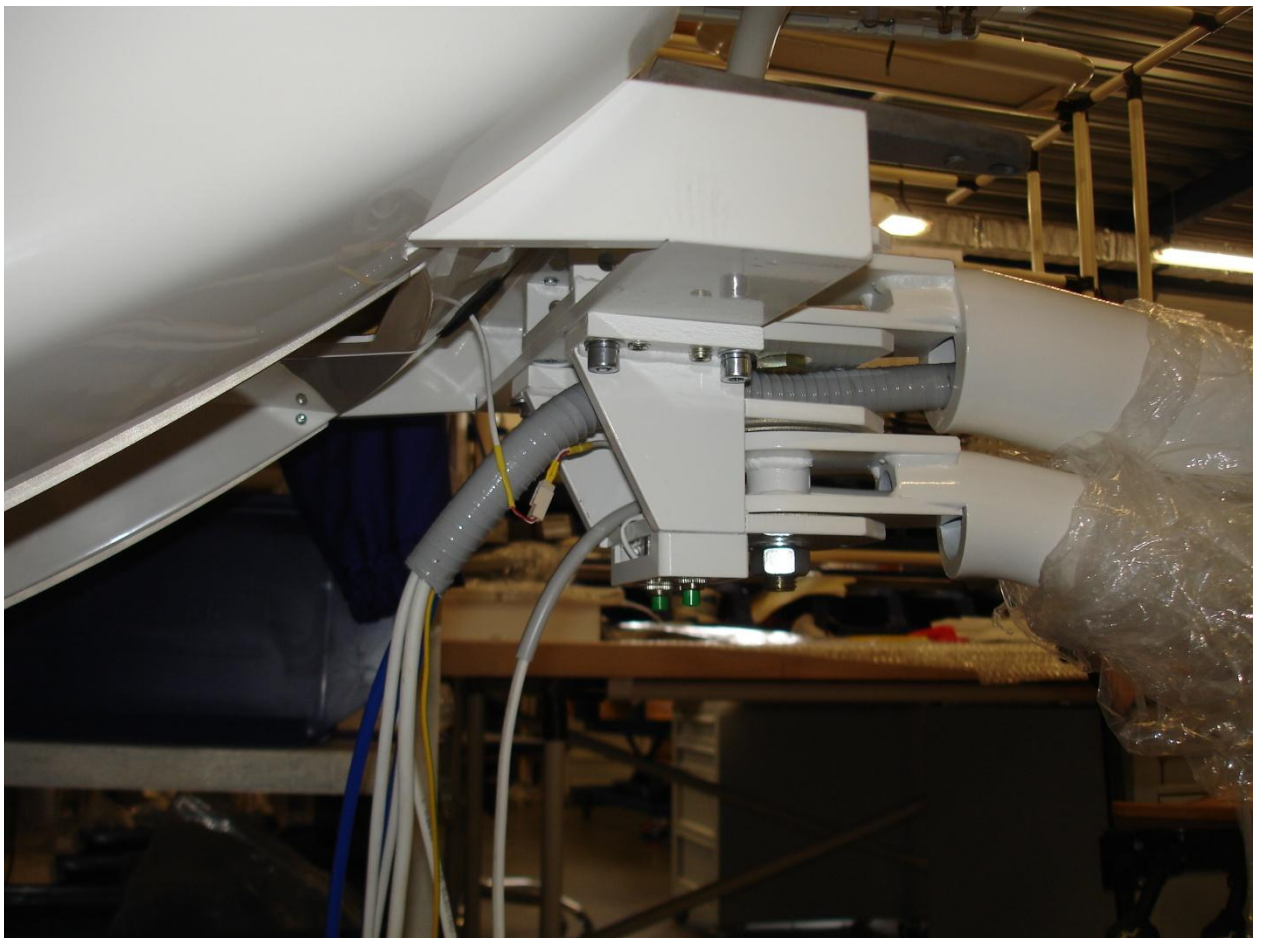

Регулювання положення поворотного важіля світильника:


-Відпустити прижимні гвинти (М8)

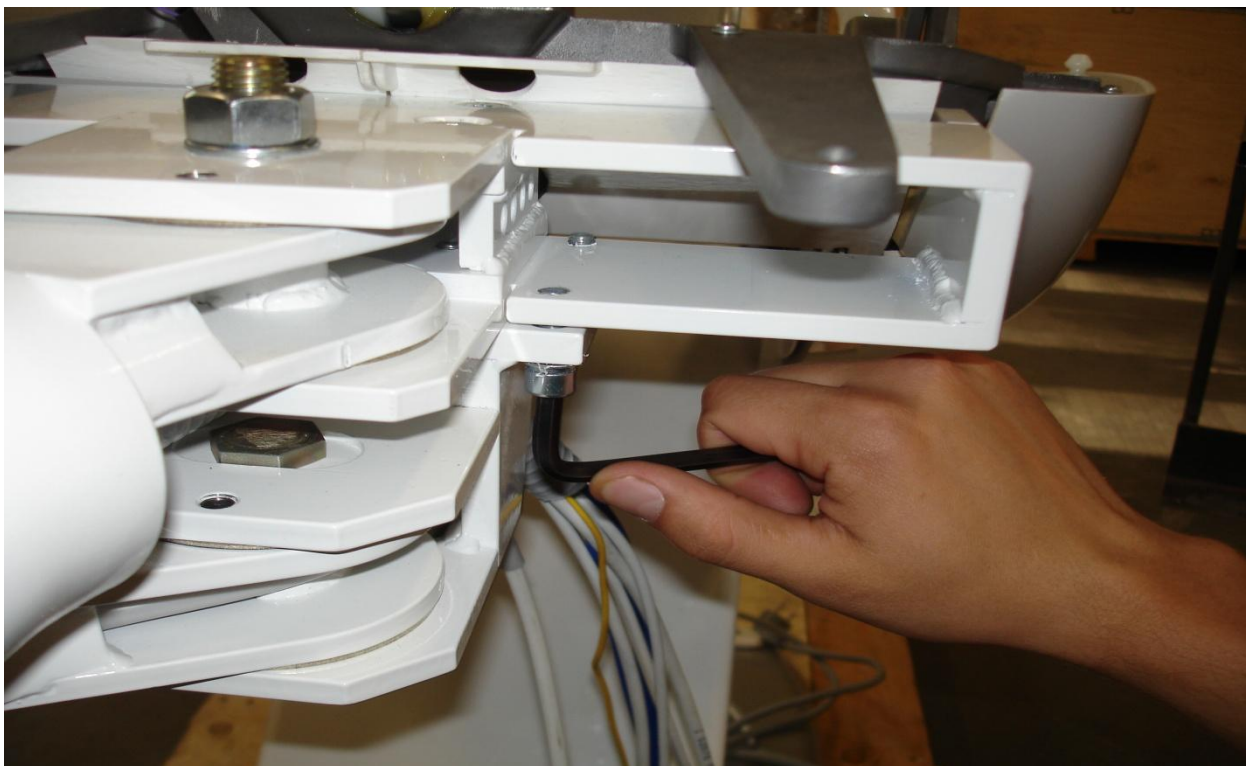


-Виставити положення важіля віджимними гвинтами



-Затягнути прижимні гвинти.

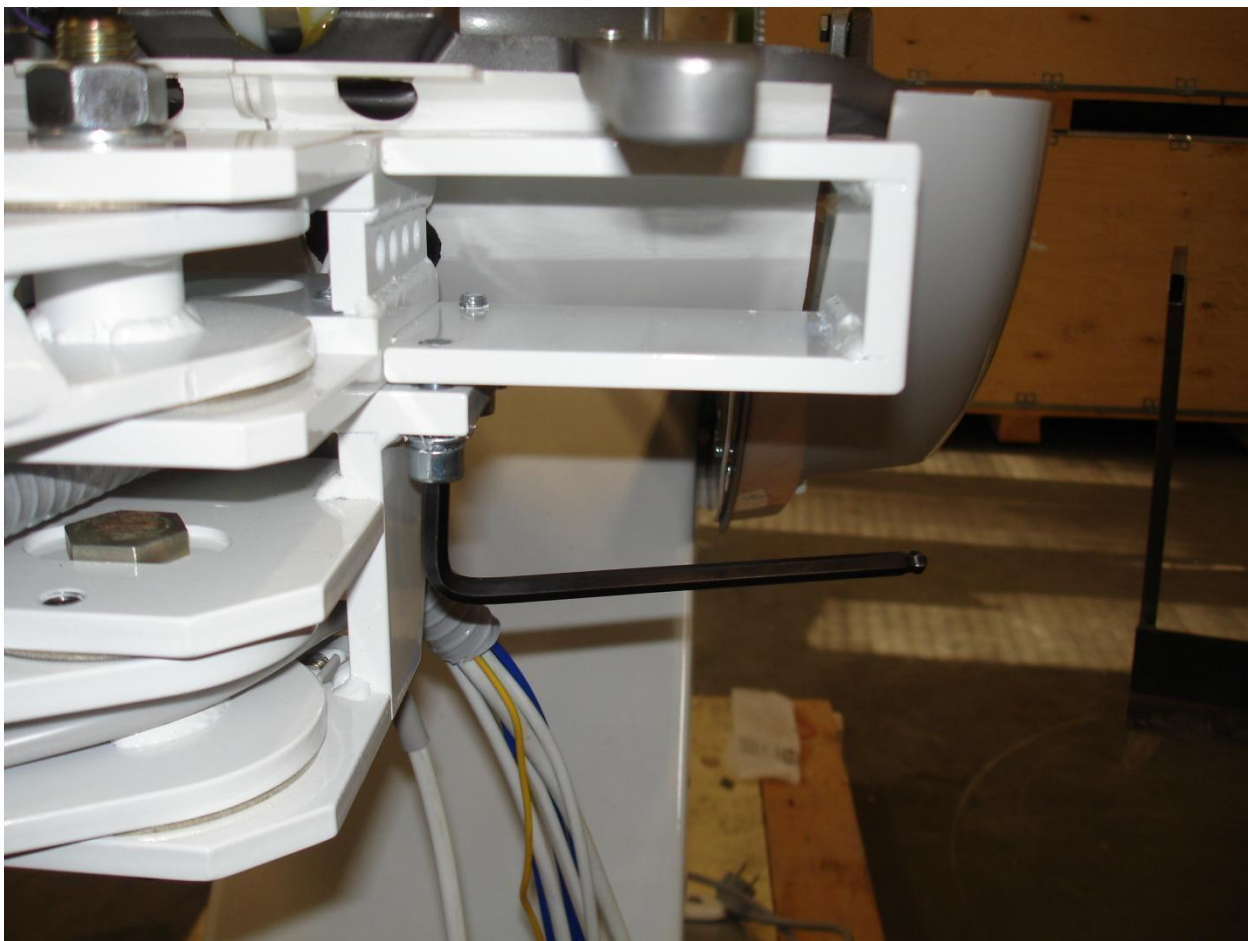

III. Монтаж світильника.

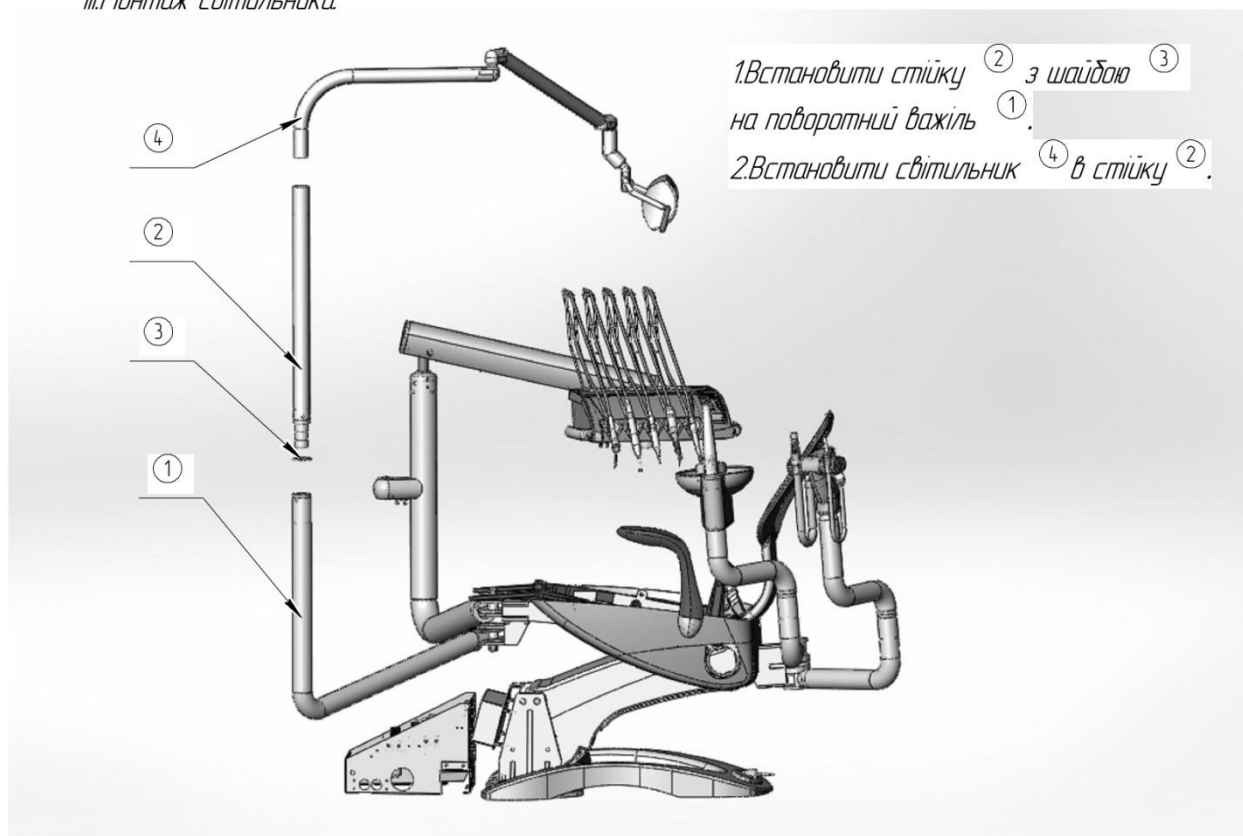

IV. Монтаж сидіння, спинки, підголівника, кришки.

