



Spare parts catalogue

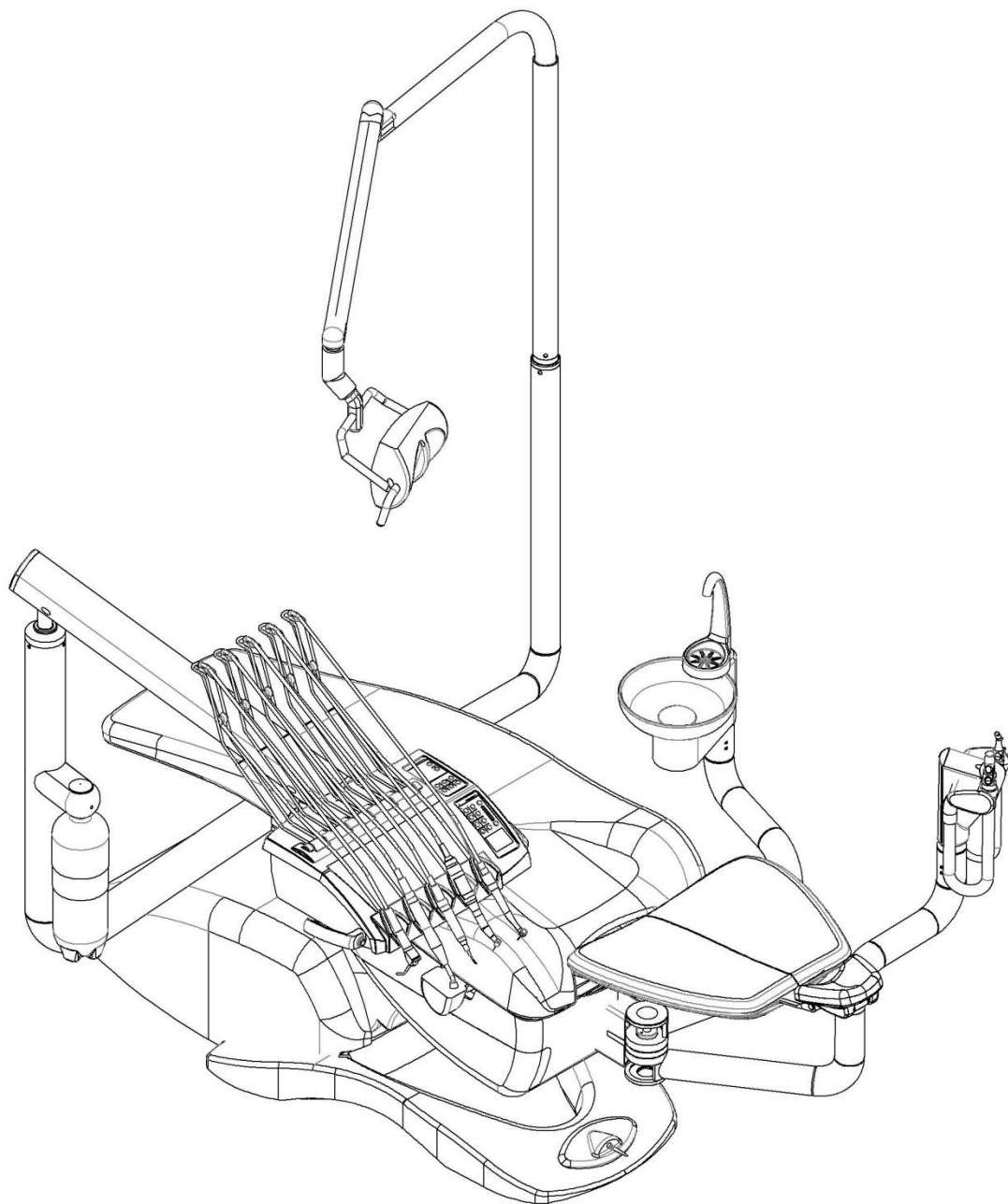


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.0	001	Крісло стоматологічне "Sting"	TECHNODENT	
	002	Тримач шлангів	System comfort AFK7603901 "Duerr"	
	003	Кришка	7600-100-05 "Duerr"	
	004	Корпус	AEGA 6.113.018	
	005	Плювачка	AEGA 4.310.011	
	006	Тримач	AEGA 6.152.031	
	007	Тримач	AEGA 6.152.030	
	008	Тримач	AEGA6.152.029	
	009	Кільце	GAL 548.00.00.01	
	010	Блок лікаря	AEGA 127.00.00.000-01	
	011	Важіль блока лікаря	AEGA 4.260.007	
	012	Блок вводу	AEGA 3.050.005-01	
	013	Важіль світильника	GAL 544.00.00.000	
	014	Стійка	AEGA 116.76.000	
	015	Консоль пантографічна	AEGA 6.067.011	
	016	Світильник	LYNX "DID"	

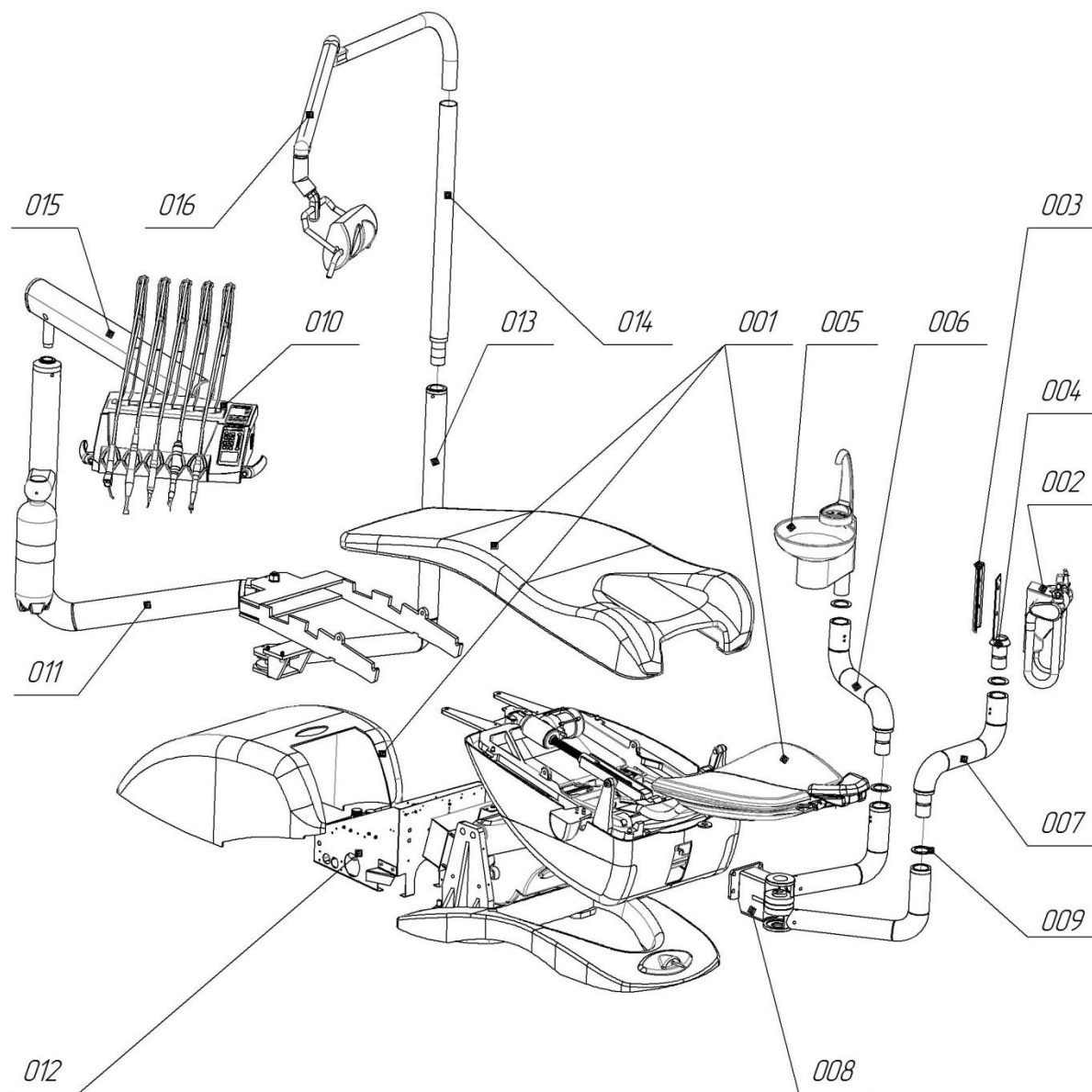

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

"Gallant" "AMBIDEXTRE"
List 5.0


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.1	001	Корпус	AEGA 6.115.004	
5.1	002	Корпус	AEGA .115.011	
5.1	003	Тримач	AEGA 6.152.012	
5.1	004	Кришка	AEGA 6.172.025	
5.1	005	Чаша	AEGA 6.210.003	
5.1	006	Злив	AEGA 6.452.004	
5.1	007	Злив	AEGA 6.452.005	
5.1	008	Корпус	AEGA 8.034.033	
5.1	009	Корпус	AEGA 8.120.028	
5.1	010	Кільце	AEGA 8.249.009	
5.1	011	Накладка	AEGA 8.604.002	
5.1	012	Кільце	0700-700-01 «Duer»	
5.1	013	Штуцер	0700-720-18 «Duer»	
5.1	014	Гвинт М5-6gx10	GOST 17475-80	
5.1	015	Гвинт М3-6gx25	GOST 17475-80	
5.1	016	Гвинт М3-6gx6	GOST 11738-84	
5.1	017	Гвинт М5-6gx10	GOST 11738-84	
5.1	018	Гвинт М5-6gx30	GOST 11738-84	

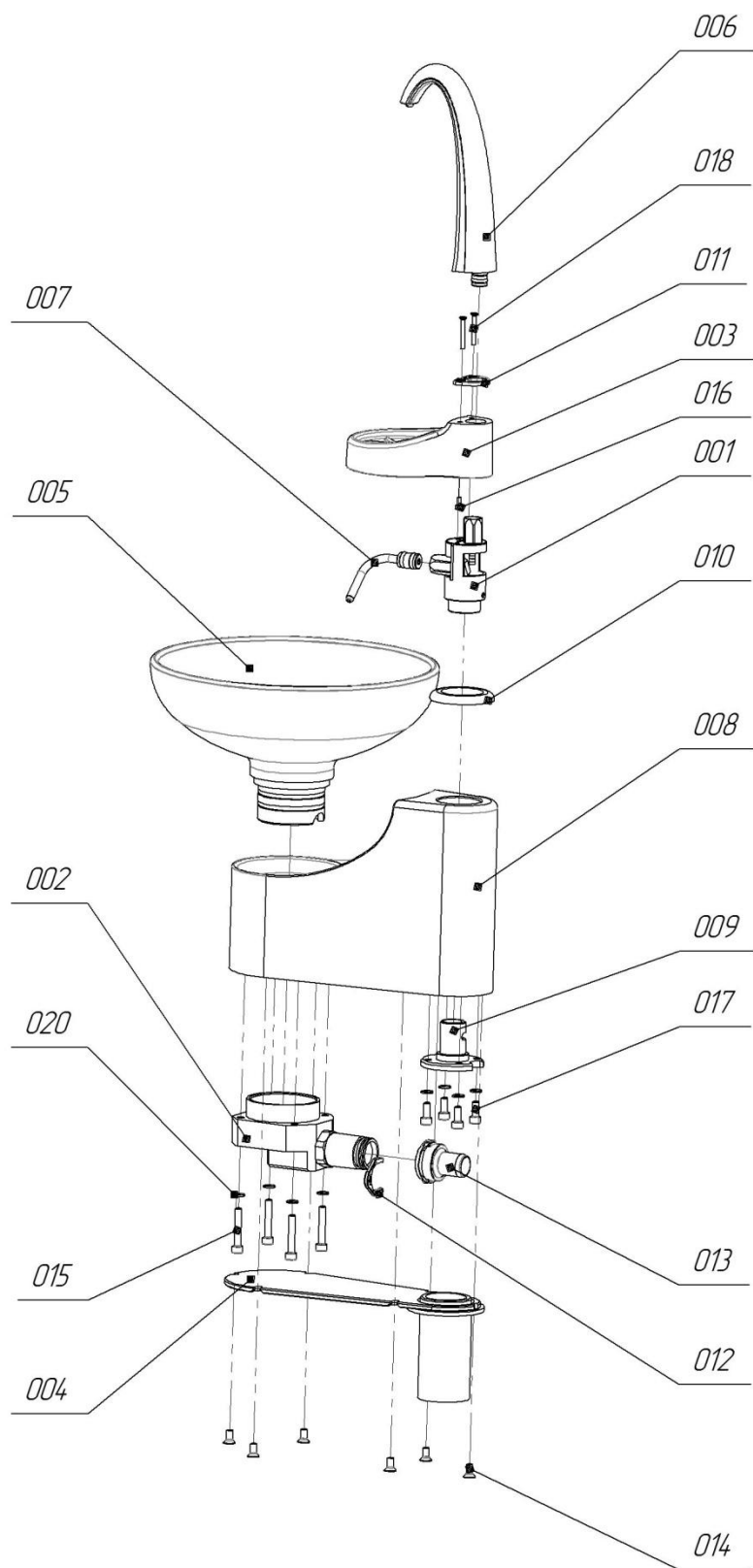

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitrya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.1*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.2	001	Консоль	AEGA 6.133.076	
5.2	002	Кільце	AEGA 8.245.014	
5.2	003	Підшипник	MU P4020	
5.2	004	Гвинт М6-6gx8	DIN 914	
5.2	005	Гвинт М6-6gx8	DIN 915	

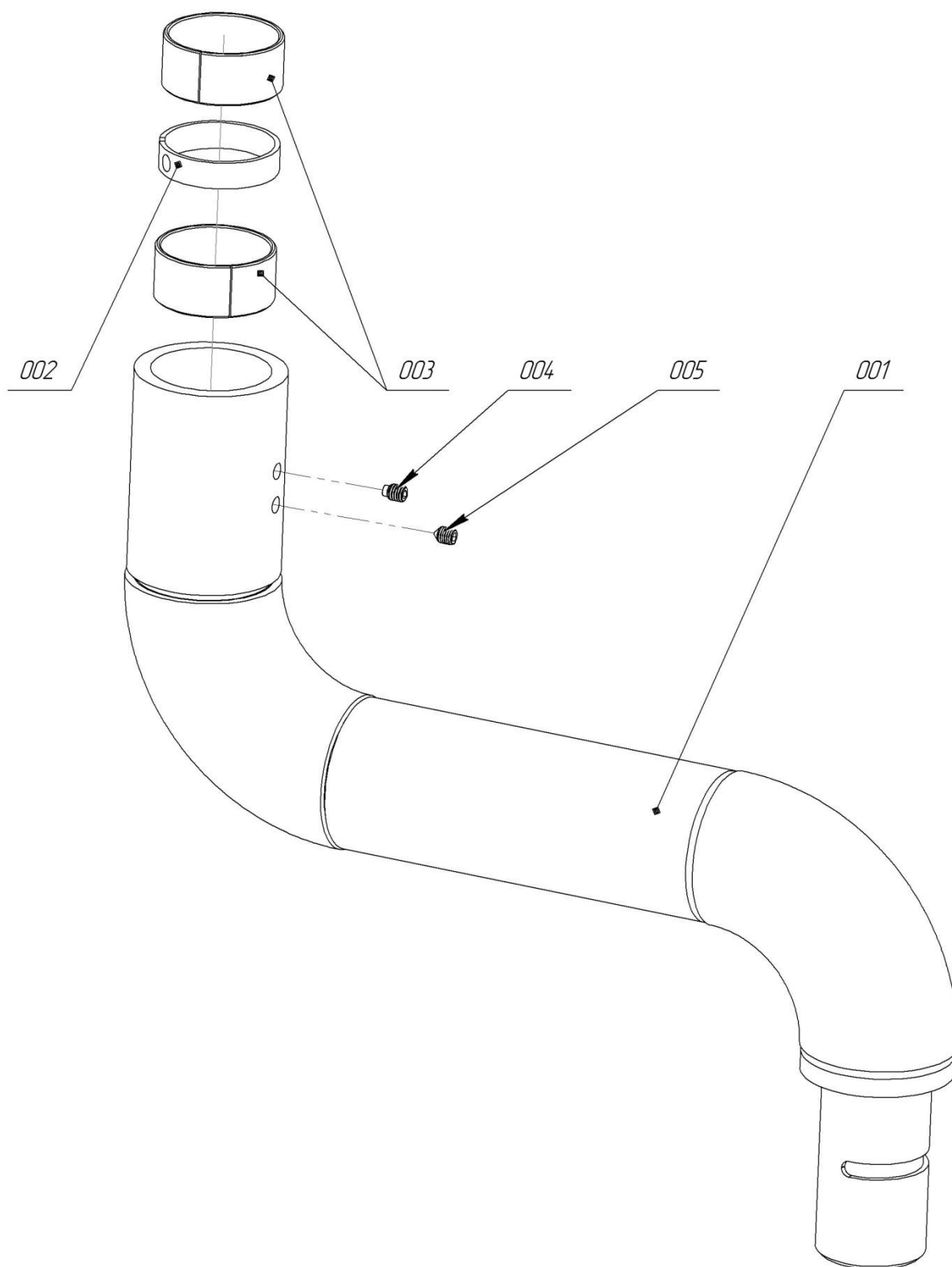

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Balkivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.2*



LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.2	001	Консоль	AEGA 6.133.074	
5.2	002	Кільце	AEGA 8.245.014	
5.2	003	Підшипник	MU P4020	
5.2	004	Гвинт М6-6gx8	DIN 914	
5.2	005	Гвинт М6-6gx8	DIN 915	

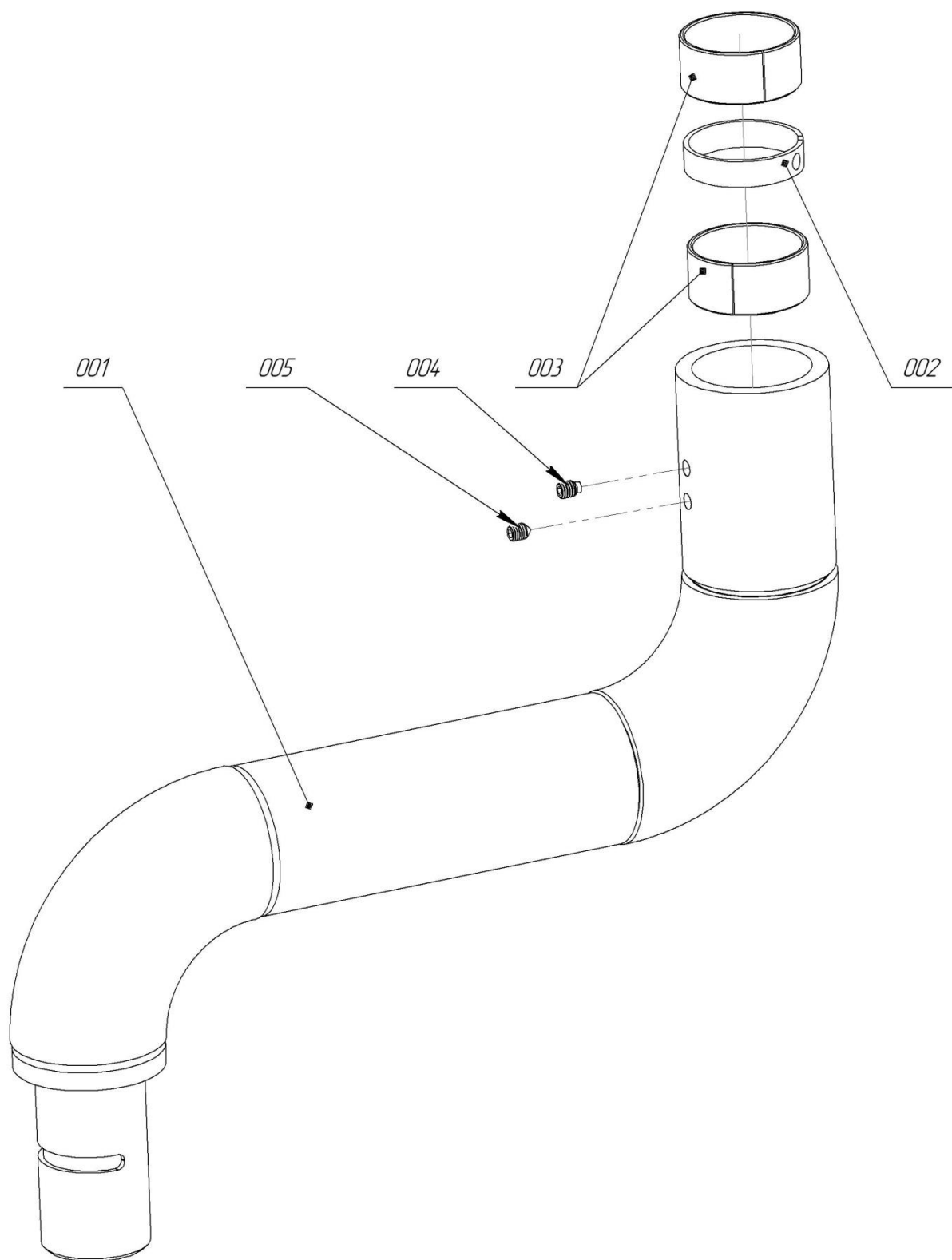

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.3*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.4	001	Кронштейн	AEGA 6.133.072	
5.4	002	Консоль	AEGA 6.133.073	
5.4	003	Консоль	AEGA 6.133.075	
5.4	004	Підшипник	AEGA 8.250.009	
5.4	005	Гайка	AEGA 8.934.004	
5.4	006	Підшипник	51110 DIN711	
5.4	007	Гвинт М5-6gx10	DIN 7991	
5.4	008	Заглушка	262.86790 «Hafele»	
5.4	009	Заглушка	045.00.725 «Hafele»	

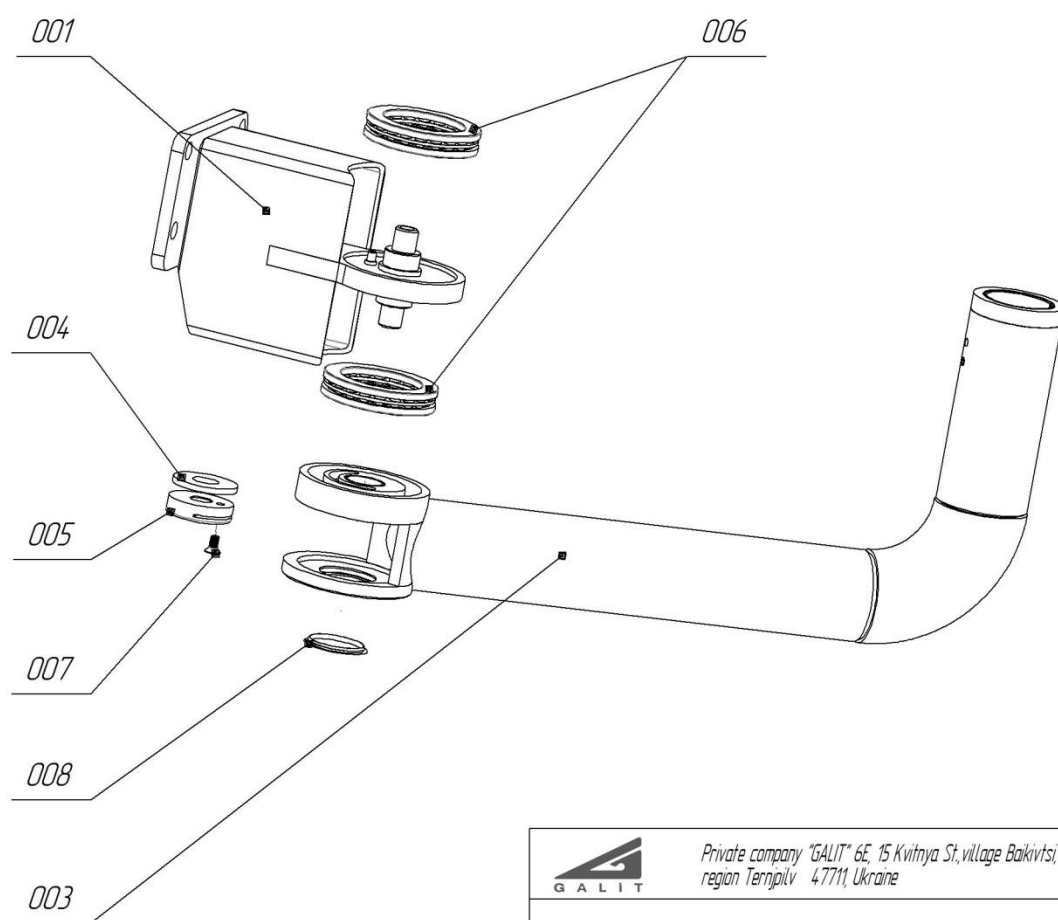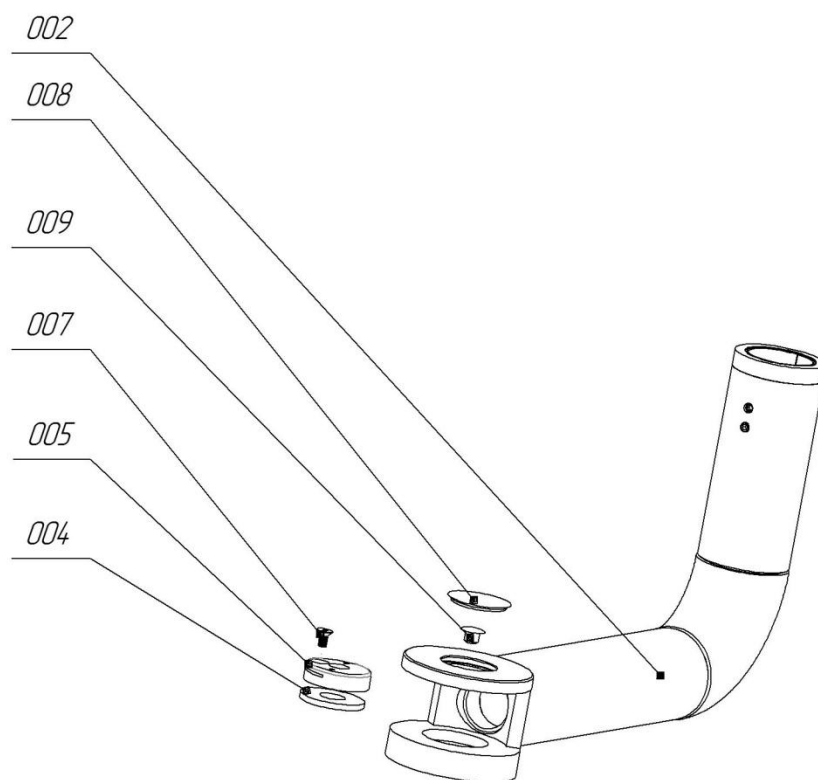

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitrya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.4*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.5	001	Консоль	AEGA 6.133.073	
5.5	002	Кільце	AEGA 8.245.014	
5.5	003	Підшипник	AEGA 8.250.010	
5.5	004	Підшипник	MU P 4020	
5.5	005	Гвинт М6-6gx8	DIN 914	
5.5	006	Гвинт М6-6gx8	DIN 915	

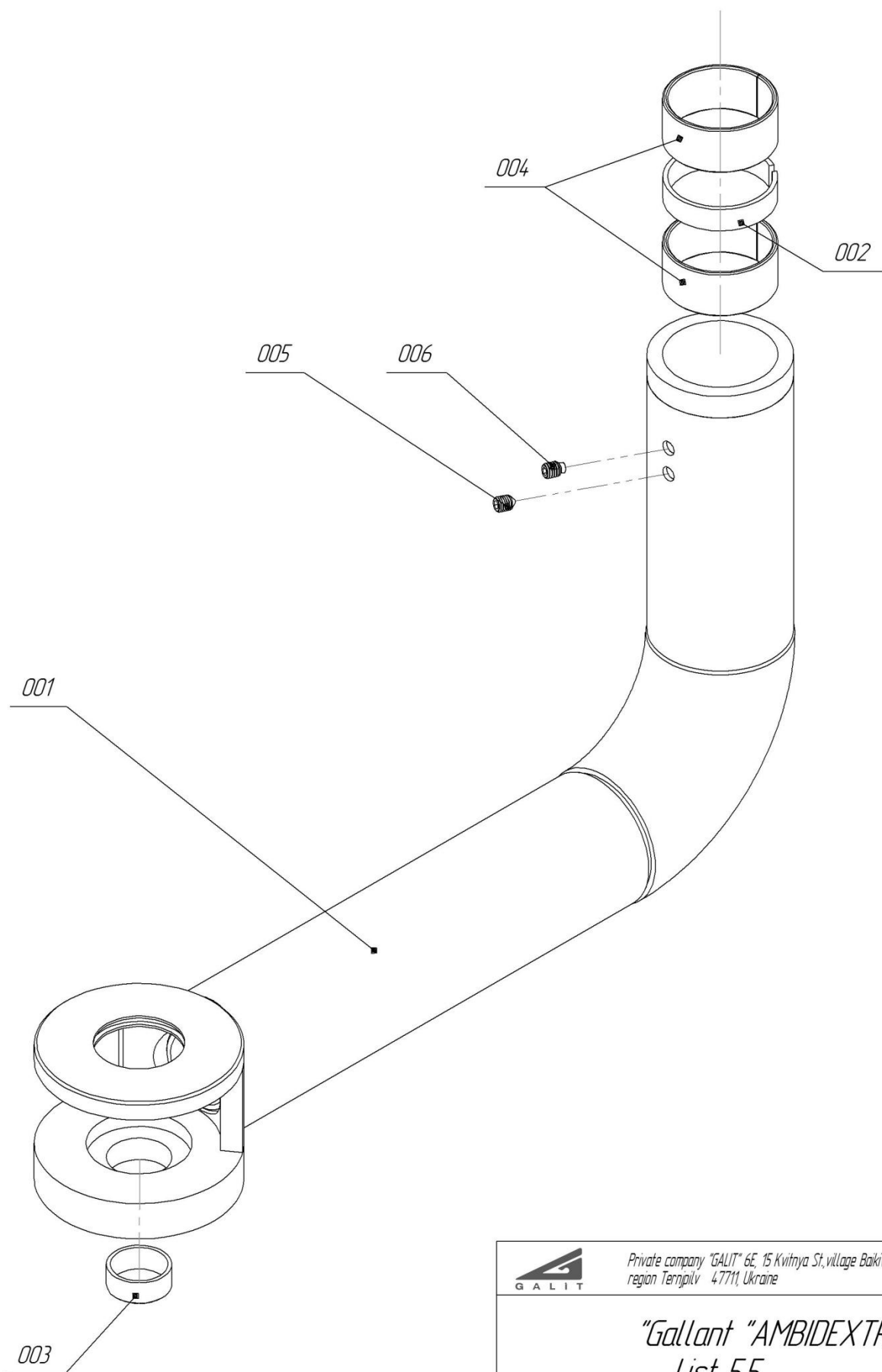

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitrya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.5*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.6	001	Консоль	AEGA 6.133.075	
5.6	002	Кільце	AEGA 8.245.014	
5.6	003	Підшипник	AEGA 8.250.010	
5.6	004	Підшипник	MU P 4020	
5.6	005	Гвинт М6-6gx8	DIN 914	
5.6	006	Гвинт М6-6gx8	DIN 915	

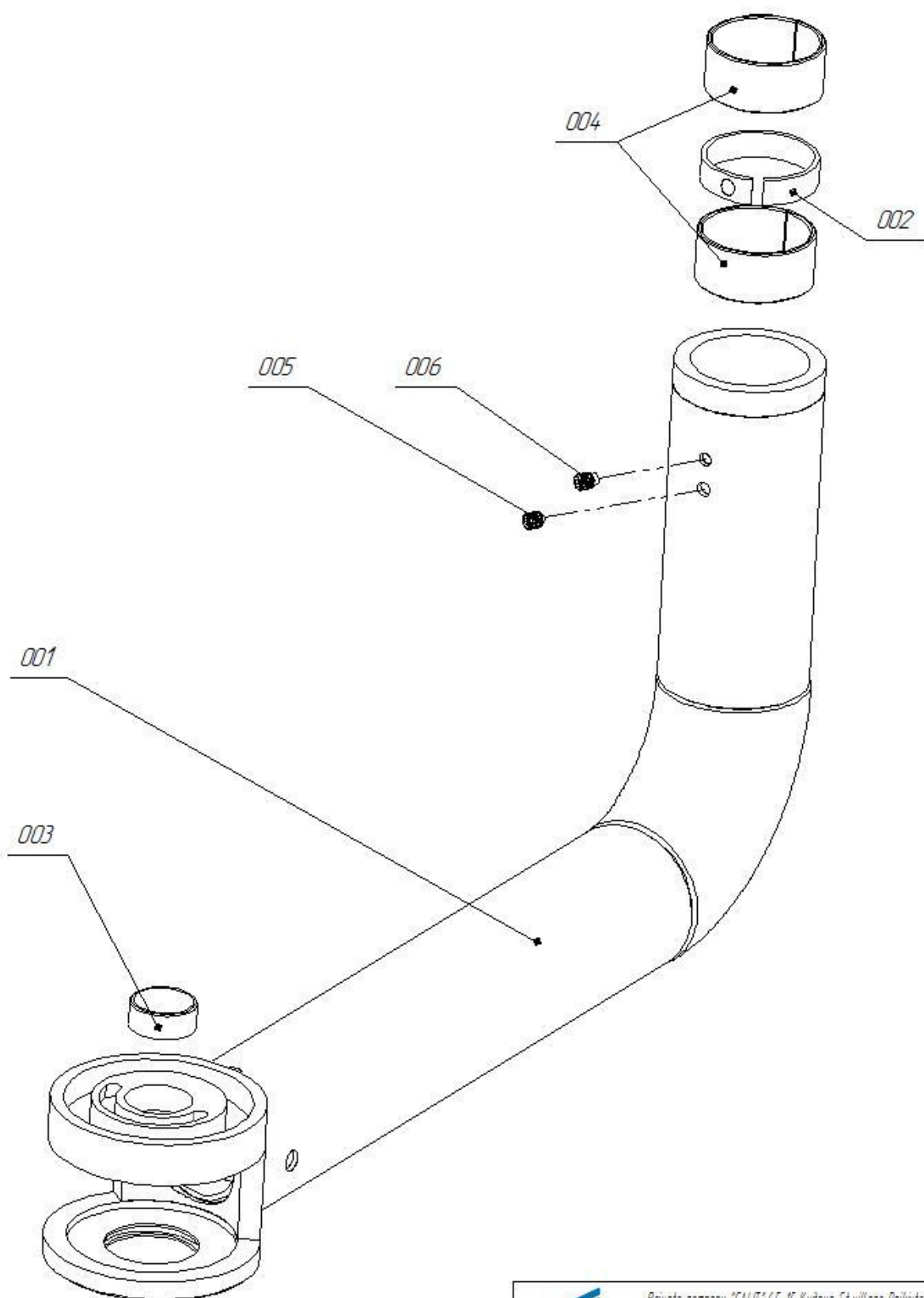

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St, village Baikitsi,
region Ternopil' 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.6*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.7	001	Кронштейн	AEGA 6.133.057	
5.7	002	Консоль	AEGA 6.133.056	
5.7	003	Вісь	AEGA 8.310.009	
5.7	004	Шайба	AEGA 9.949.003	
5.7	005	Підшипник	AEGA 8.250.004	
5.7	006	Гвинт М4-6gx6	GOST 1477-84	
5.7	007	Гвинт М8-6gx10	GOST 1478-84	
5.7	008	Гайка М16.5	GOST 5915-70	
5.7	009	Шайба 16.01.05	GOST 11371-78	

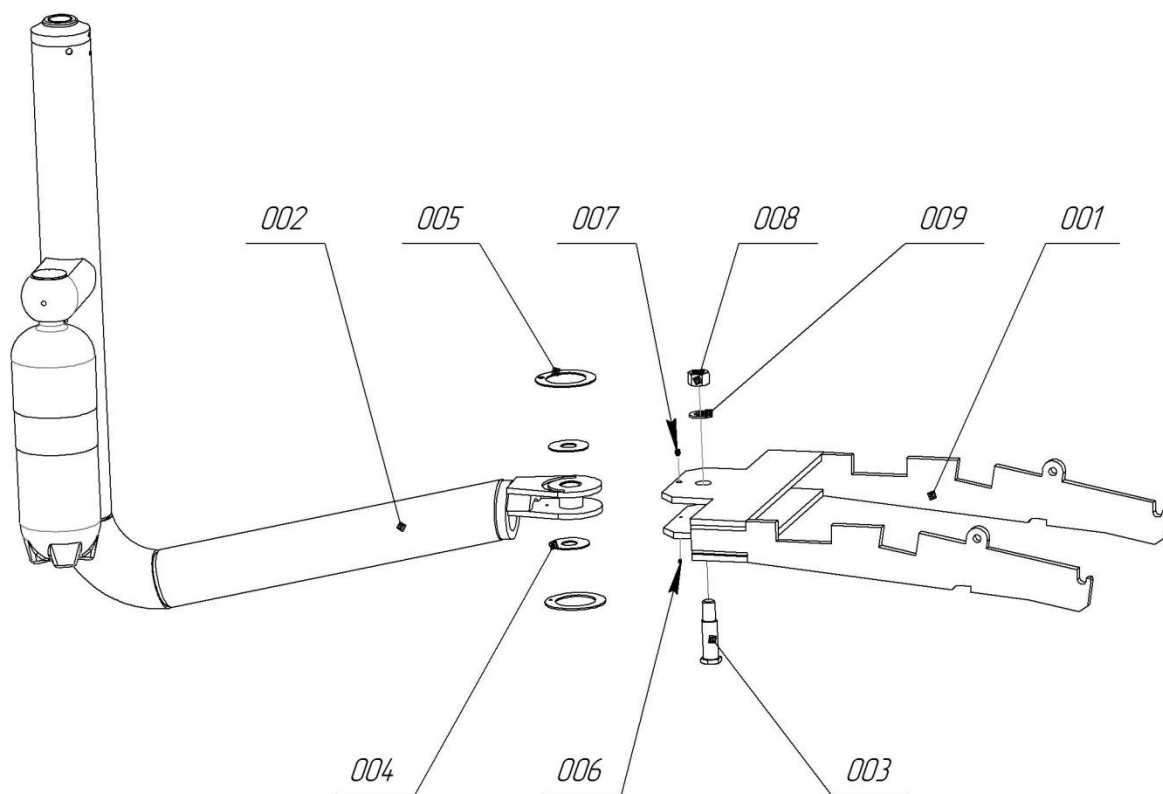

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.7*


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.7.1	001	Корпус	AEGA 8.034.031	
5.7.1	002	Кришка	AEGA 8.046.006	
5.7.1	003	Кришка	AEGA 8.048.007	
5.7.1	004	Корок	AEGA 9.313.001	
5.7.1	005	Гвинт М3-6gx10	GOST 17475-80	
5.7.1	006	Фітинг FIF-617-01		
5.7.1	007	Шайба D5 FIF 607-01		
5.7.1	008	Гвинт М5-6gx16	GOST 17475-80	
5.7.1	009	Гвинт М8-6gx25	GOST 11738-84	
5.7.1	010	Гвинт М6-6gx10	GOST 1477-84	
5.7.1	011	Гвинт М6-6gx10	GOST 1478-84	
5.7.1	012	Шайба 865Г.029	GOST 6402-70	
5.7.1	013	Підшипник MU P2815		
5.7.1	014	Кільце	AEGA 8.249.007	
5.7.1	015	Підшипник MU P2010		

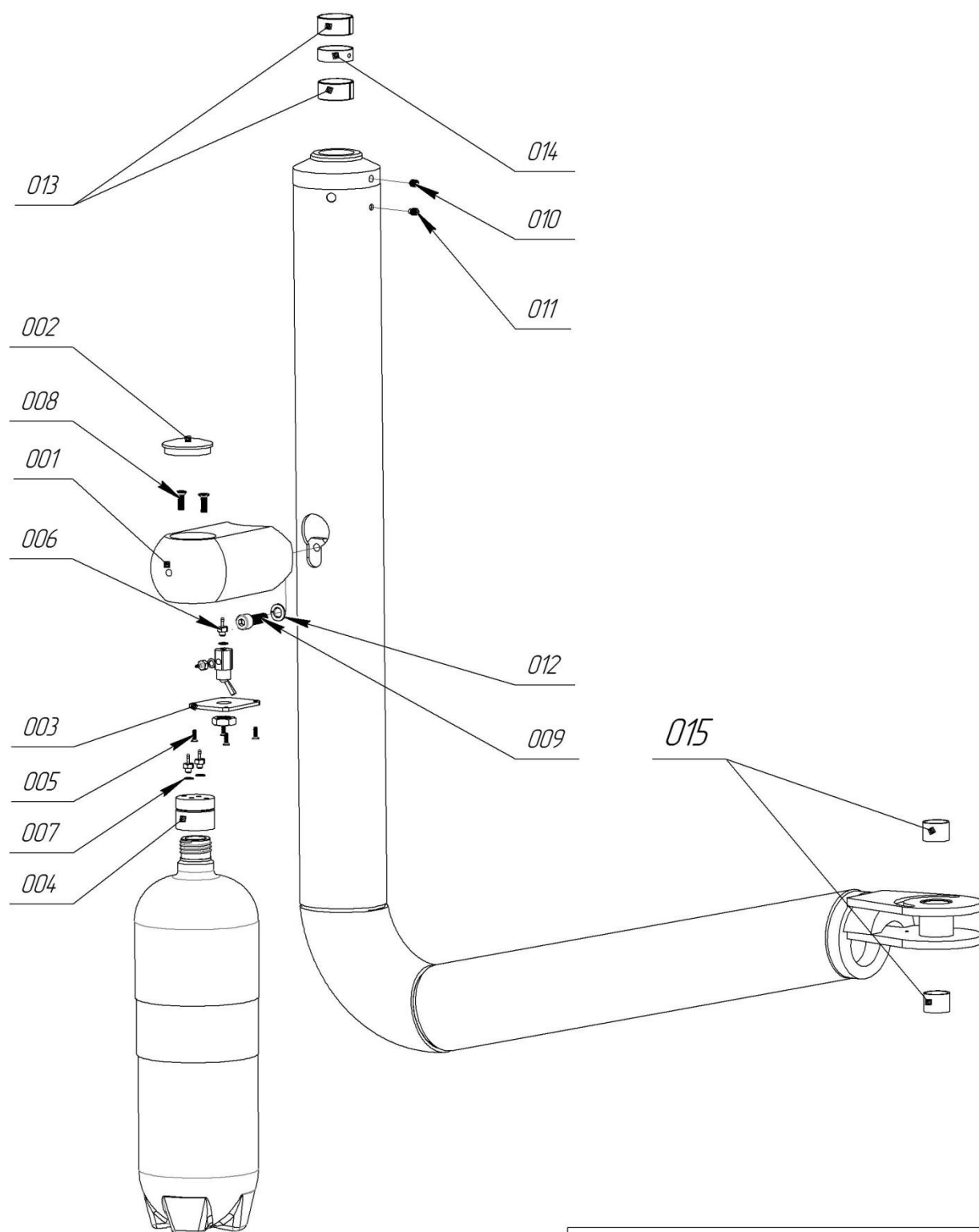

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

"Gallant" "AMBIDEXTRE"
List 5.7.1


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.8	001	Корпус	AEGA 6.113.008	
5.8	002	Блок регуляторів повітря	AEGA 5.886.001	
5.8	003	Блок регуляторів води	AEGA 5.886.002	
5.8	004	Тримач запобіжника	TLF -100-3	
5.8	005	Трансформатор	ZL300300-041	
5.8	006	Шайба	A6 DIN124	
5.8	007	Гайка	M6 DIN934	
5.8	008	Прокладка	AEGA 116.95.002	
5.8	009	Болт	M6x60 DIN931	
5.8	010	Прокладка	AEGA 116.95.002-01	
5.8	011	Клапан плювачки	7560-500-52	

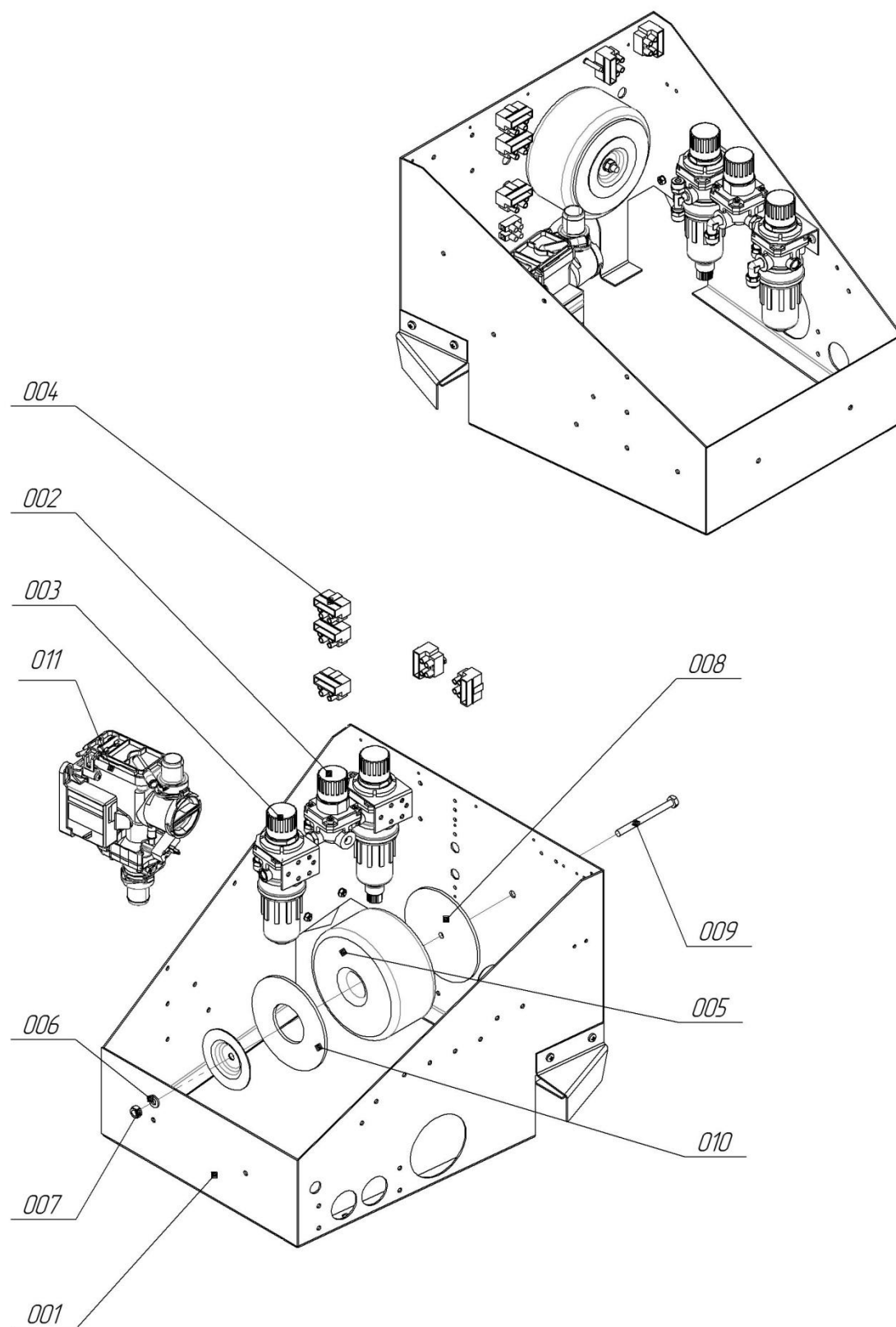

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

"Gallant" "AMBIDEXTRE"
List 5.8


LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.8.1	001	Кронштейн	AEGA 116.00.00.070	
5.8.1	002	Мікрорегулятор	M008-P00	
5.8.1	003	Фільтр регулятор	N108-D00	
5.8.1	004	Фітинг	1500 6/4-1/8	
5.8.1	005	Фітинг	1500 8/6-1/8	
5.8.1	006	Фітинг	200/1 1/8	
5.8.1	007	Фітинг	2500 1/8	

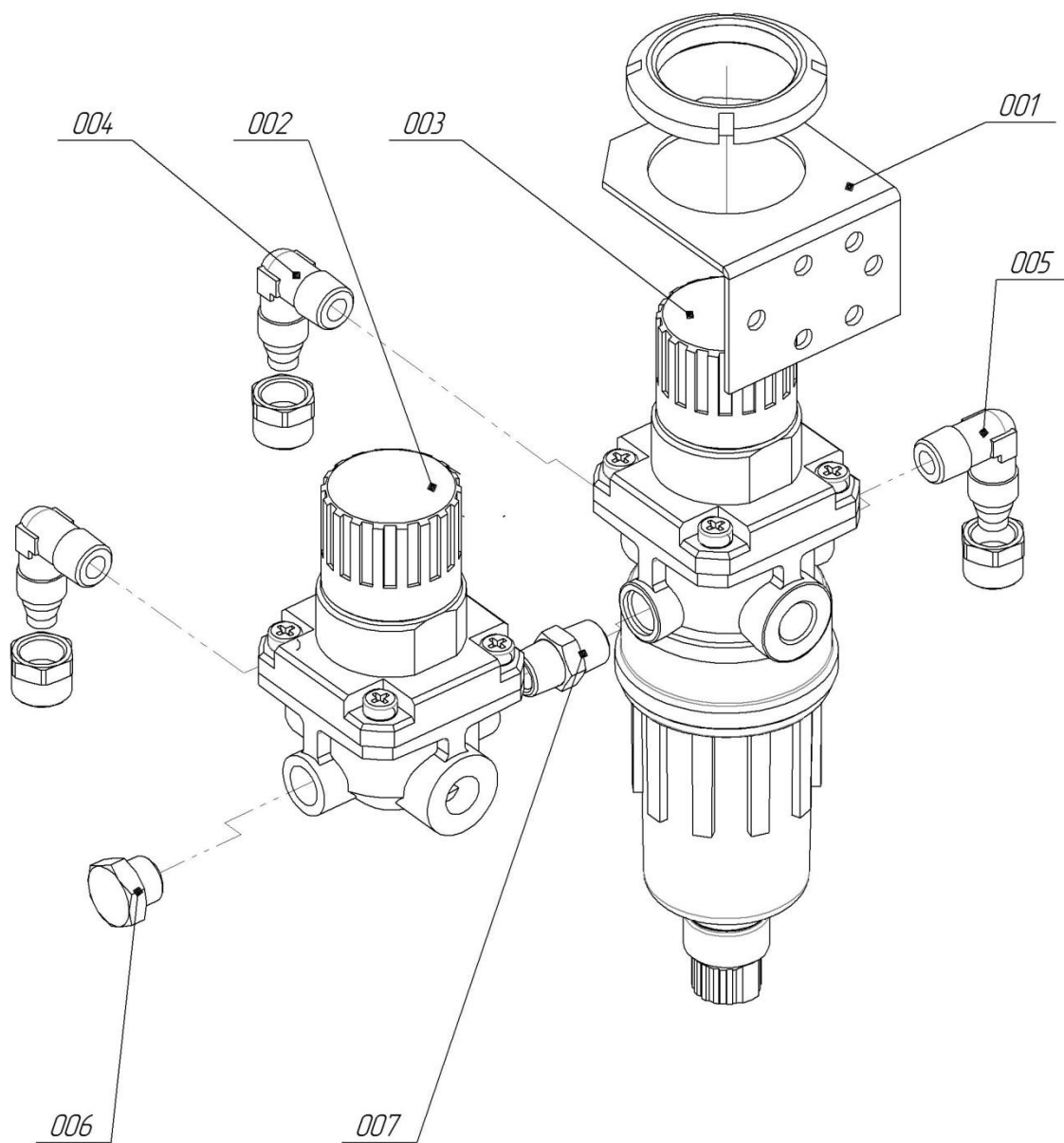

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

"Gallant" "AMBIDEXTRE"
List 5.8.1

LIST	№	DESCRIPTION	CODE KD	CODE GALIT
5.8.2	001	Кронштейн	AEGA 116.00.00.070	
5.8.2	002	Фільтр регулятор	N108-D01-CO1	
5.8.2	003	Фітинг	1500 8/6-1/8	
5.8.2	004	Фітинг	1500 6/4-1/8	
5.8.2	005	Фітинг	200/1 1/8	

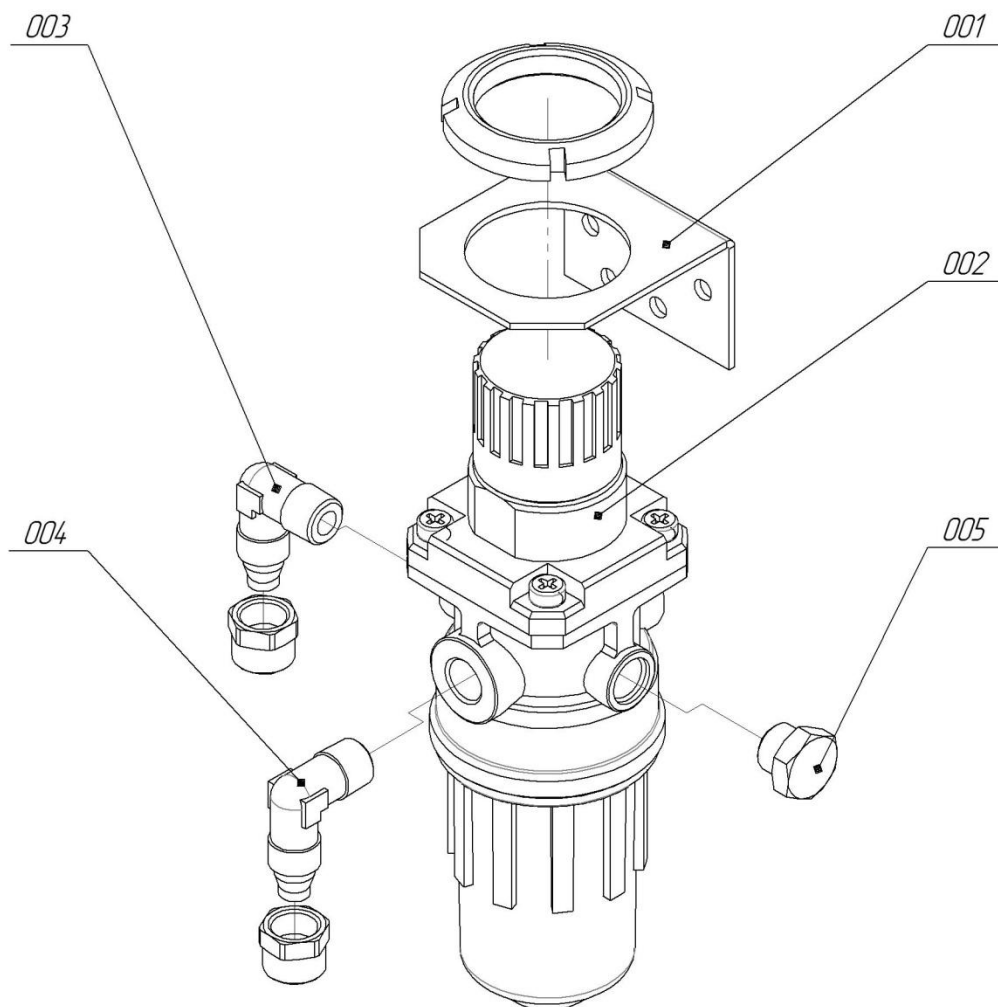

Private company "GALIT" 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopiliv 47711, Ukraine

*"Gallant "AMBIDEXTRE"
List 5.8.2*