


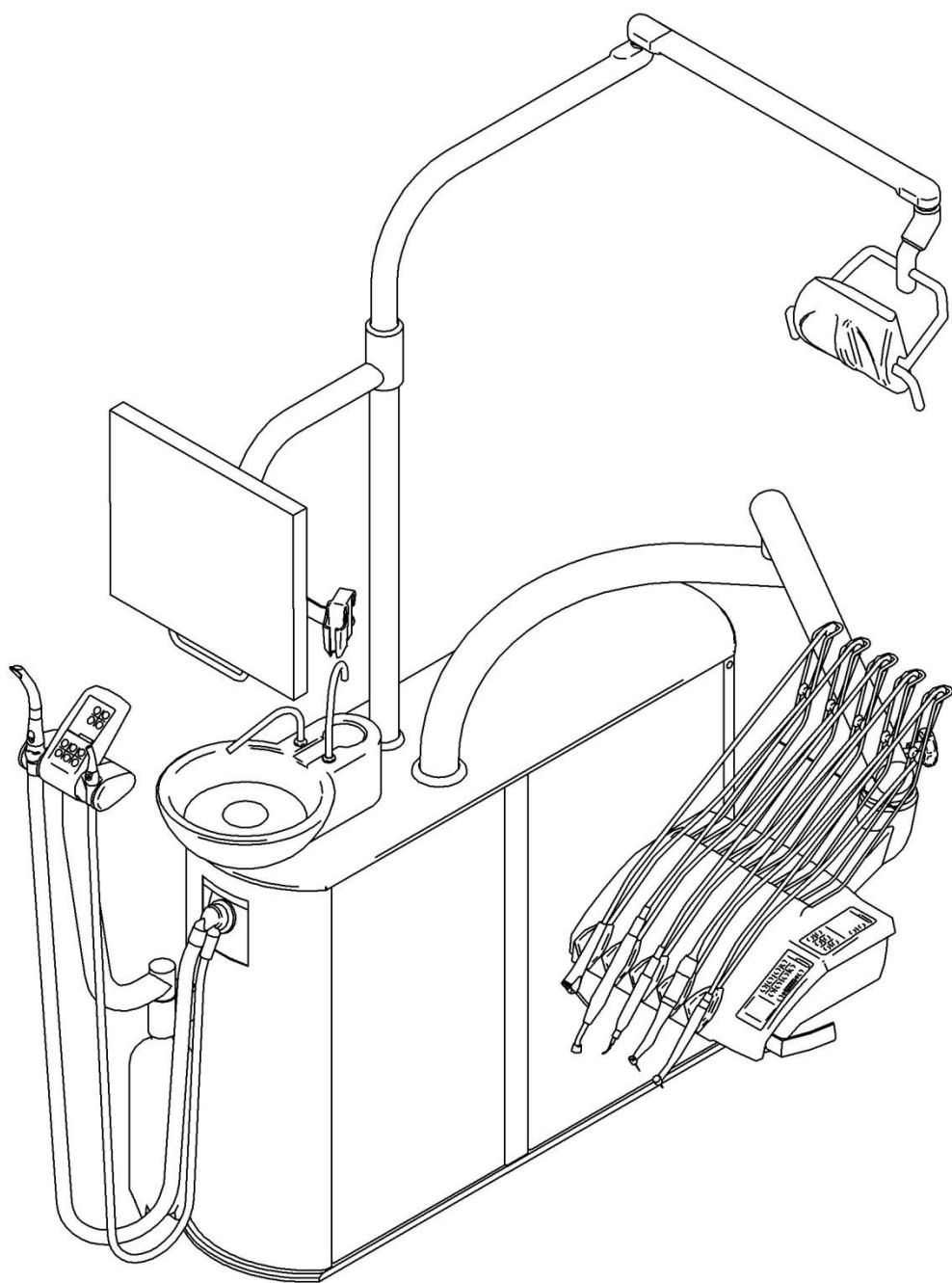


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.1		Установка стоматологічна автономна	AEGA2.000.010	
8.1	001	Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.1	002	Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.1	003	Плита	AEGA8.057.007	
8.1	004	Плювальниця	AEGA4.310.002	
8.1	005	Стійка	AEGA116.76.00.000	
8.1	006	Блок асистента	AEGA116.93.00.000	
8.1	007	Блок лікаря	AEGA137.00.00.000	
8.1	008	Адаптер	AEGA6.152.013	
8.1	009	Тримач	GAL043.00.00.000	
8.1	010	Консоль пантографічна	GALIT 42R400 THCG	
8.1	011	Світильник		
8.1	012	Монітор	Neovo DR-17	

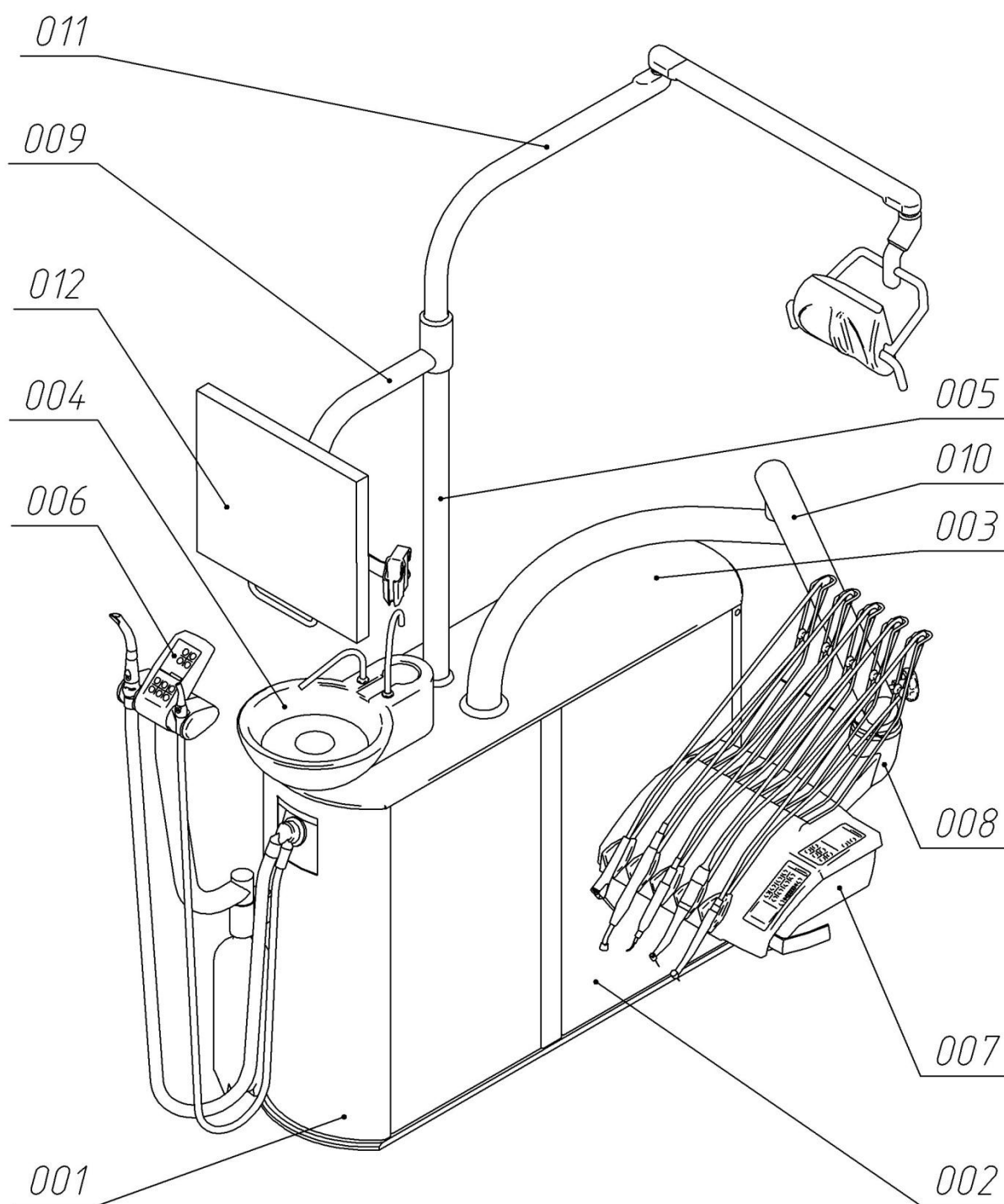


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.1

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.2		Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.2	001	Панель	AEGA6.172.008	
8.2	002	Панель	AEGA6.172.009	
8.2	003	Плювальниця	AEGA4.310.002	
8.2	004	Блок асистента	AEGA116.93.00.000	
8.2	005	Важіль	AEGA216.04.00.000	
8.2	006	Стійка	AEGA116.76.00.000	
8.2	007	Консоль пантографічна	GALIT 42R400 THCG	
8.2	008	Кільце	AEGA116.00.00.061	
8.2	009	Кільце	AEGA116.00.00.061-01	
8.2	010	Гвинт	AEGA116.00.00.062-01	
8.2	011	Кільце	AEGA116.00.00.086	
8.2	012	Шайба	AEGA116.78.00.004	
8.2	013	Заглушка	AEGA116.83.00.001	
8.2	014	Кільце	AEGA216.00.00.007	
8.2	015	Гвинт DIN 914 M6x6	986006-H	
8.2	016	Гвинт DIN 915 M6x6	986006-C	
8.2	017	Фільтр	0725-040-50	
8.2	018	Кришка фільтра	0725-041-05	

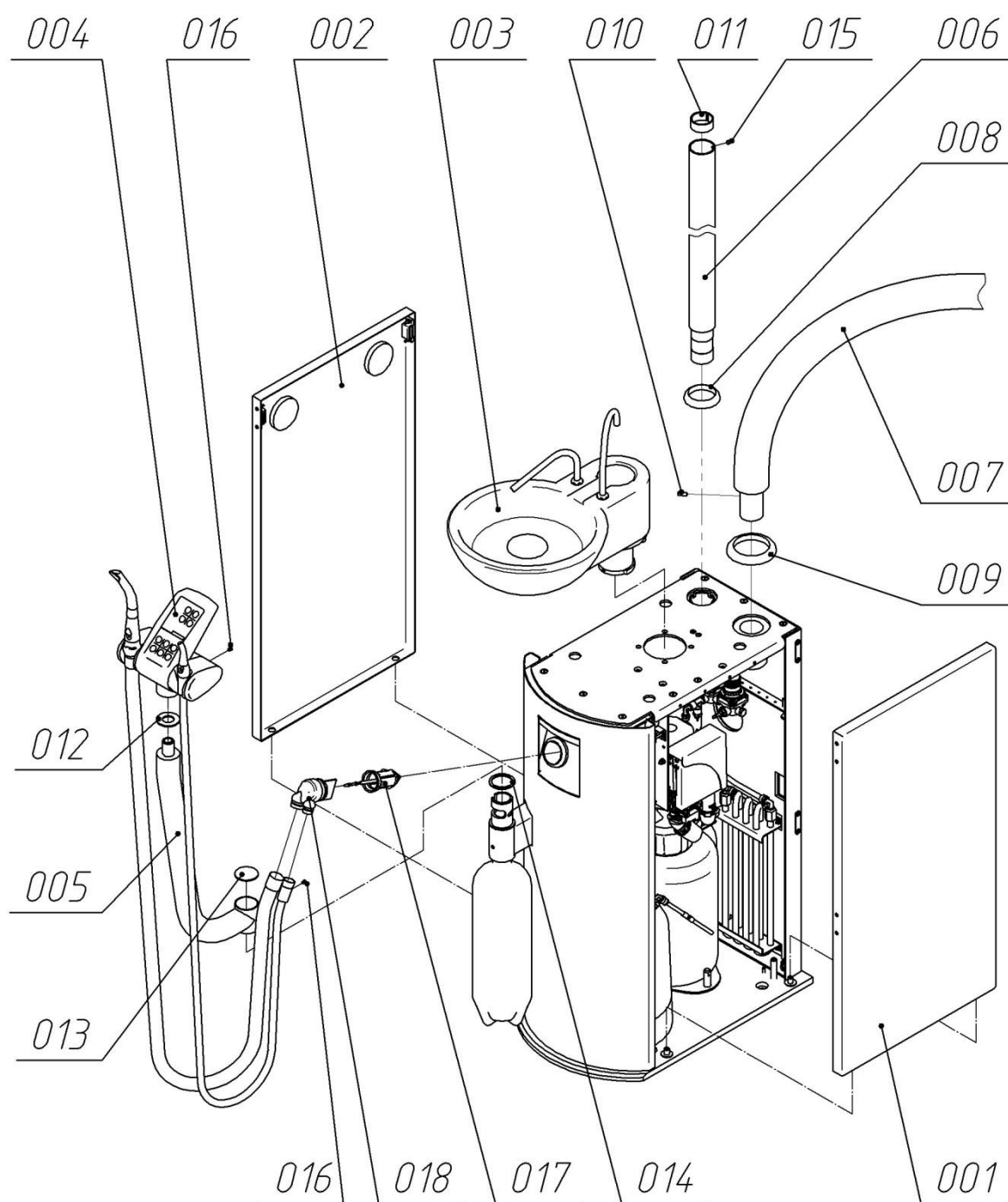


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.2

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.3		Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.3	001	Фільтр	AEGA5.886.002	
8.3	002	Панель	AEGA6.122.022	
8.3	003	Стійка	AEGA6.150.006	
8.3	004	Стійка	AEGA6.150.007	
8.3	005	Стакан	AEGA116.75.00.000	
8.3	006	Корпус	AEGA116.77.00.000	
8.3	007	Кронштейн	AEGA8.090.149-01	
8.3	008	Кільце	AEGA116.77.00.001	
8.3	009	Кільце	GAL268.00.00.003	
8.3	010	Гайка DIN 934 M2,5	60025-2	
8.3	011	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.3	012	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.3	013	Гайка DIN 934 M8	6008-2	
8.3	014	Гвинт DIN 913 M6x10	986010-P	
8.3	015	Гвинт DIN 914 M6x6	986010-H	
8.3	016	Гвинт DIN 7985 M2,5X12	5M52512-2	
8.3	017	Гвинт DIN 7985 M3X16	5M53016-2	
8.3	018	Гвинт DIN 965/963 M4X16	5M14016-2	
8.3	019	Гвинт DIN 965/963 M6X16	5M16016-2	
8.3	020	Кільце DIN 472 47	95PK2047	
8.3	021	Підшипник DIN 618-1	Hk40X16	
8.3	022	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.3	023	Шайба DIN 7980 8	7P08-2	
8.3	024	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.3	025	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.3	026	Мікроперемикач	SS-5GL2	

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.4		Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.4	001	Фільтр СЧВ	AEGA5.886.010	
8.4	002	Плита нижня	AEGA6.126.011	
8.4	003	Стійка	AEGA6.150.006	
8.4	004	Стійка	AEGA6.150.007	
8.4	005	Тримач	AEGA216.03.00.000	
8.4	006	Підкладка	AEGA7.840.002	
8.4	007	Шайба	AEGA7.845.001	
8.4	008	Трубка	AEGA7.867.001	
8.4	009	Стійка	AEGA8.120.005	
8.4	010	Стійка	AEGA8.120.007	
8.4	011	Корок	AEGA9.313.001	
8.4	012	Шпилька	AEGA016.00.00.005	
8.4	013	Кільце	AEGA116.00.00.097	
8.4	014	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.4	015	Гайка DIN 934 M10	6006-2	
8.4	016	Гайка DIN 939B M10	6Z06-2	
8.4	017	Гвинт DIN 913 M6x6	986006-P	
8.4	018	Гвинт DIN 912 M6x80	5156080-2	
8.4	019	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.4	020	Шайба DIN 7980 10	7P10-2	
8.4	021	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.4	022	Шайба DIN 125 10	7O10-2	
8.4	023	Фітинг	2601 2-M5	
8.4	024	Фітинг	2601 4,5-M5	
8.4	025	Захисний ковпачок	637.02.090	
8.4	026	Опора-гвинт	637.03.009	
8.4	027	Пляшка 2,0 л	ACF-543-02	
8.4	028	Перемикач пневматичний	3Way VAF-451-03	
8.4	029	Фітинг	FIF-617-01	
8.4	030	Шайба	FIF-607-01	

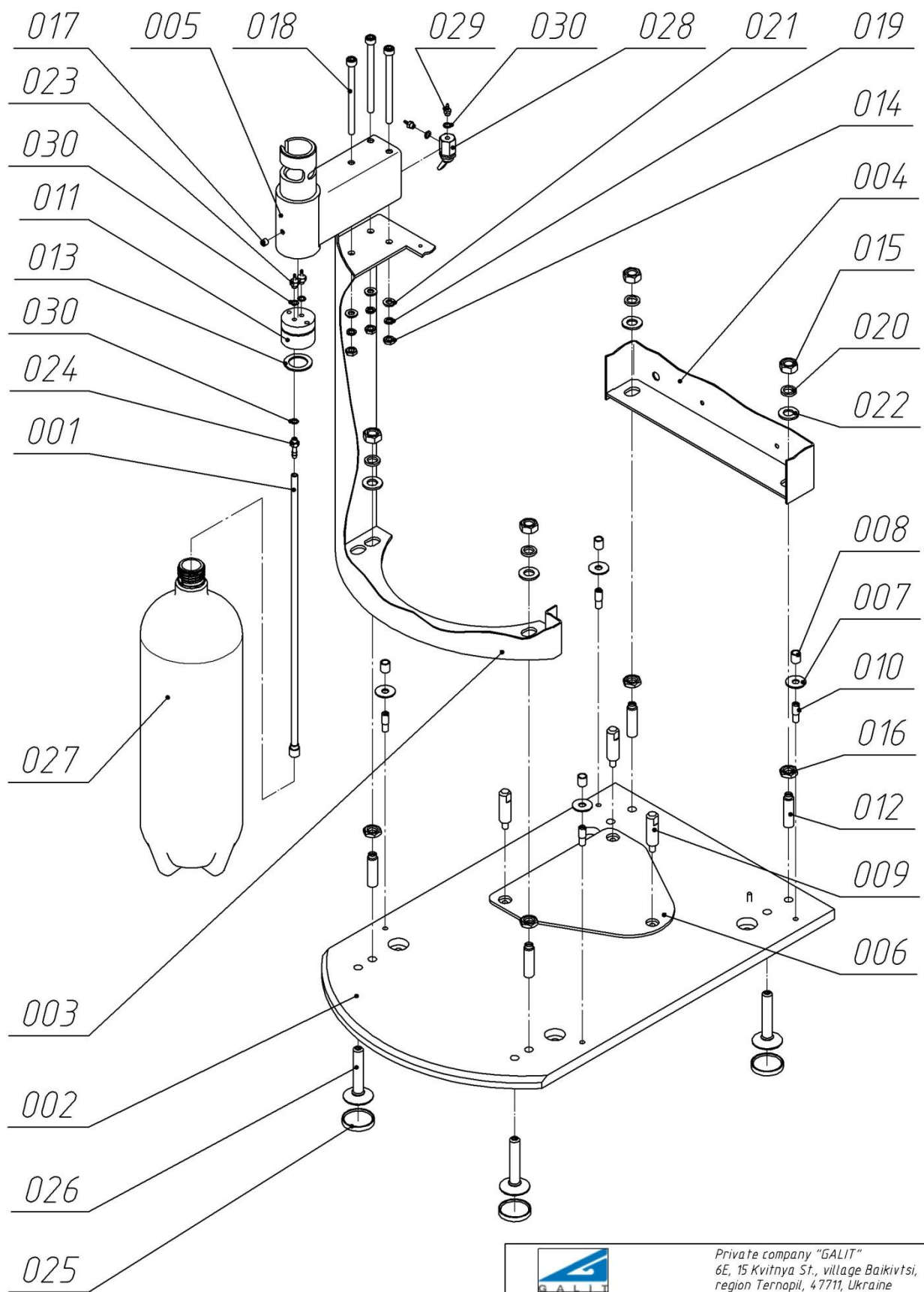


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.4

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.5		Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.5	001	Резервуар для води	AEGA5.887.003	
8.5	002	Кронштейн	AEGA8.090.091	
8.5	003	Перемикач пневматичний	3Way VAF-451-03	
8.5	004	Гвинт DIN 7985 M4X8	5M54008-2	
8.5	005	Фітинг	FIF-617-01	
8.5	006	Шайба	FIF-607-01	

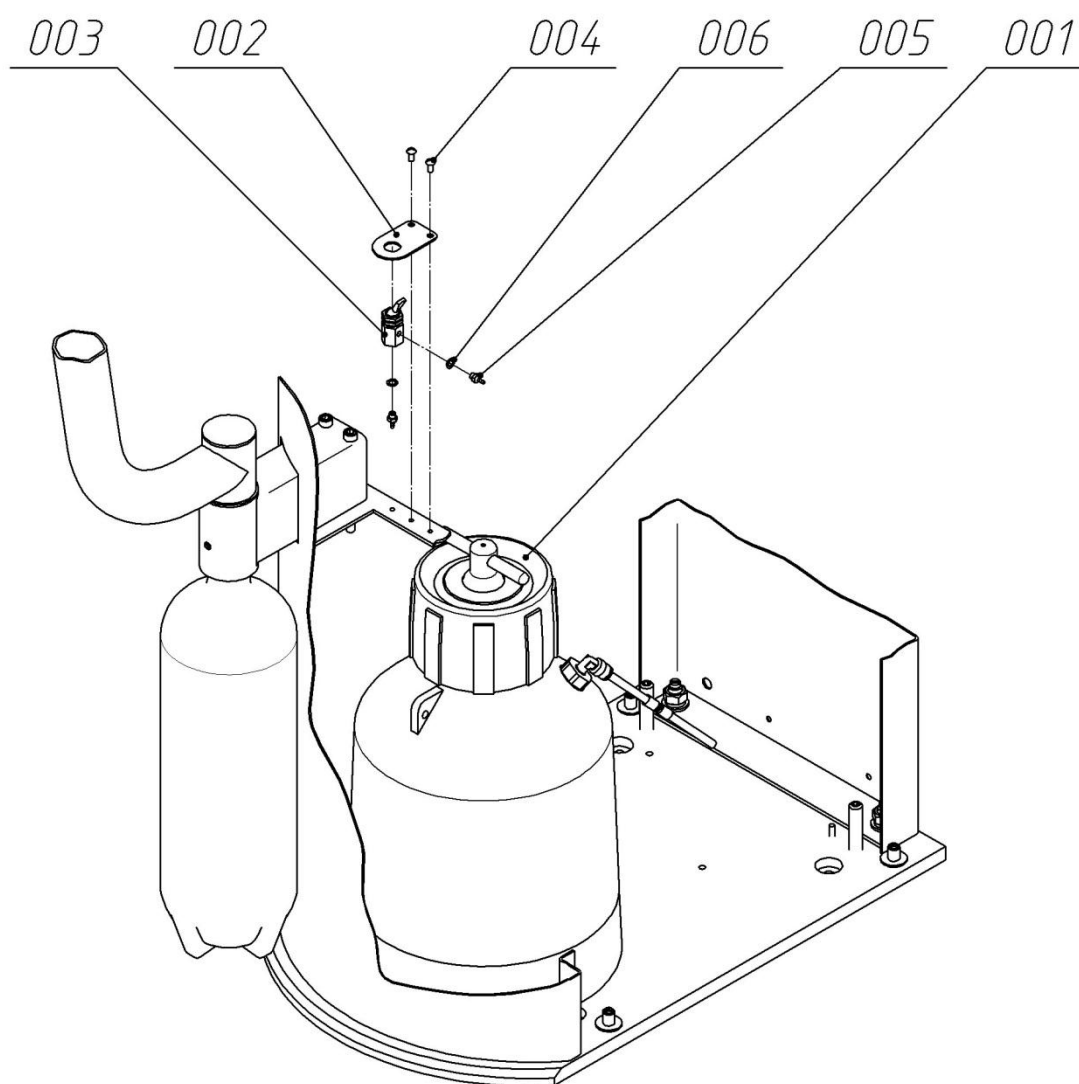


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine


TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.5

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.6		Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.6	001	Плювальниця	AEGA4.310.002	
8.6	002	Сепаратор	AEGA4.312.002	
8.6	003	Блок клапанів	AEGA5.885.004	
8.6	004	Фільтр	AEGA5.886.002	
8.6	005	Панель	AEGA6.122.022	
8.6	006	Плита нижня	AEGA6.126.011	
8.6	007	Стійка	AEGA6.150.006	
8.6	008	Каністра	203805	
8.6	009	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.6	010	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.6	011	Гвинт DIN 7985 M4X12	5M54012-2	
8.6	012	Гвинт DIN 965/963 M6X16	5M16016-2	
8.6	013	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.6	014	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.6	015	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.6	016	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.6	017	Хомут	16-25 ГОСТ 28191-89	
8.6	018	Хомут	20-32 ГОСТ 28191-89	
8.6	019	Хомут	25-40 ГОСТ 28191-89	
8.6	020	Кільце захисне	0700-700-01	
8.6	021	Перехідник	0700-700-21	
8.6	022	Патрубок	0700-720-18	
8.6	023	Шланг Ø17,5	9000-317-33	
8.6	024	Шланг Lignum Ø25		
8.6	025	Шланг Lignum Ø32		

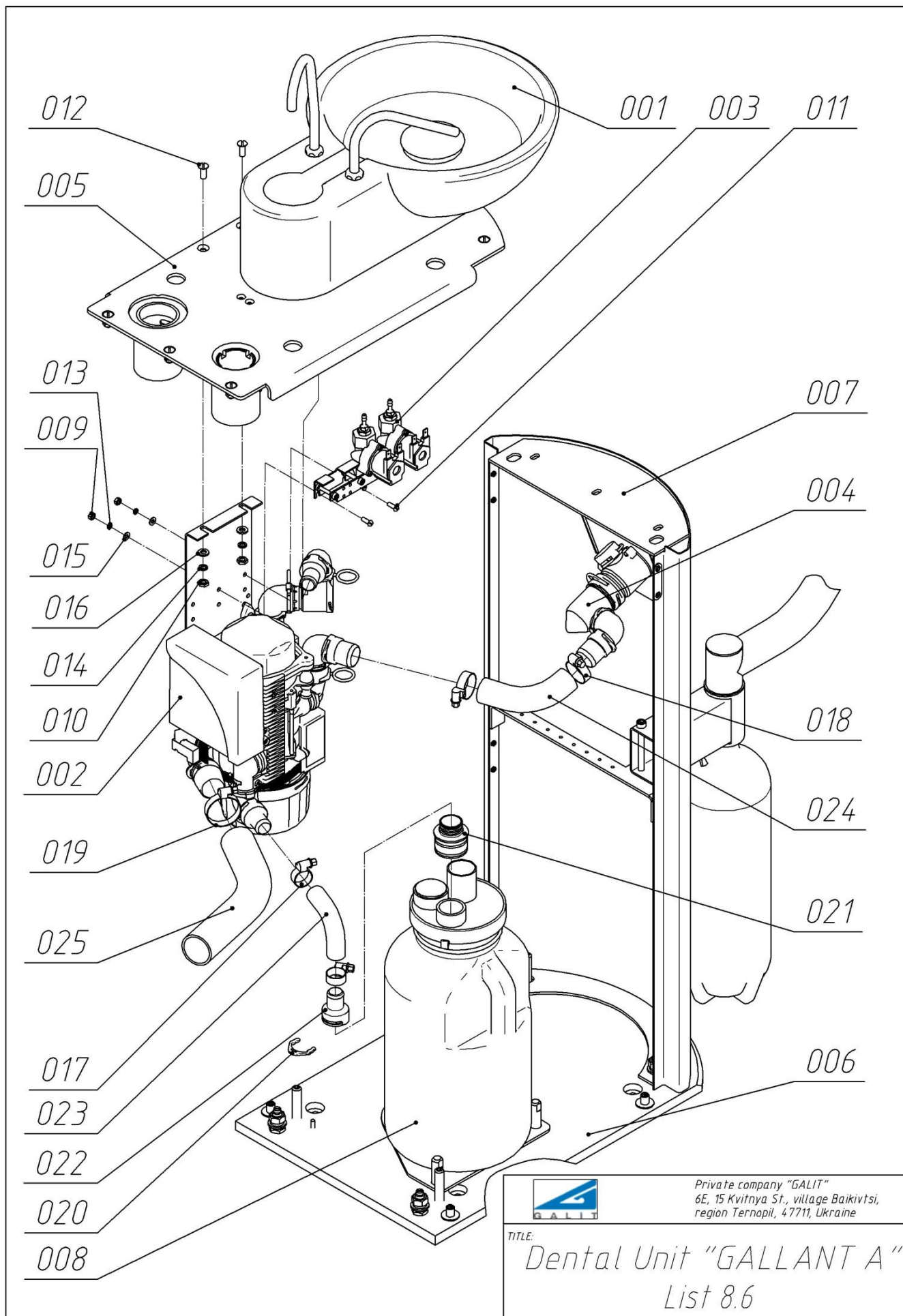

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.7		Гідроблок	AEGA3.030.004	
8.7	001	Охолоджувач	AEGA5.883.008	
8.7	002	Фільтр-регулятор	AEGA5.886.008	
8.7	003	Плита нижня	AEGA6.126.011	
8.7	004	Стійка	AEGA6.150.007	
8.7	005	Кронштейн	AEGA8.090.018	
8.7	006	Кронштейн	AEGA8.090.126	
8.7	007	Гвинт DIN 7985 M3X6	5M53006-2	
8.7	008	Гвинт DIN 7985 M4X8	5M54008-2	
8.7	009	Гвинт DIN 965/963 M4X10	5M14010-2	
8.7	010	Шланг	RILSAN TRN 8/6	
8.7	011	Шланг	1A-006-07	
8.7	012	Пляшка 0,33 л		

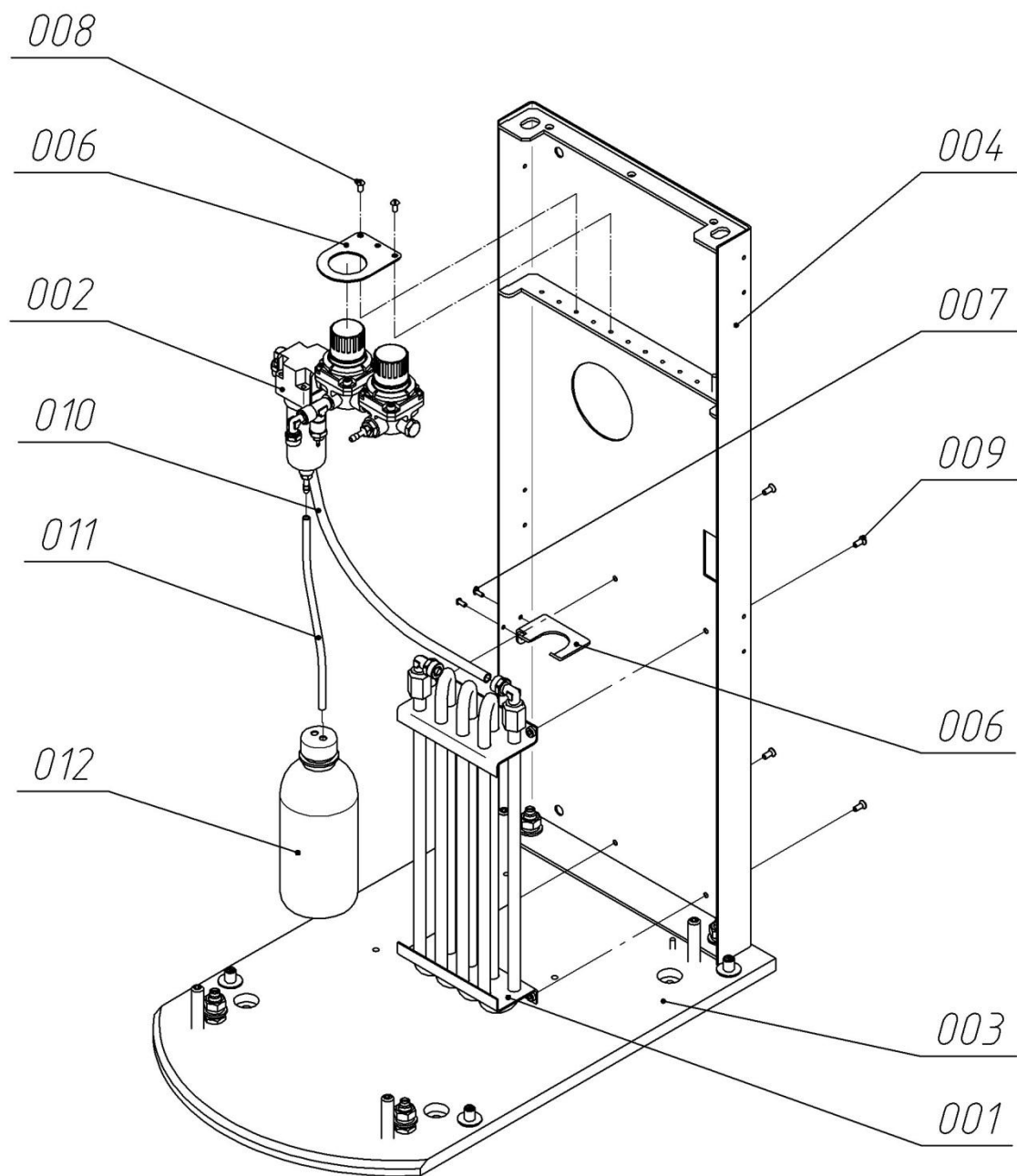


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.7

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.8		Гідроблок	АЕГА3.030.004	
8.8	001	Вузол нагрівання води	АЕГА5.863.002	
8.8	002	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.8	003	Гвинт DIN 7985 M4X12	5M54012-2	
8.8	004	Шайба DIN 125 4	7004-2	

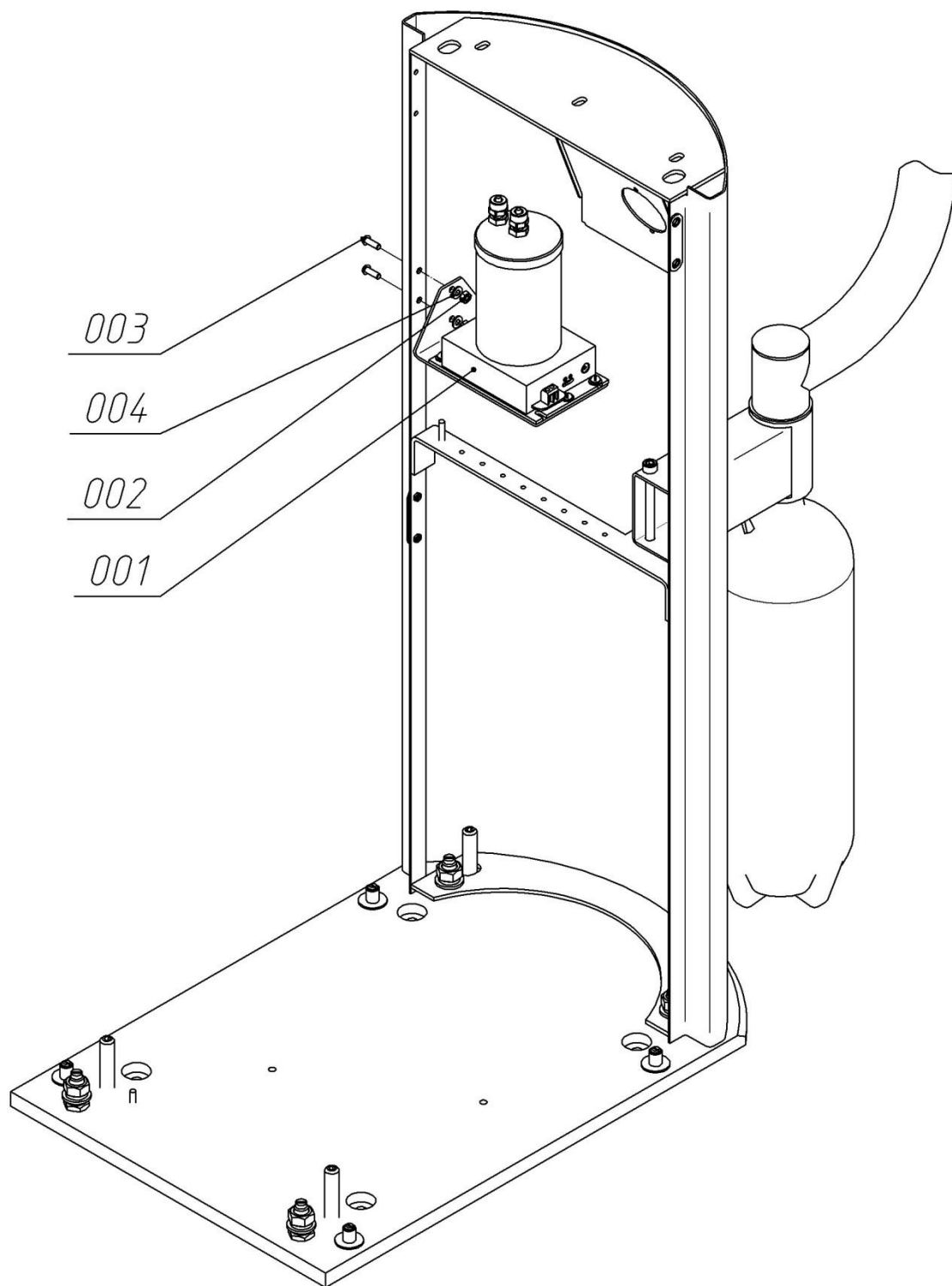


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.8

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.9		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.9	001	Панель	AEGA6.172.011	
8.9	002	Панель	AEGA6.172.012	
8.9	003	Панель	AEGA6.173.008	
8.9	004	Гвинт DIN 912 M5x30	5155030-2	
8.9	005	Заглушка для конфірмаців з шестигранним гніздом біла		

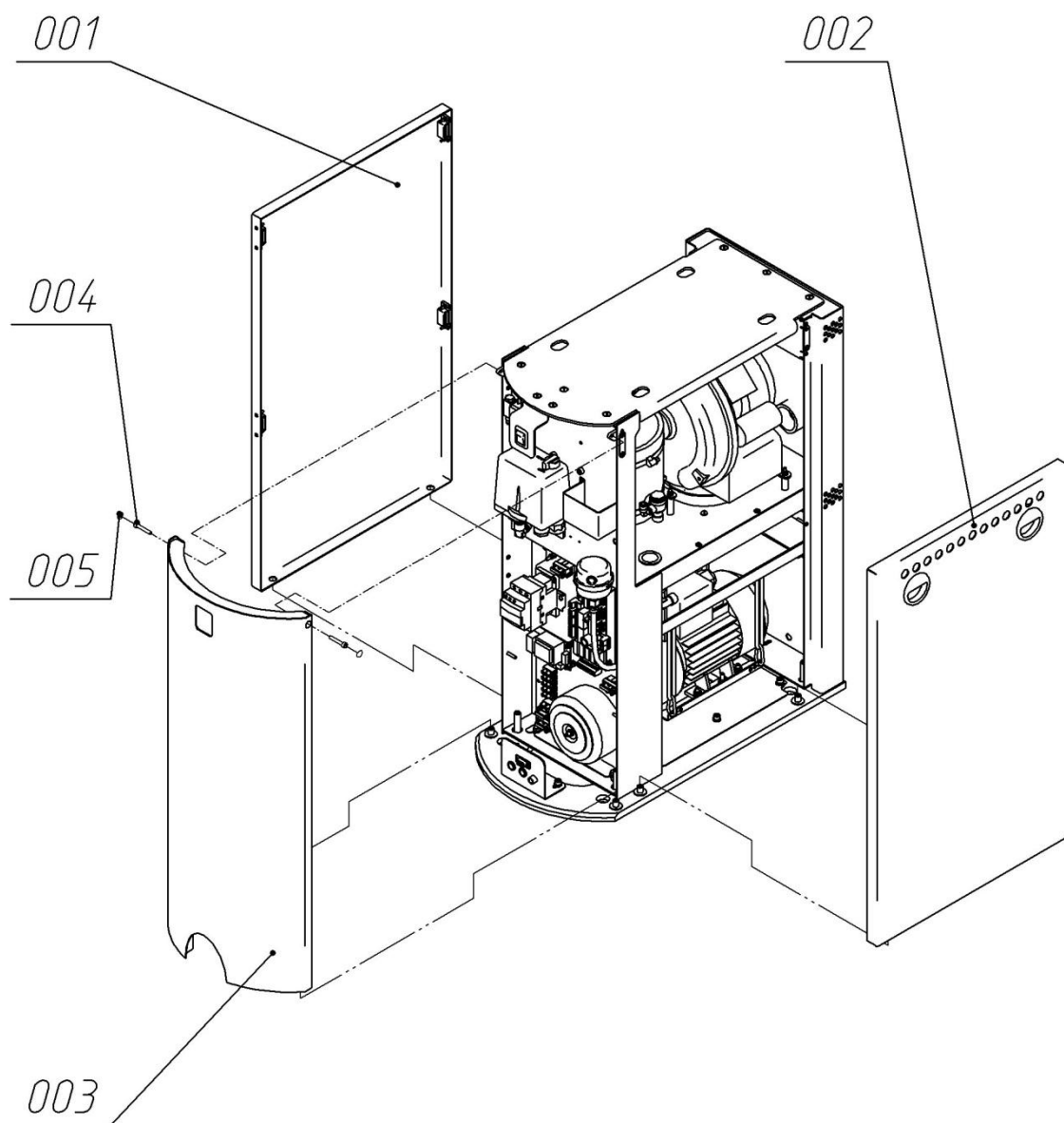


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.9

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.10		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.10	001	Стійка	AEGA6.150.008	
8.10	002	Стійка	AEGA6.150.009	
8.10	003	Бактеріальний фільтр	AEGA5.886.007	
8.10	004	Панель	AEGA6.122.023	
8.10	005	Кришка	AEGA6.173.010	
8.10	006	Кронштейн	AEGA8.090.071	
8.10	007	Планка	AEGA8.600.059	
8.10	008	Гайка DIN 934 M3	6003-2	
8.10	009	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.10	010	Гвинт DIN 7985 M3X10	5M53010-2	
8.10	011	Гвинт DIN 965/963 M3X6	5M13006-2	
8.10	012	Гвинт DIN 965/963 M6X16	5M16016-2	
8.10	013	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.10	014	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.10	015	Перемикач ВКЛ/ВИКЛ	AE-C1353 ABNAB	
8.10	016	Редукція ущільнююча	2R 5040	

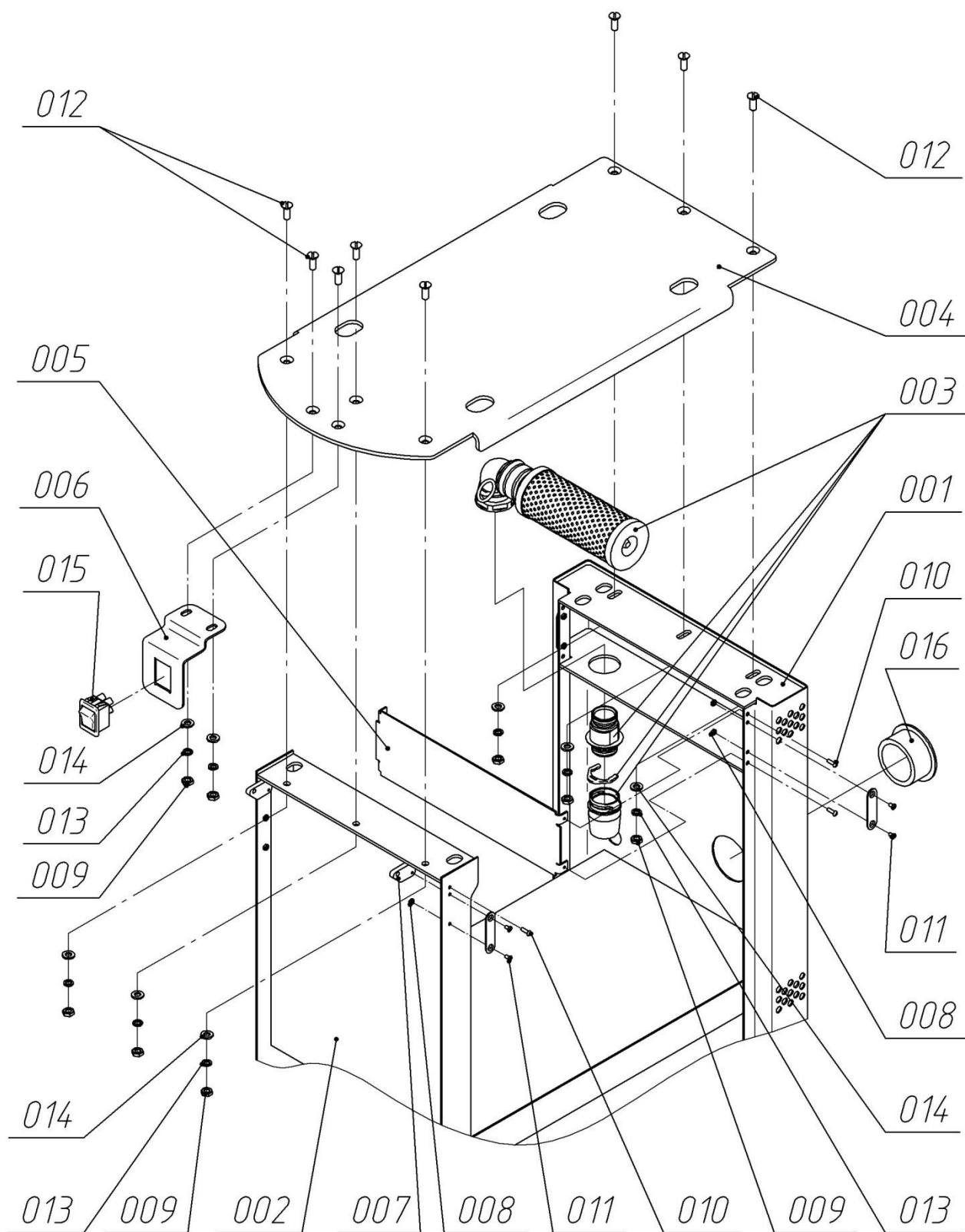


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.10

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.11		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.11	001	Стійка	AEGA6.150.008	
8.11	002	Стійка	AEGA6.150.009	
8.11	003	Плита нижня	AEGA6.126.012	
8.11	004	Шайба	AEGA7.854.001	
8.11	005	Трубка	AEGA7.867.001	
8.11	006	Кронштейн	AEGA8.090.072	
8.11	007	Стійка	AEGA8.120.007	
8.11	008	Втулка	AEGA8.220.019	
8.11	009	Втулка	AEGA8.227.001	
8.11	010	Пластина	AEGA8.610.053	
8.11	011	Шпилька	AEGA016.00.00.005	
8.11	012	Гайка DIN 934 M10	6010-2	
8.11	013	Гайка DIN 439B M10	6Z10-2	
8.11	014	Гвинт DIN 7985 M3X6	5M53006-2	
8.11	015	Гвинт DIN 912 M6x12	5156012-2	
8.11	016	Гвинт DIN 912 M6x16	5156016-2	
8.11	017	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.11	018	Шайба DIN 7980 10	7P10-2	
8.11	019	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.11	020	Шайба DIN 125 10	7O10-2	
8.11	021	Втулка	DFG7.860.004	
8.11	022	Захисний ковпачок	637.02.090	
8.11	023	Опора-гвинт	637.03.009	
8.11	024	Штекер	DB-9M	

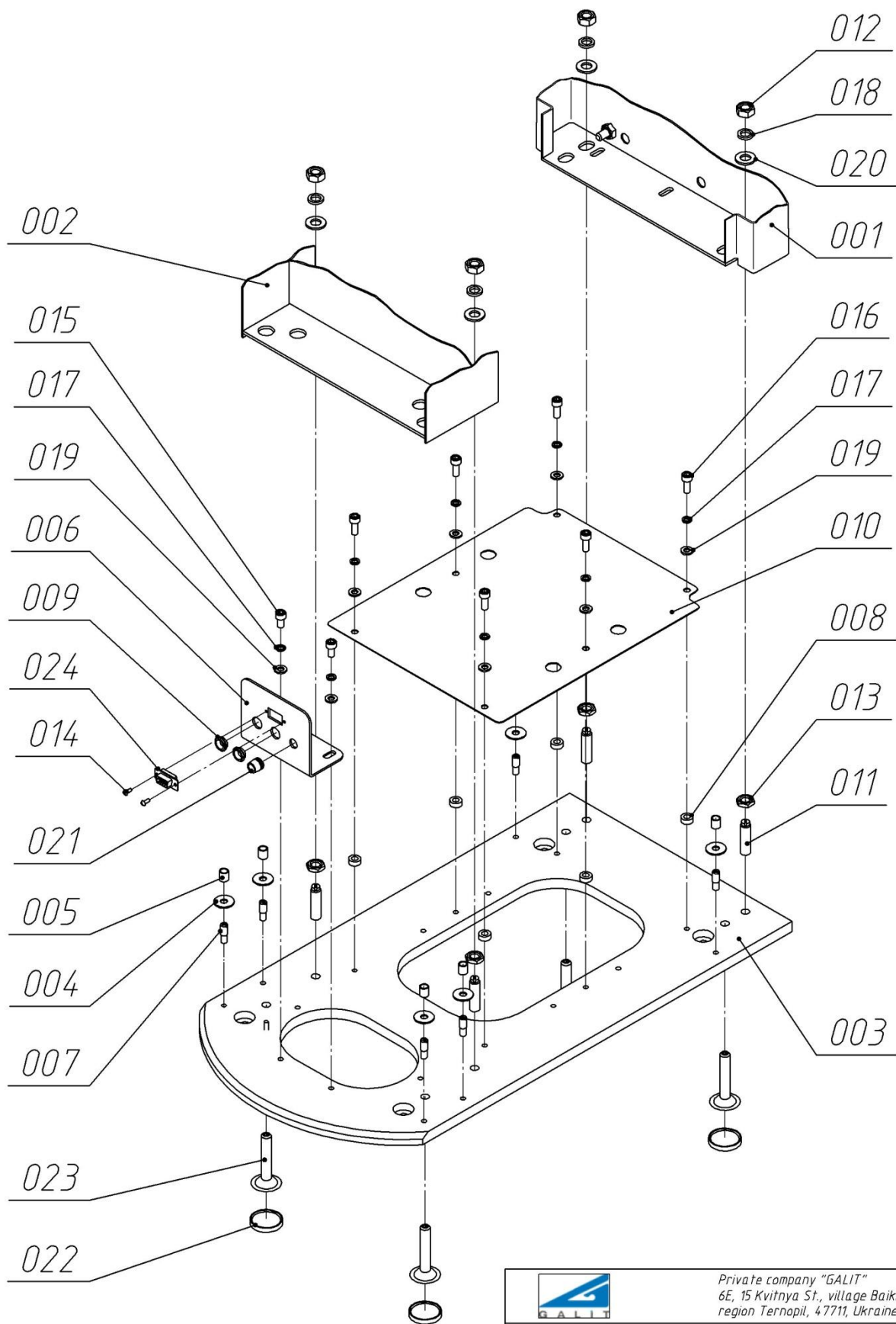


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine


TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.11

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.12		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.12	001	Витяжний агрегат	AEGA4.311.002	
8.12	002	Стійка	AEGA6.150.008	
8.12	003	Стійка	AEGA6.150.009	
8.12	004	Панель	AEGA6.172.010	
8.12	005	Панель	AEGA6.173.011	
8.12	006	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.12	007	Гайка DIN 934 M5	6005-2	
8.12	008	Гвинт DIN 7985 M4X10	5M54010-2	
8.12	009	Гвинт DIN 7985 M5X20	5M55020-2	
8.12	010	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.12	011	Шайба DIN 7980 5	7P05-2	
8.12	012	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.12	013	Шайба DIN 125 5	7O05-2	
8.12	014	Вентилятор	Mezaxial 3140	
8.12	015	Втулка	DFG7.860.004	
8.12	016	Редукція ущільнююча	2R 3225	

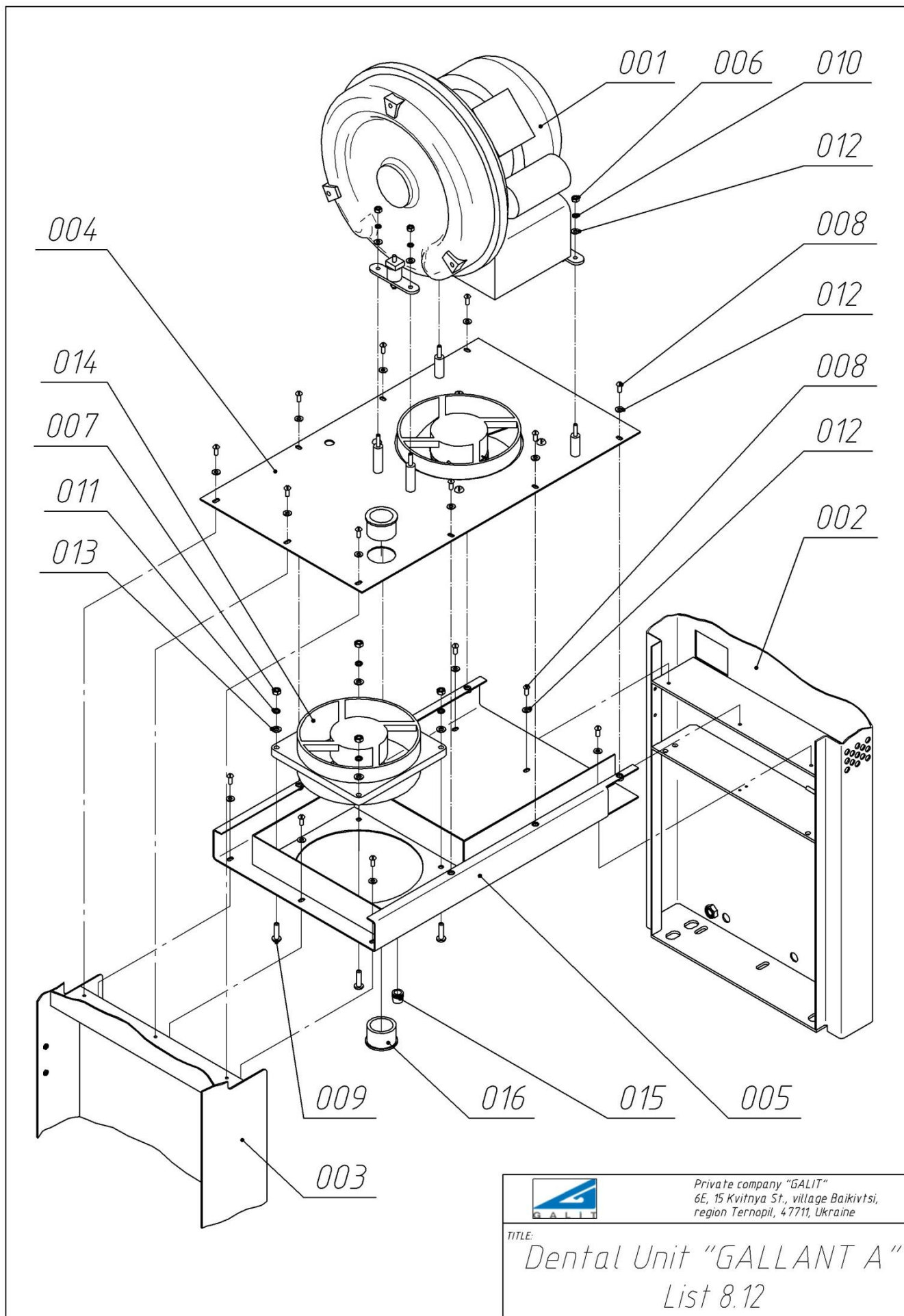

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.13		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.13	001	Блок живлення	AEGA5.087.002	
8.13	002	Реле тиску	AEGA5.885.005	
8.13	003	Електромагнітний клапан	AEGA5.885.006	
8.13	004	Плита нижня	AEGA6.126.012	
8.13	005	Стійка	AEGA6.150.009	
8.13	006	Кронштейн	AEGA8.090.073	
8.13	007	Кронштейн	AEGA8.090.074	
8.13	008	Фітинг	1463 8/6-1/4	
8.13	009	Фітинг	6522 8-1/4	
8.13	010	Фітинг	2520 1/4-1/4	
8.13	011	Фільтр повітряний	0880-001-00	
8.13	012	Втулка	DFG7.860.004	
8.13	013	Редукція ущільнююча	2R 3225	
8.13	014	Болт DIN 931 M6X12	5M66012-2	
8.13	015	Болт DIN 931 M6X20	5M66020-2	
8.13	016	Гвинт DIN 7985 M3X6	5M53006-2	
8.13	017	Гвинт DIN 7985 M4X10	5M54010-2	
8.13	018	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.13	019	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.13	020	Шланг	RILSAN TRN 6/4	
8.13	021	Шланг	RILSAN TRN 8/6	

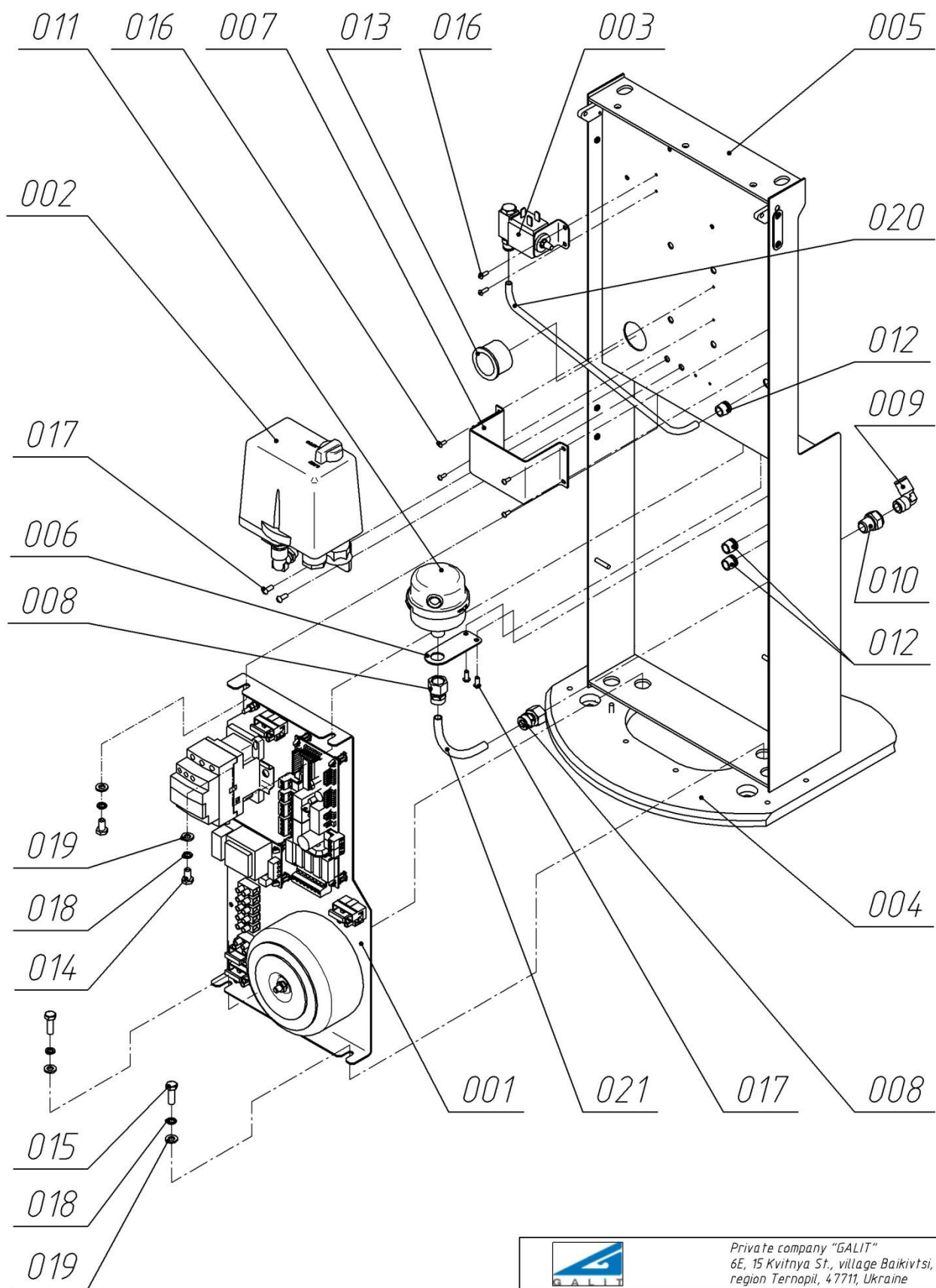


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.13

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.14		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.14	001	Ресивер	AEGA5.883.007	
8.14	002	Стійка	AEGA6.150.009	
8.14	003	Кронштейн	AEGA8.090.066	
8.14	004	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.14	005	Гвинт DIN 912 M6x16	5156016-2	
8.14	006	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.14	007	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.14	008	Шланг	RILSAN TRN 8/6	
8.14	009	Шланг	RILSAN TRN 8/6	
8.14	010	Шланг	D8x400 G3/8	

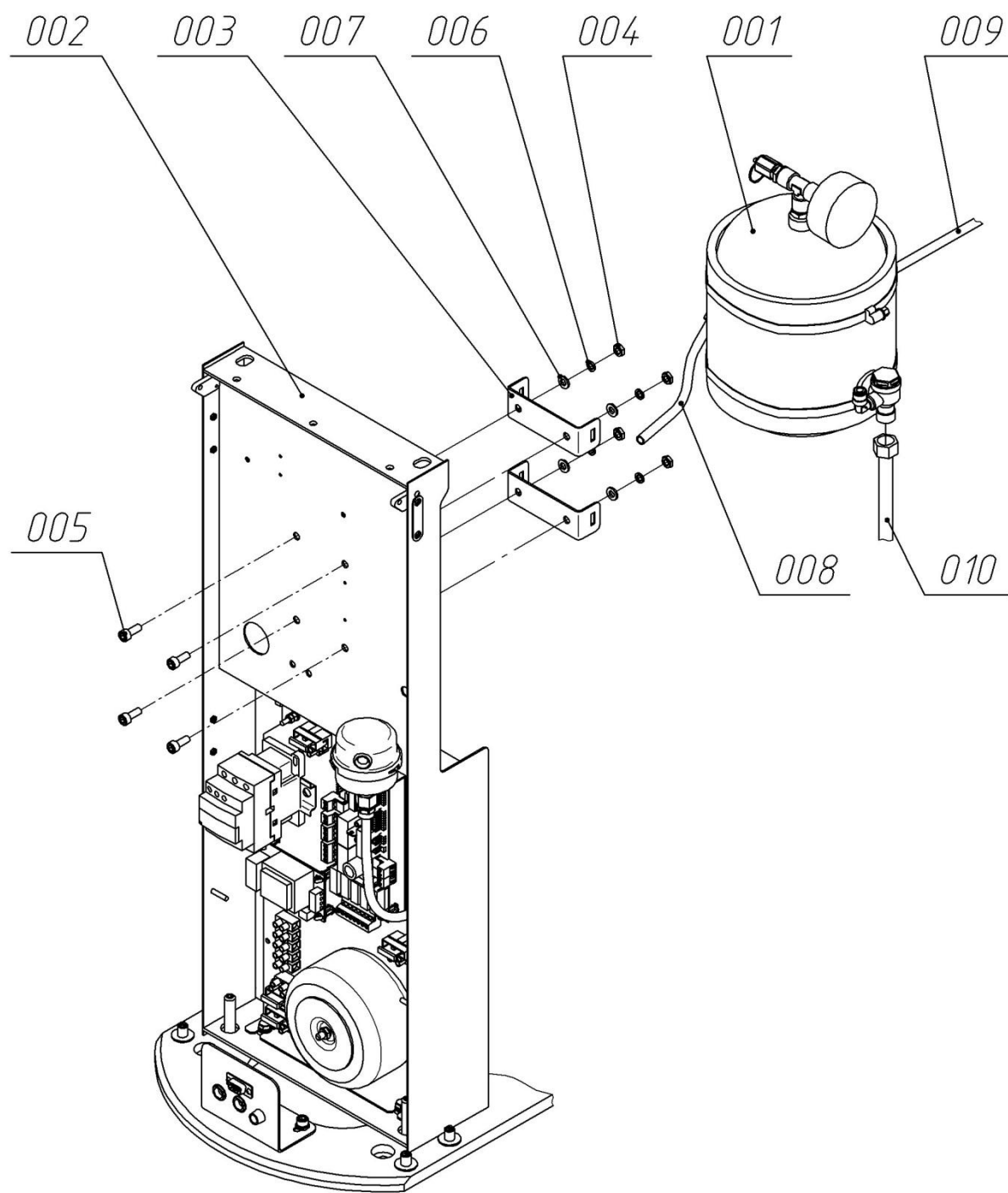


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.14

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.15		Гідроблок	AEGA3.030.005	
8.15	001	Компресор	AEGA2.963.026	
8.15	002	Стійка	AEGA6.150.008	
8.15	003	Стійка	AEGA6.150.009	
8.15	004	Планка	AEGA7.840.007	
8.15	005	Кутник	AEGA8.110.006	
8.15	006	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.15	007	Гайка DIN 934 M5	6005-2	
8.15	008	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.15	009	Гвинт DIN 912 M5x16	5155016-2	
8.15	010	Гвинт DIN 912 M6x16	5156016-2	
8.15	011	Шайба DIN 7980 5	7P05-2	
8.15	012	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.15	013	Шайба DIN 125 5	7O05-2	
8.15	014	Фітинг	6522 8-1/4	
8.15	015	Фітинг	2520 1/4-1/4	
8.15	016	Тепловий вмикач	033510004	
8.15	017	Шланг	D8x400 G3/8	
8.15	018	Шланг	RILSAN TRN 8/6	

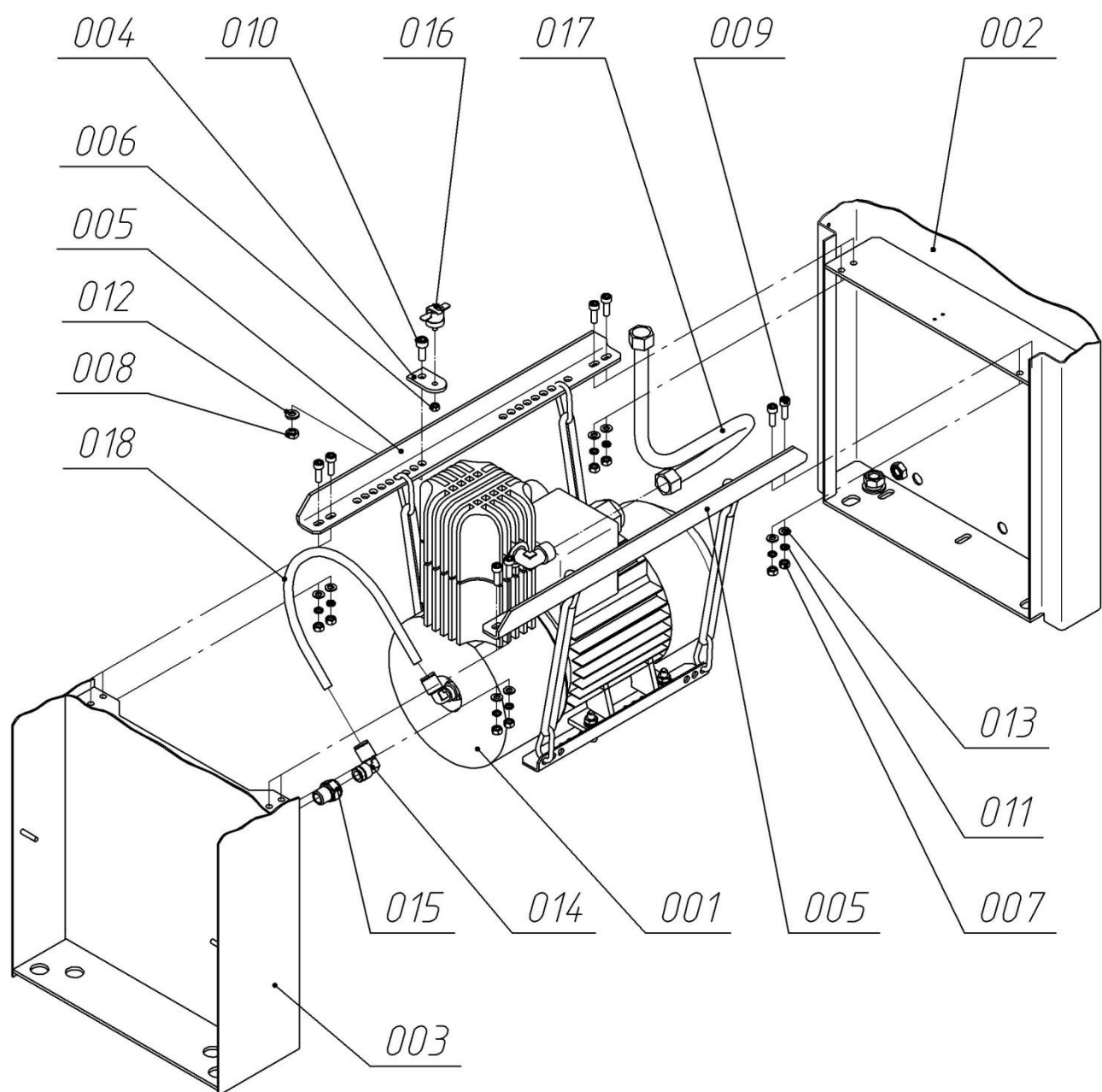


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.15

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.16		Плита	АЕГА6.126.006	
8.16	001	Плита	АЕГА8.076.026	
8.16	002	Шайба	АЕГА8.677.002	
8.16	003	Болт DIN 603 M8X40	5V28040-2	
8.16	004	Гайка DIN 934 M8	6008-2	
8.16	005	Гвинт DIN 965/963 M6X12	5M16012-2	
8.16	006	Шайба DIN 7980 8	7P08-2	
8.16	007	Шайба DIN 125 8	7O08-2	

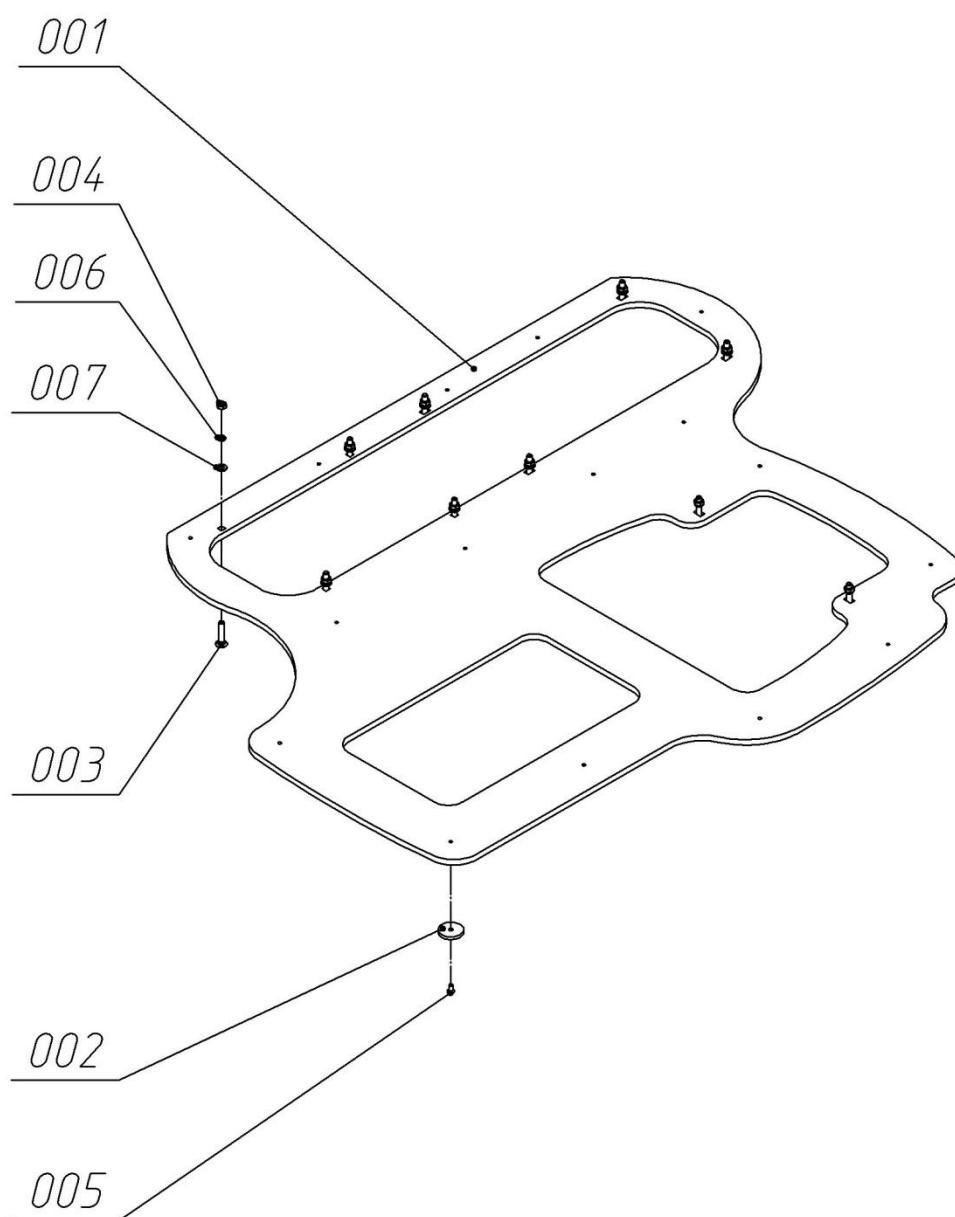


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.16

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.17		Плита	АЕГА6.126.007	
8.17	001	Плита	АЕГА8.076.027	
8.17	002	Шайба	АЕГА8.677.002	
8.17	003	Болт DIN 603 M8X40	5V28040-2	
8.17	004	Гайка DIN 934 M8	6008-2	
8.17	005	Гвинт DIN 965/963 M6X12	5M16012-2	
8.17	006	Шайба DIN 7980 8	7P08-2	
8.17	007	Шайба DIN 125 8	7O08-2	

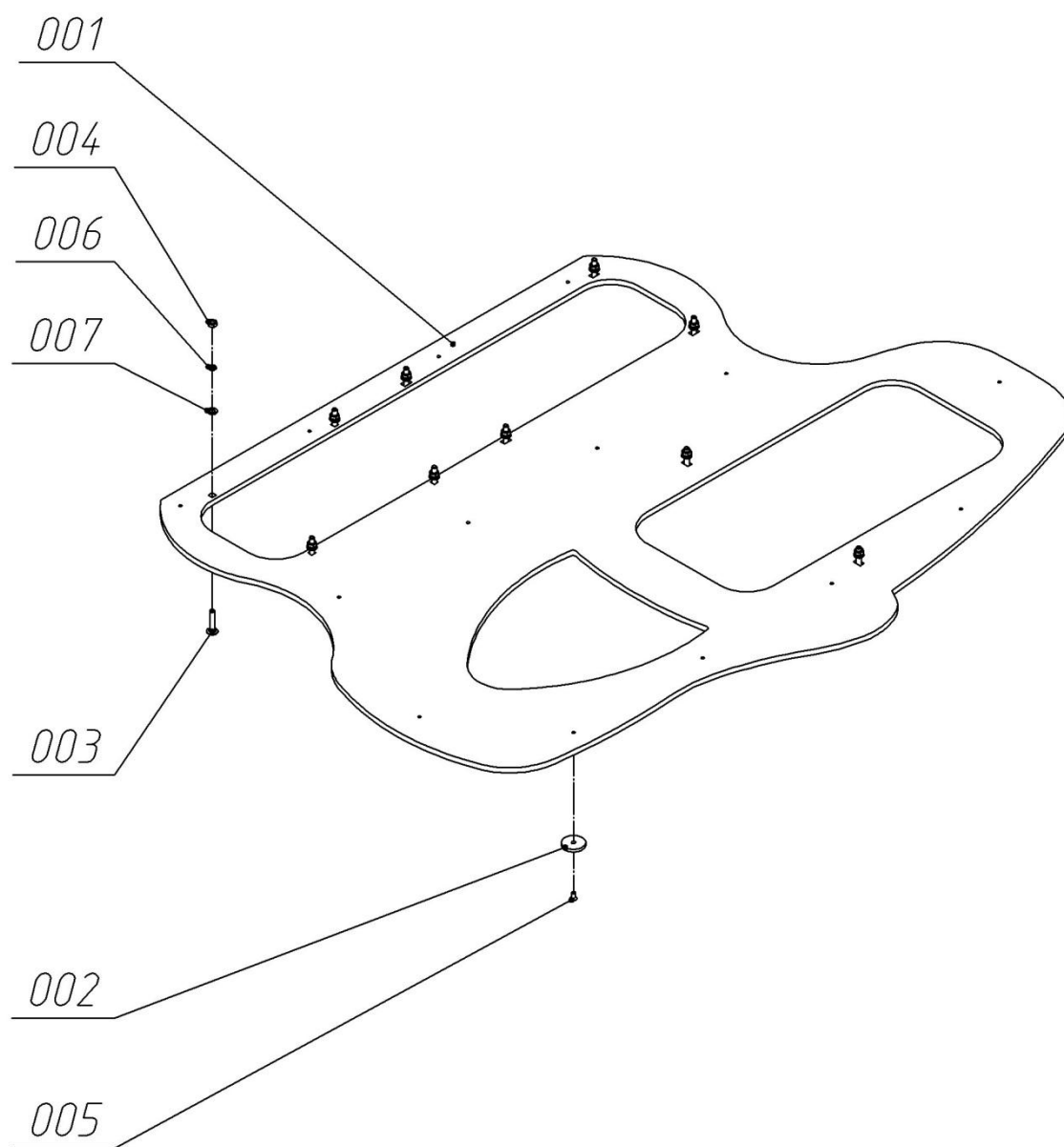


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.17

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.18		Компресор	AEGA2.963.026	
8.18	001	Кутник	AEGA8.110.003	
8.18	002	Болт DIN 931 M6X12	5M66012-2	
8.18	003	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.18	004	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.18	005	Шайба DIN 125 6	7O06-2	
8.18	006	Агрегат компресора DK 50 DS		
8.18	007	Фітинг	2520 1/4-1/4	
8.18	008	Фітинг	6522 8-1/4	
8.18	009	Вішак	604011294	
8.18	010	Фітинг	2010 3/8	

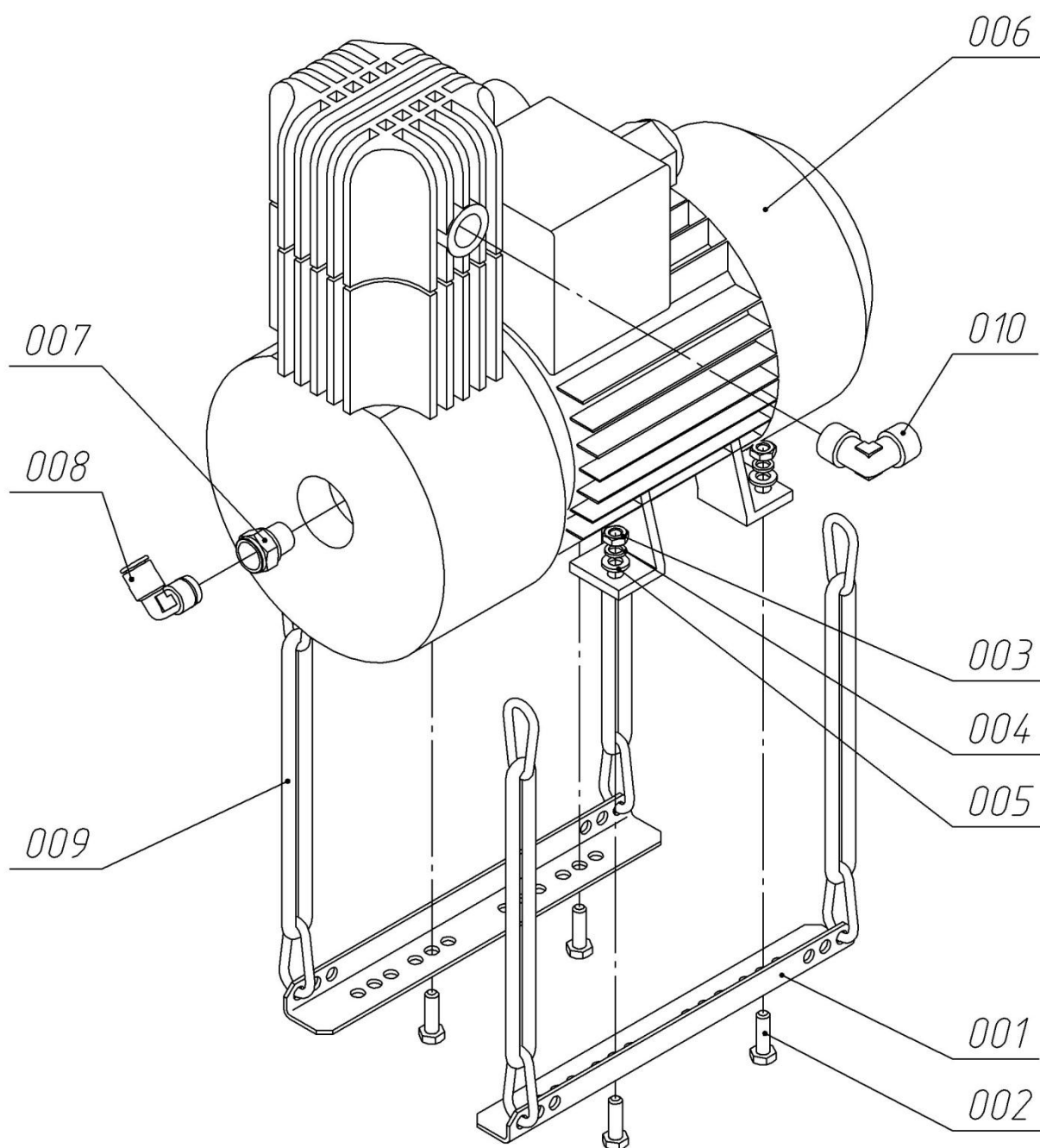


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.18

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.19		Система чистої води	AEGA4.300.002	
8.19	001	Фільтр СЧВ	AEGA5.886.010	
8.19	002	Кронштейн	AEGA6.133.050	
8.19	003	Корок	AEGA9.313.001	
8.19	004	Кільце	AEGA116.00.00.097	
8.19	005	Гвинт DIN 913 M6X6	986006-P	
8.19	006	Гвинт DIN 912 M5x12	5155012-2	
8.19	007	Шайба DIN 7980 5	7P05-2	
8.19	008	Шайба DIN 125 5	7O05-2	
8.19	009	Пляшка 2 л.	ACF-543-002	
8.19	010	Муфта	FIF-605-0	
8.19	011	Шайба	FIF-607-01	
8.19	012	Фітинг	2601 2-M5	
8.19	013	Фітинг	2601 4,5-M5	

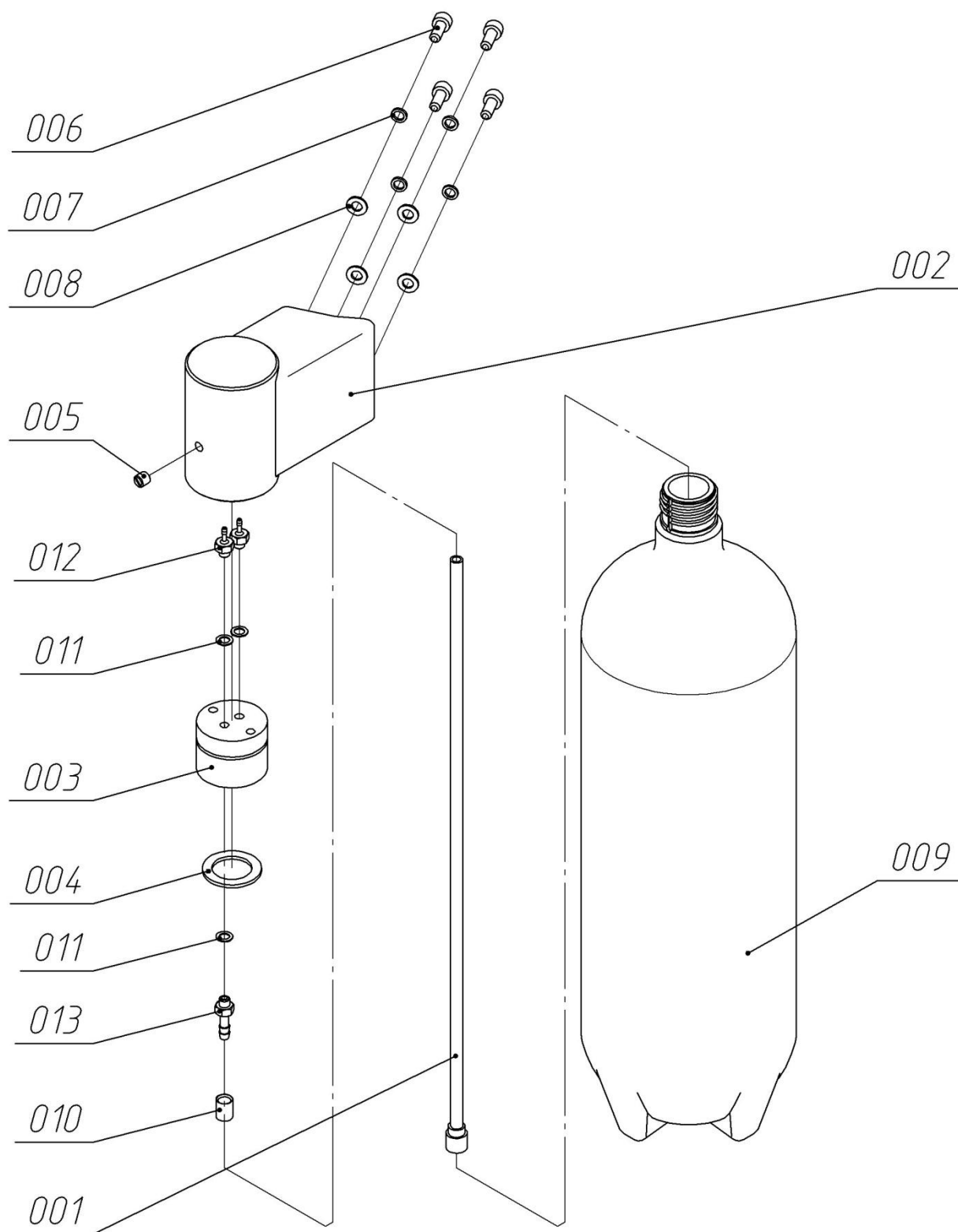


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine


TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.19

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.20		Вузол плювальниці	AEGA4.310.008	
8.20	001	Стакан	AEGA6.210.002	
8.20	002	Регулятор	AEGA020.00.00.000	
8.20	003	Кулачок	AEGA8.360.001	
8.20	004	Штуцер	AEGA016.09.00.002	
8.20	005	Трубка	AEGA116.74.01.001	
8.20	006	Тримач	AEGA116.74.01.002	
8.20	007	Затискач	AEGA116.74.01.003	
8.20	008	Гайка	AEGA116.74.01.004	
8.20	009	Кільце	AEGA116.74.01.005	
8.20	010	Трубка	AEGA116.74.02.001	
8.20	011	Плювальниця	AEGA716.00.00.001	
8.20	012	Горловина	AEGA716.05.00.003	
8.20	013	Гайка	AEGA716.05.00.004	
8.20	014	Кришка плювальниці	GAL268.09.00.000	
8.20	015	Притискач	GAL268.00.00.001	
8.20	016	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.20	017	Гвинт DIN 913 M4X6	984006-P	
8.20	018	Гвинт DIN 912 M8x20	5158020-2	
8.20	019	Гвинт DIN 965/963 M3X8	5M13008-2	
8.20	020	Гвинт DIN 965/963 M6X16	5M16016-2	
8.20	021	Шайба DIN 7980 8	7P08-2	
8.20	022	Шайба DIN 125 8	7O08-2	
8.20	023	Хомут	16-25 ГОСТ 28191-89	
8.20	024	Кільце	010-014-25 ГОСТ 9833-74	
8.20	025	Втулка	DU5025	
8.20	026	Шайба	WC52	
8.20	027	Муфта1	FIF 605-02	
8.20	028	Шланг Ø17,5	9000-317-33	
8.20	029	Шланг Ø4	1A-006-07	
8.20	030	Сіточка плювальниці з сірою кришечкою	VCF-353-02	

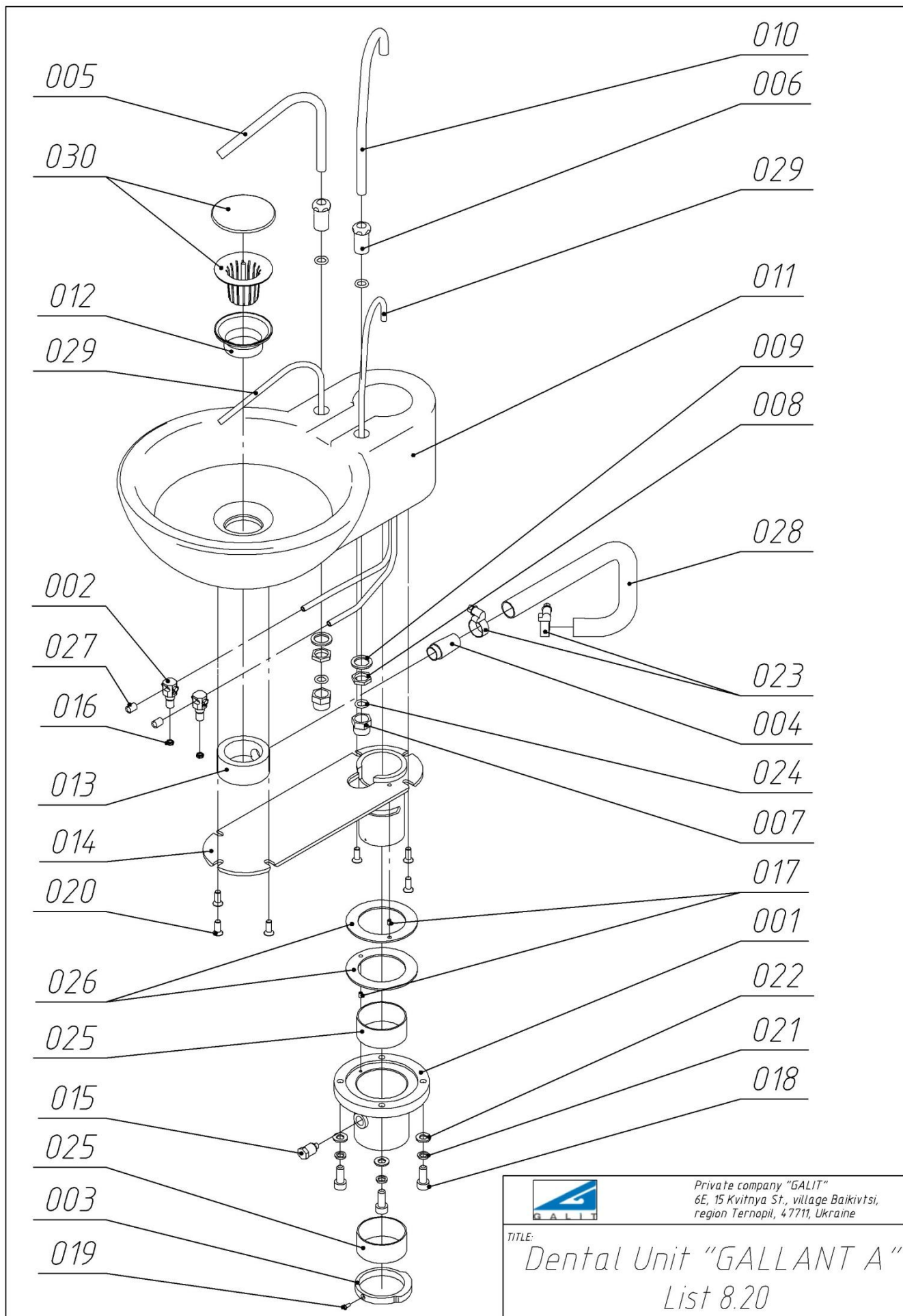

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.21		Витяжний агрегат	АЕГА4.311.002	
8.21	001	Планка	АЕГА8.600.052	
8.21	002	Планка	АЕГА8.600.053	
8.21	003	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.21	004	Витяжний агрегат	V250	
8.21	005	Коліно	710500	
8.21	006	Сілентблок М4	074000035	

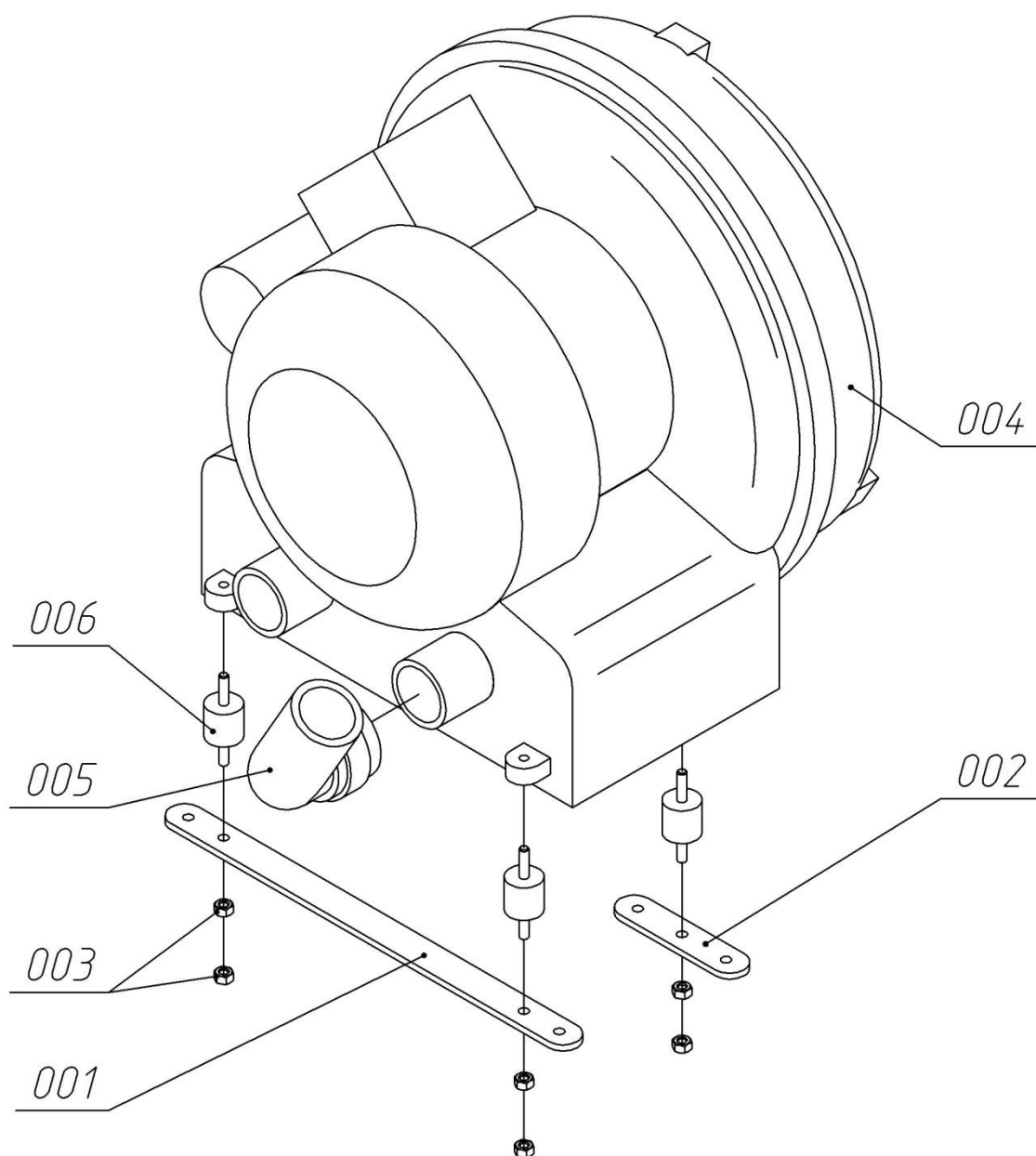


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine


TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.21

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.22		Сепаратор	AEGA4.312.002	
8.22	001	Кронштейн	AEGA8.090.077	
8.22	002	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.22	003	Гвинт DIN 912 M4x20	5154020-2	
8.22	004	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.22	005	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.22	006	Сепаратор CAS1	7117-23	
8.22	007	Кільце захисне	0700-700-01	
8.22	008	Коліно	0700-700-04	
8.22	009	Патрубок	0700-700-11	
8.22	010	Фільтр грубої очистки	0700-702-52	
8.22	011	Кільце захисне	0700-700-32	
8.22	012	Патрубок	0700-720-18	
8.22	013	Патрубок	0700-720-25	
8.22	014	Патрубок	0700-720-30	

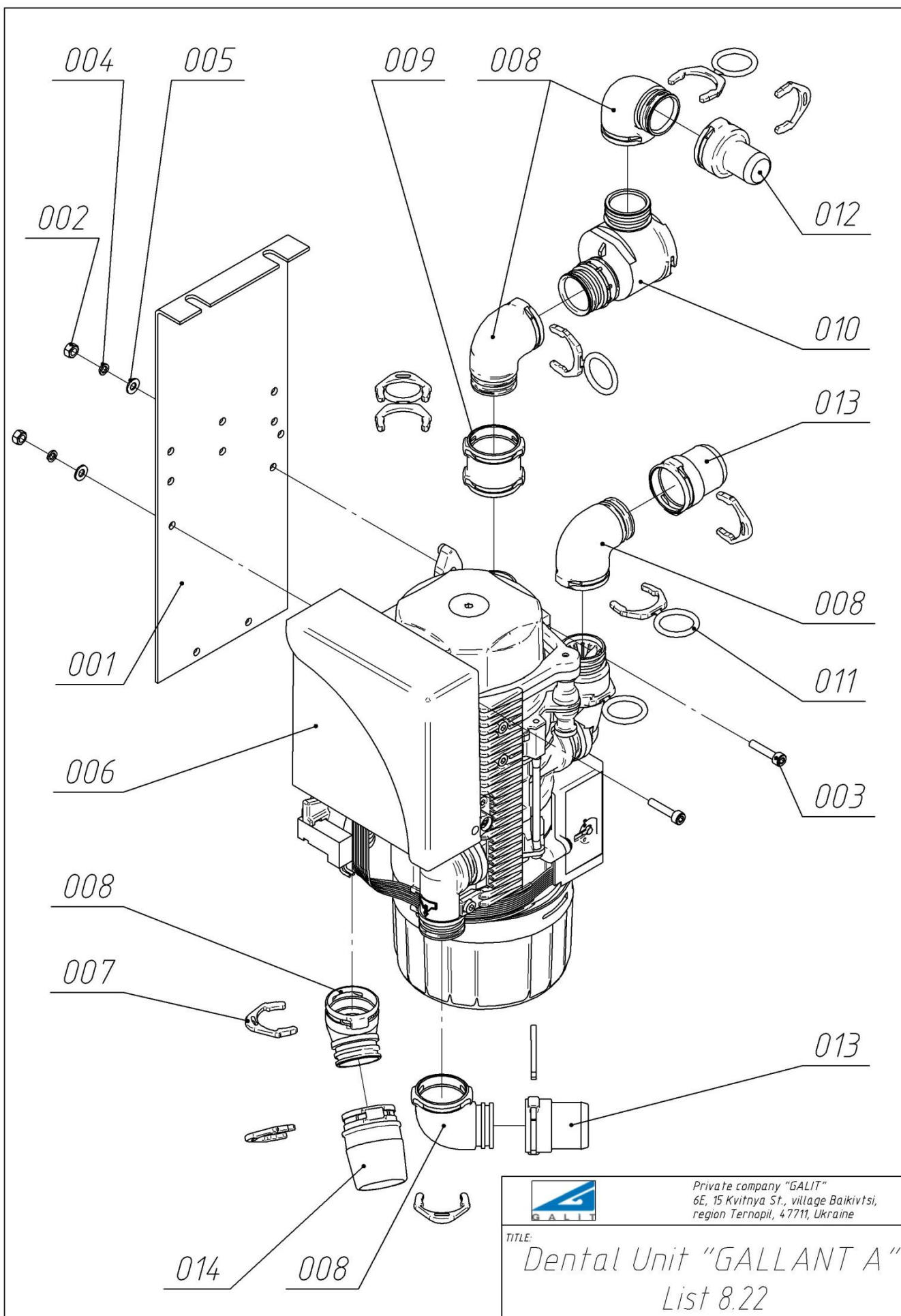

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.23		Блок живлення	AEGA5.087.002	
8.23	001	Кронштейн	AEGA6.133.026	
8.23	002	Плата керування витяжним агрегатом	AEGA003.00.10.001	
8.23	003	Контролер гідроблоку	AEGA116.95.01.000	
8.23	004	Кронштейн	AEGA8.090.020	
8.23	005	Шайба	AEGA016.00.00.030	
8.23	006	Прокладка	AEGA116.95.00.002	
8.23	007	Болт DIN 931 M6X80	5M66080-2	
8.23	008	Гайка мідна DIN 934 M4		
8.23	009	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.23	010	Гайка DIN 934 M6	6006-2	
8.23	011	Гвинт DIN 7985 M3x16	5M53016-2	
8.23	012	Гвинт DIN 7985 M4x12	5M54012-2	
8.23	013	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.23	014	Шайба DIN 7980 6	7P06-2	
8.23	015	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.23	016	Трансформатор	ТТ 06985	
8.23	017	Стійка міжплатна	CS-0813	
8.23	018	Колодка клемна	TLF-100-2P	
8.23	019	Запобіжник	5x20 250В 4А	
8.23	020	Пускач електромагнітний	BF09 10 A220	
8.23	021	Колодка клемна	H-6MM2 PP	

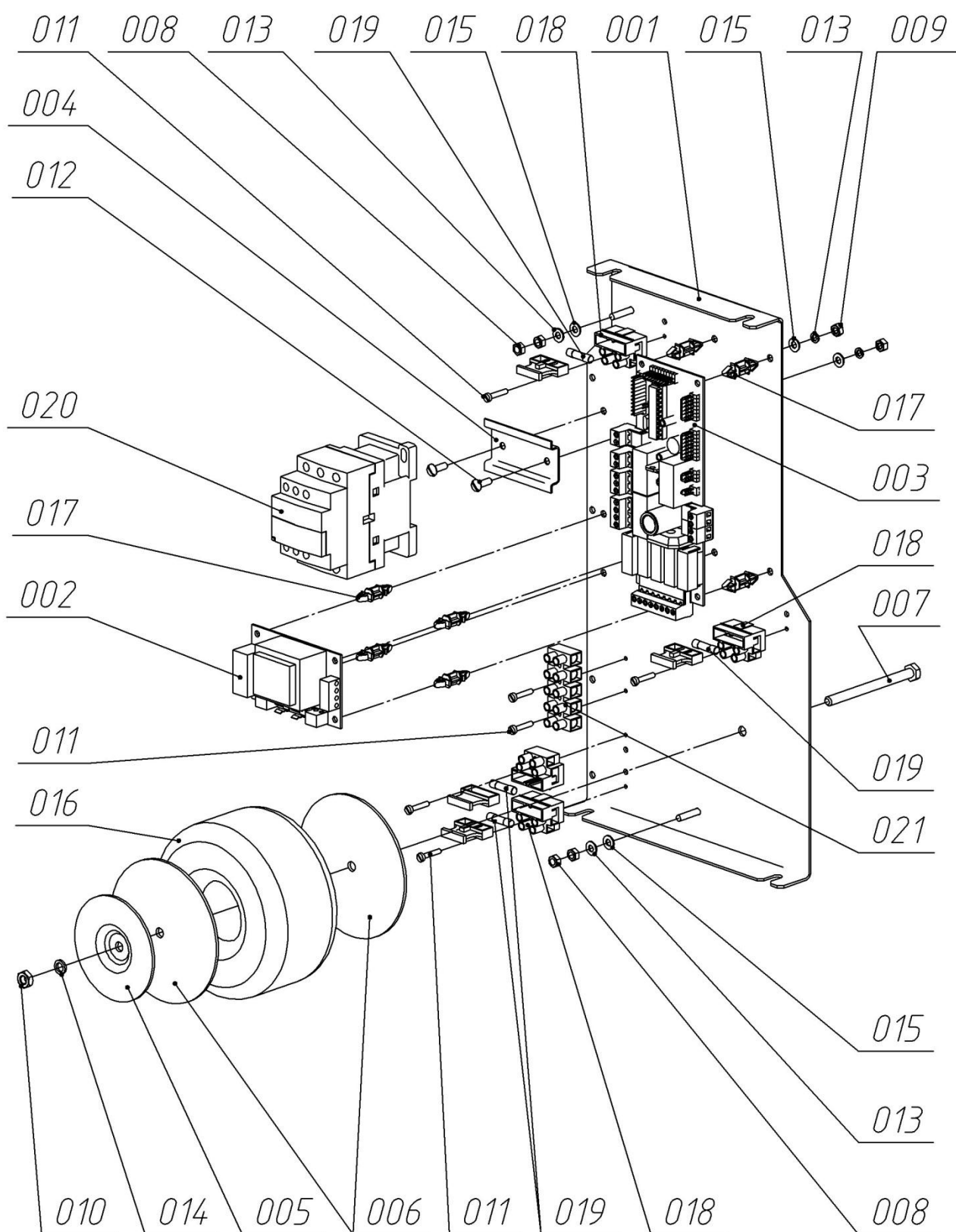


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.23

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.24		Вузол нагрівання води	АЕГА5.863.002	
8.24	001	Кронштейн	АЕГА8.090.092	
8.24	002	Гвинт DIN 7985 M4x8	5M54008-2	
8.24	003	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.24	004	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.24	005	Нагрівач води	45315	
8.24	006	Фітинг	1510 6/4-1/8	

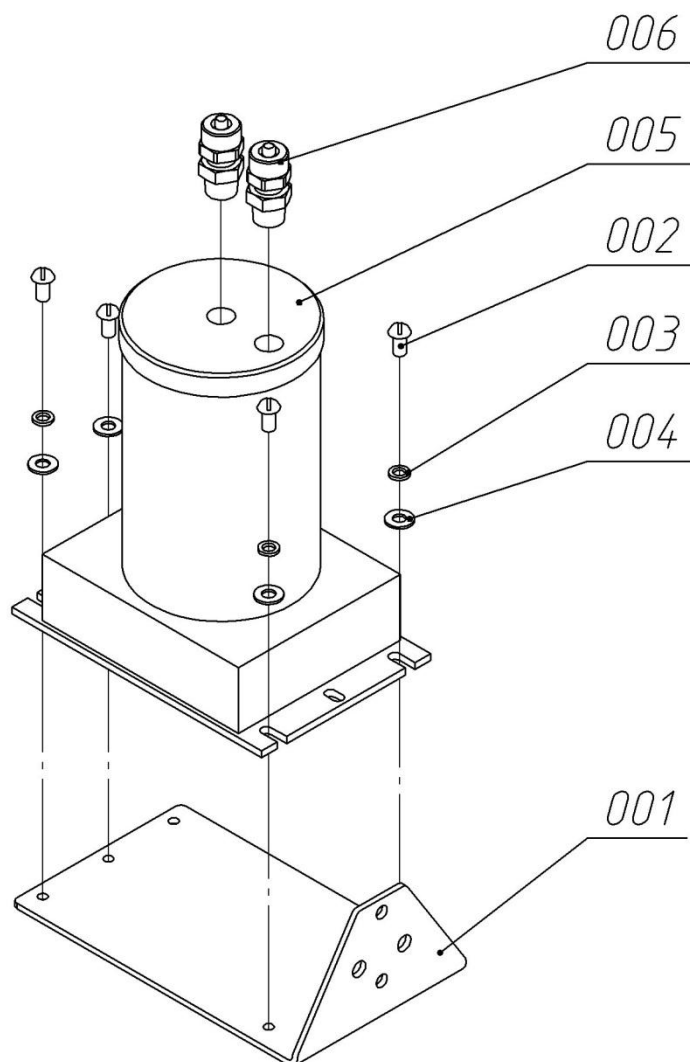


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.24

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.25		Ресивер	АЕГА5.883.007	
8.25	001	Пластина	АЕГА9.322.017	
8.25	002	Хомут	150-170 GOST 28191-89	
8.25	003	Ресивер	6102005	
8.25	004	Клапан обернений	5150-40-02	
8.25	005	Клапан аварійний	112/1 TA8PED 1/4 8bar	
8.25	006	Фітинг	1500 8/6-3/8	
8.25	007	Фітинг	2003 1/4	
8.25	008	Фітинг	2510 1/4-3/8	
8.25	009	Фітинг	6522 6-1/8	
8.25	010	Манометр	M063-P12	

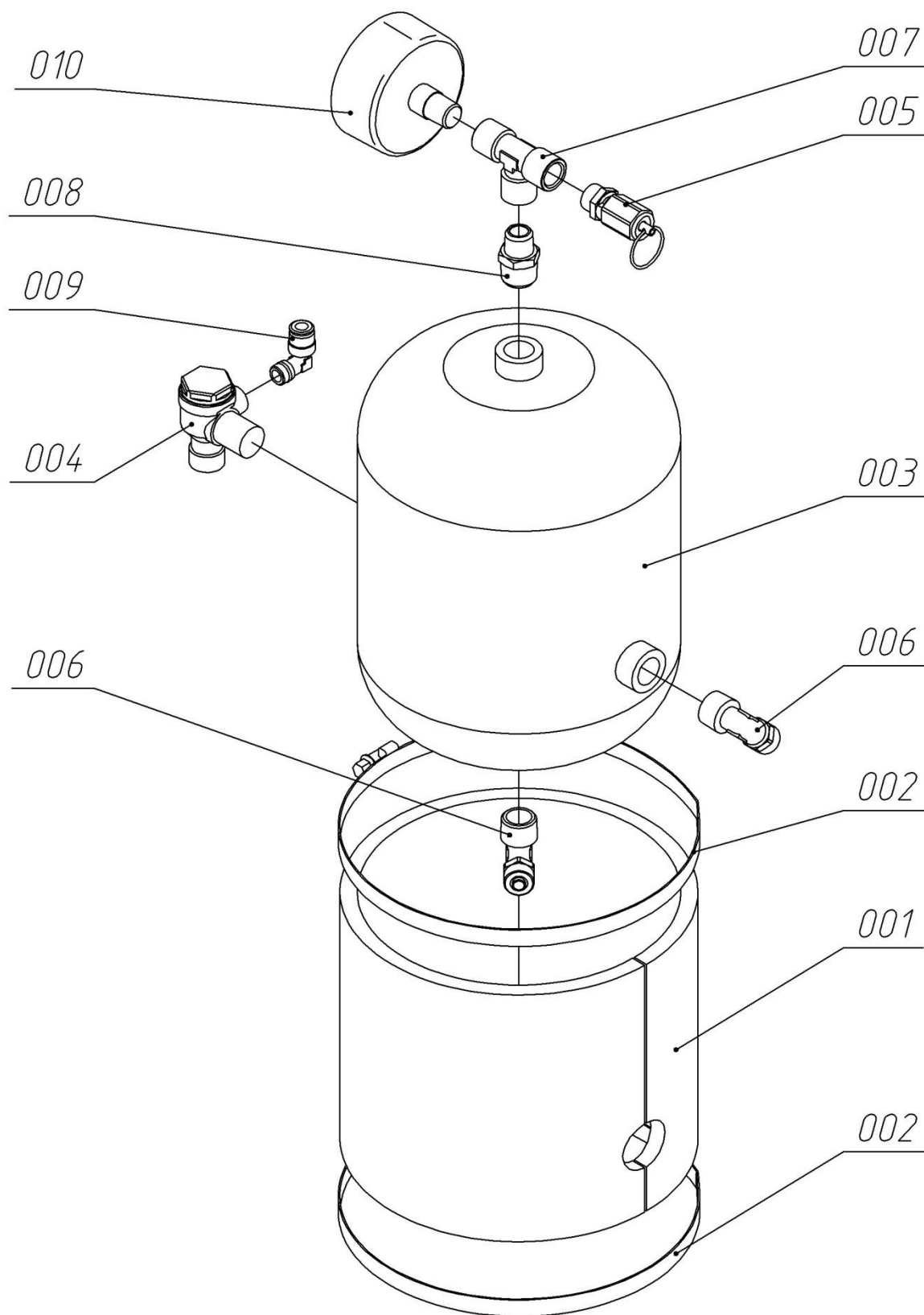


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.25

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.26		Охолоджувач	AEGA5.883.008	
8.26	001	Втулка	BA8.226.316-17	
8.26	002	Охолоджувач	604021250	
8.26	003	Фітинг	1500 8/6-1/4	

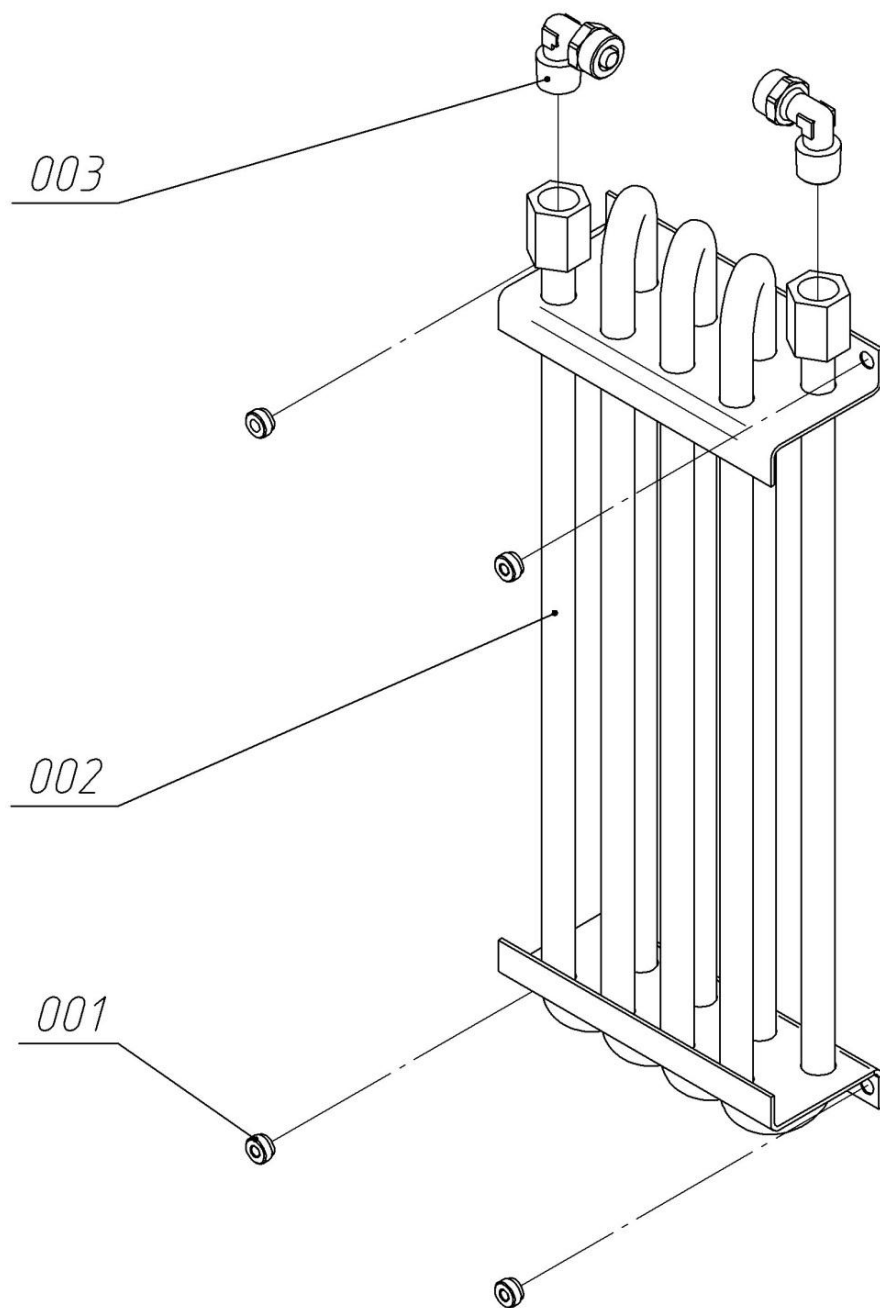


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.26

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.27		Блок клапанів	AEGA5.885.004	
8.27	001	Тримач	AEGA116.86.00.000	
8.27	002	Планка	AEGA116.00.00.076	
8.27	003	Гвинт DIN 912 M4x25	5154025-2	
8.27	004	Фітинг	2531 1/8-M5	
8.27	005	Фітинг	2601 4,5-M5	
8.27	006	Шайба	FIF-607-01	
8.27	007	Клапан електромагнітний RPE	2105NC24dc	

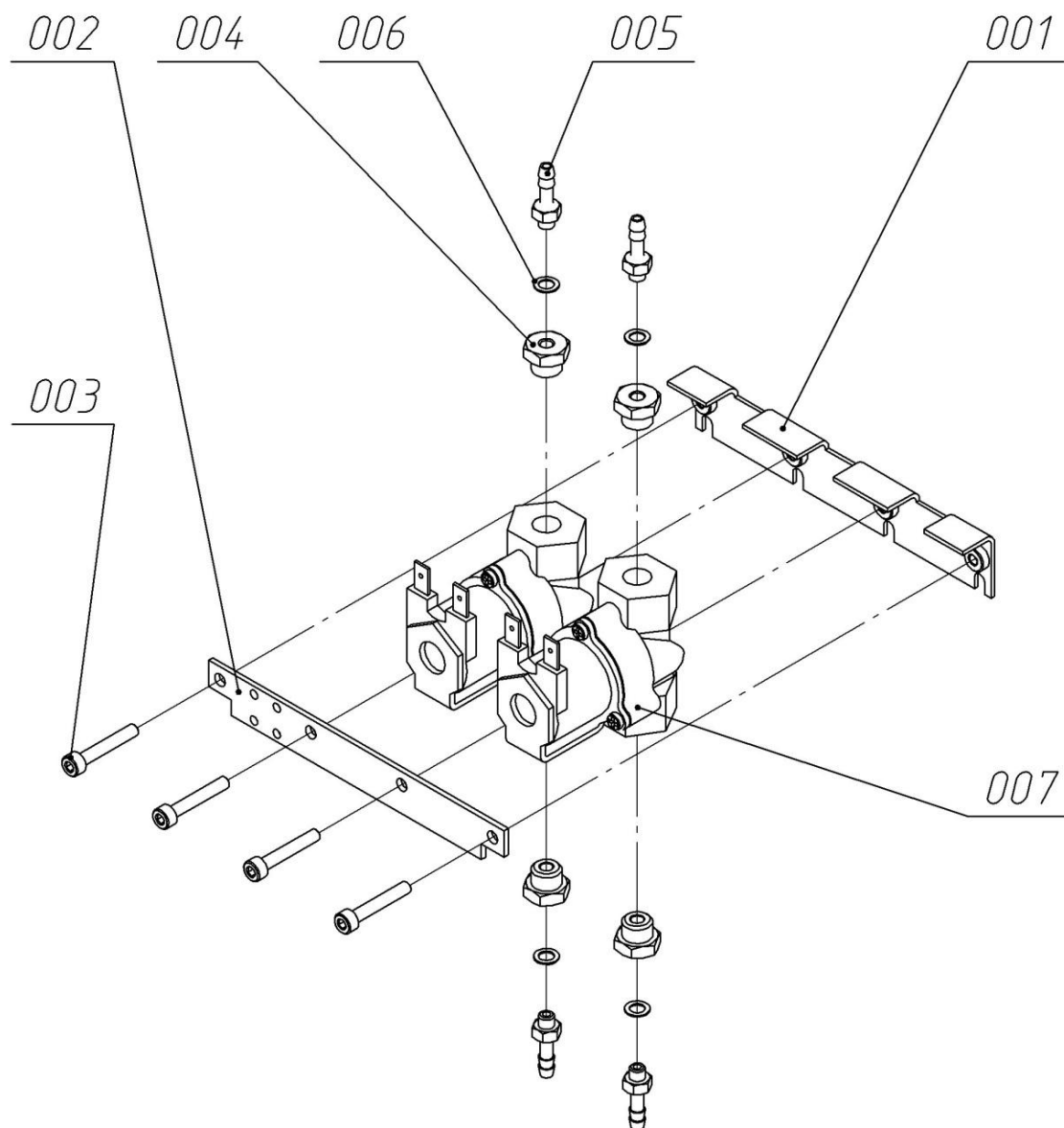


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.27

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.28		Реле тиску	AEGA5.885.005	
8.28	001	Кронштейн	AEGA8.090.068	
8.28	002	Реле тиску	MDR3/11-EA 3/2320-50	
8.28	003	Фітинг	1493 8/6-1/4	
8.28	004	Фітинг	2500 1/4	

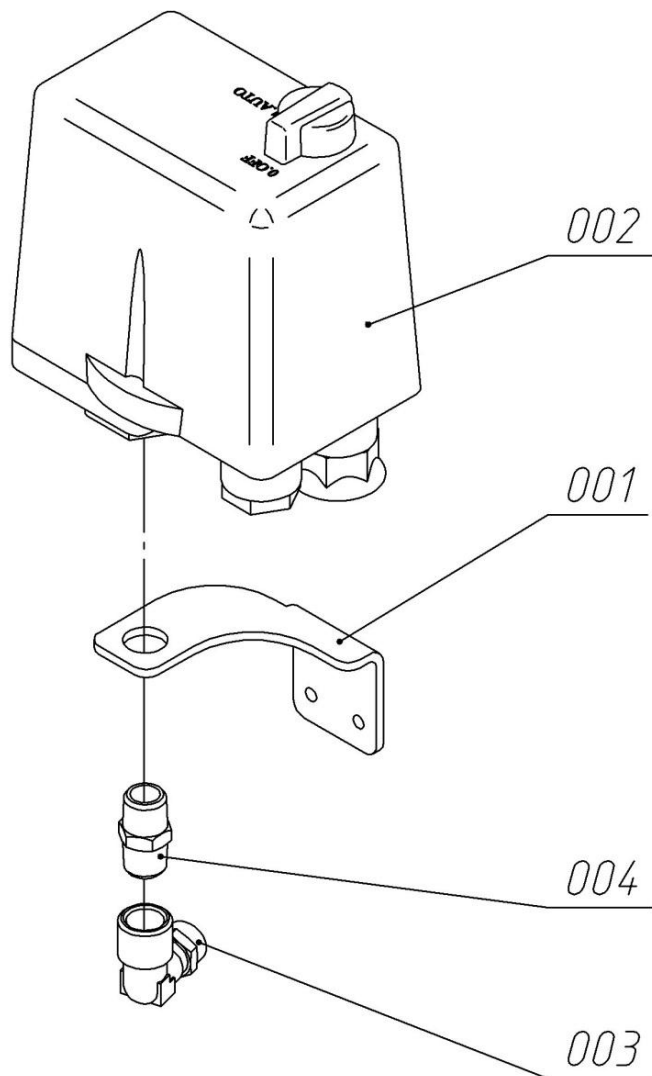


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.28

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.29		Електромагнітний клапан	АЕГА5.885.006	
8.29	001	Кронштейн	АЕГА8.090.120	
8.29	002	Електромагнітний клапан	330614	
8.29	003	Фітинг	6512 6-1/8	
8.29	004	Заглушка	2611 1/8	
8.29	005	Глушник	2931 М5	
8.29	006	Шайба	FIF-607-01	

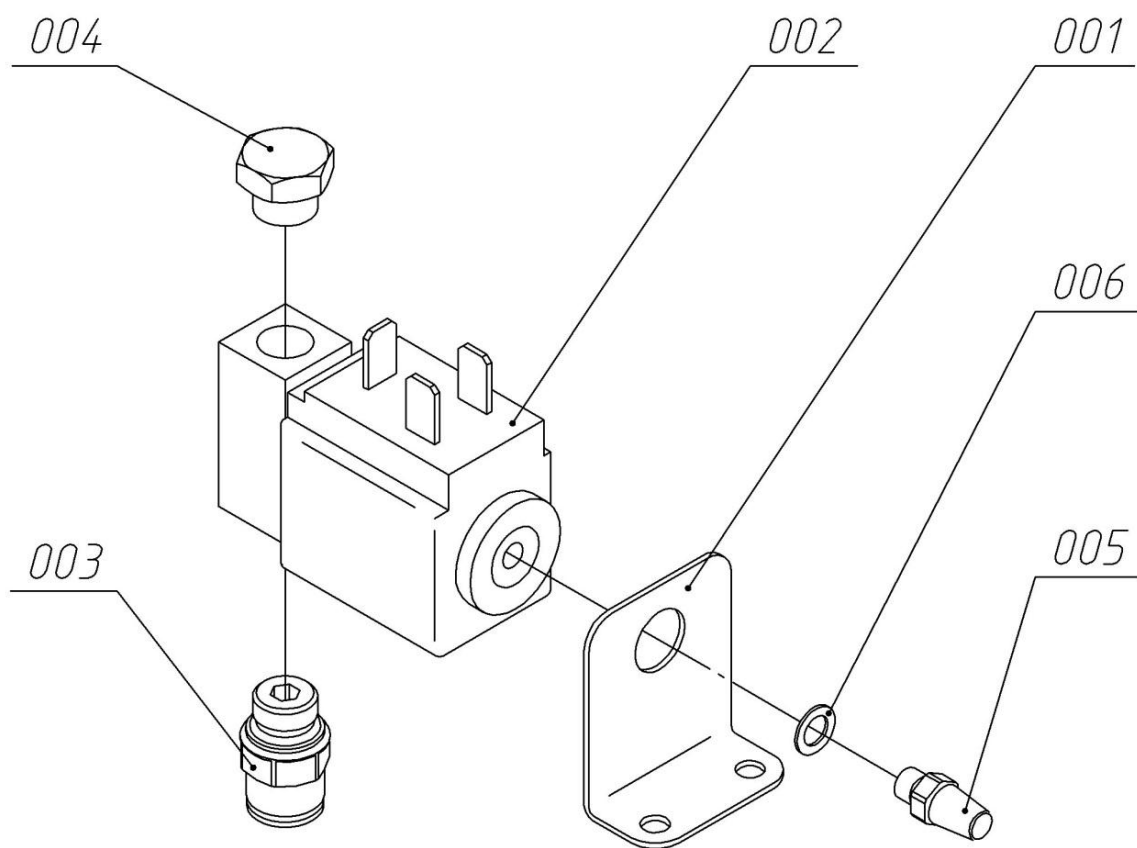


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.29

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.30		Фільтр	AEGA5.886.002	
8.30	001	Кільце захисне	0700-700-01	
8.30	002	Коліно	0700-700-04	
8.30	003	Заглушка	0700-700-10	
8.30	004	Патрубок	0700-720-25	
8.30	005	Фільтр в зборі	0725-040-50	
8.30	006	Кришка фільтра	0725-041-05	

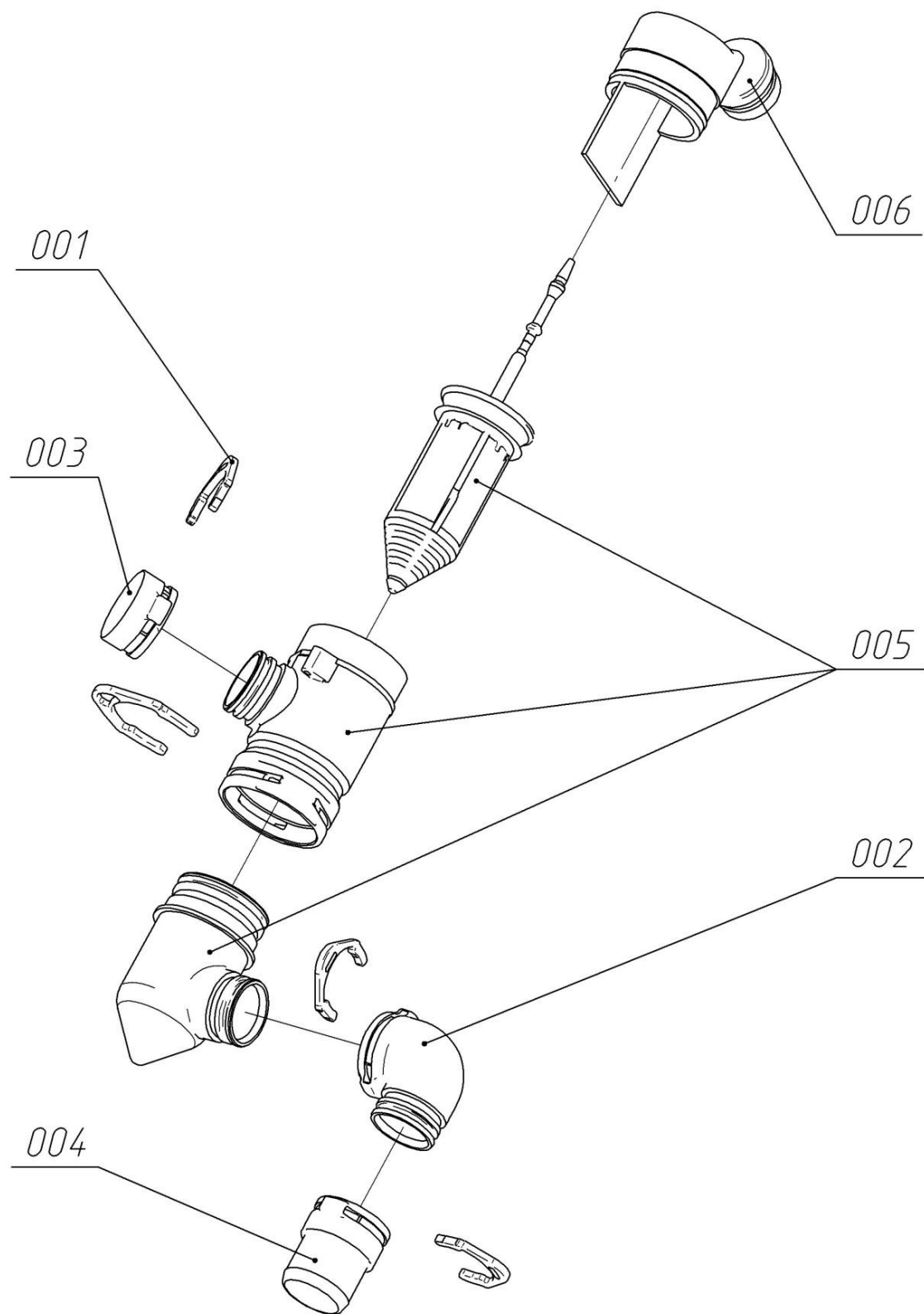


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.30

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.31		Фільтр	AEGA5.886.007	
8.31	001	Коліно	0700-700-04	
8.31	002	Патрубок	0700-700-16	
8.31	003	Патрубок	0700-700-26	
8.31	004	Кільце захисне	0700-700-32	
8.31	005	Патрубок	0700-720-30	
8.31	006	Бактеріальний фільтр	7120-143-00	

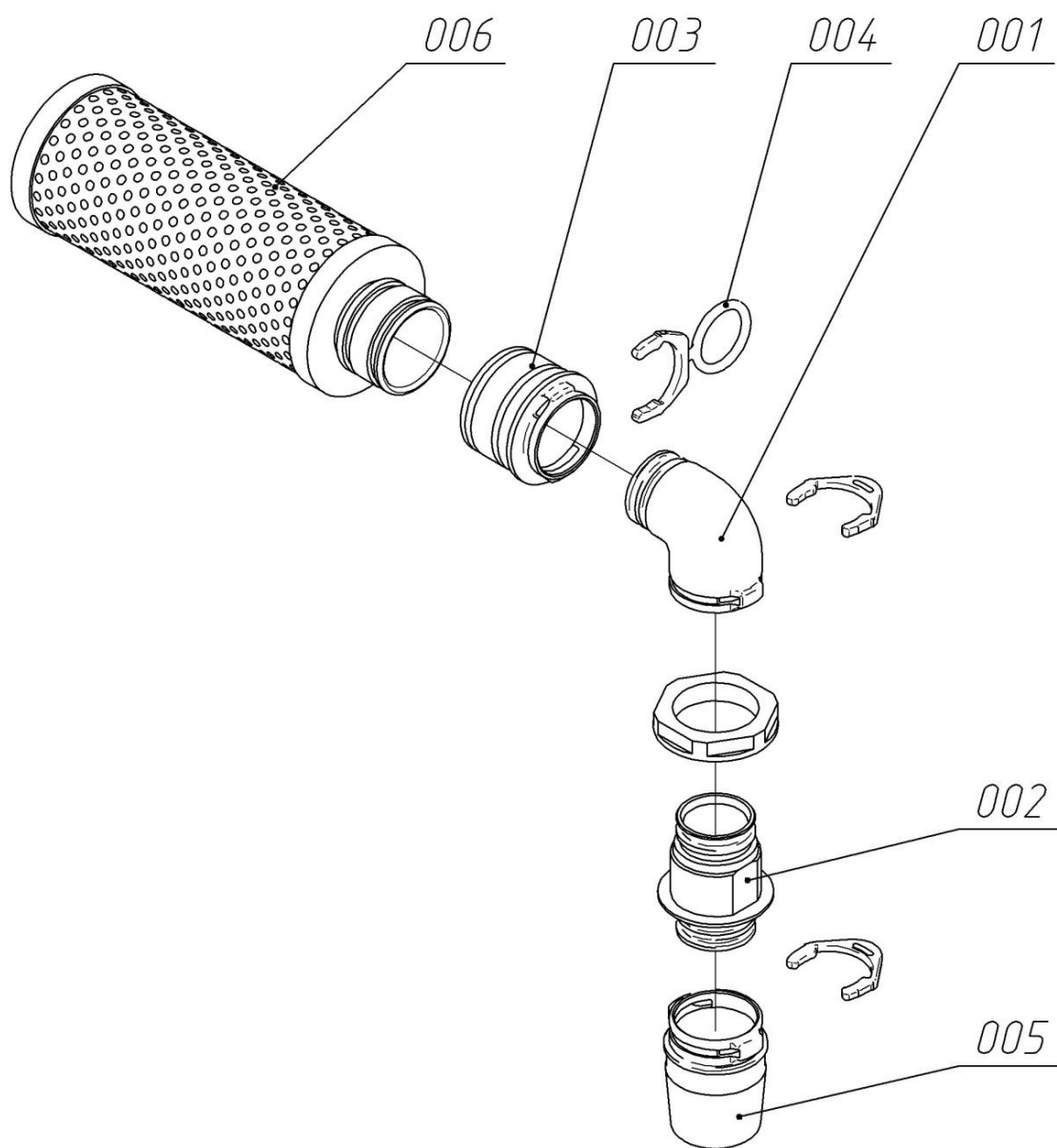


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.31

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.32		Фільтр-регулятор	AEGA5.886.008	
8.32	001	Фільтр-регулятор AF-20	025200125	
8.32	002	Мікрорегулятор тиску	M008-R00	
8.32	003	Фітинг	1500 6/4-1/8	
8.32	004	Фітинг	1500 8/6-1/8	
8.32	005	Фітинг	2070 1/8-1/8	
8.32	006	Фітинг	2500 1/8	
8.32	007	Фітинг	2511 1/8-1/4	
8.32	008	Фітинг	2531 1/8-M5	
8.32	009	Фітинг	2601 2-M5	
8.32	010	Фітинг	2601 4,5-M5	
8.32	011	Фітинг	2611 1/8	
8.32	012	Шайба	FIF-607-01	
8.32	013	Шланг Ø4	1A-006-07	

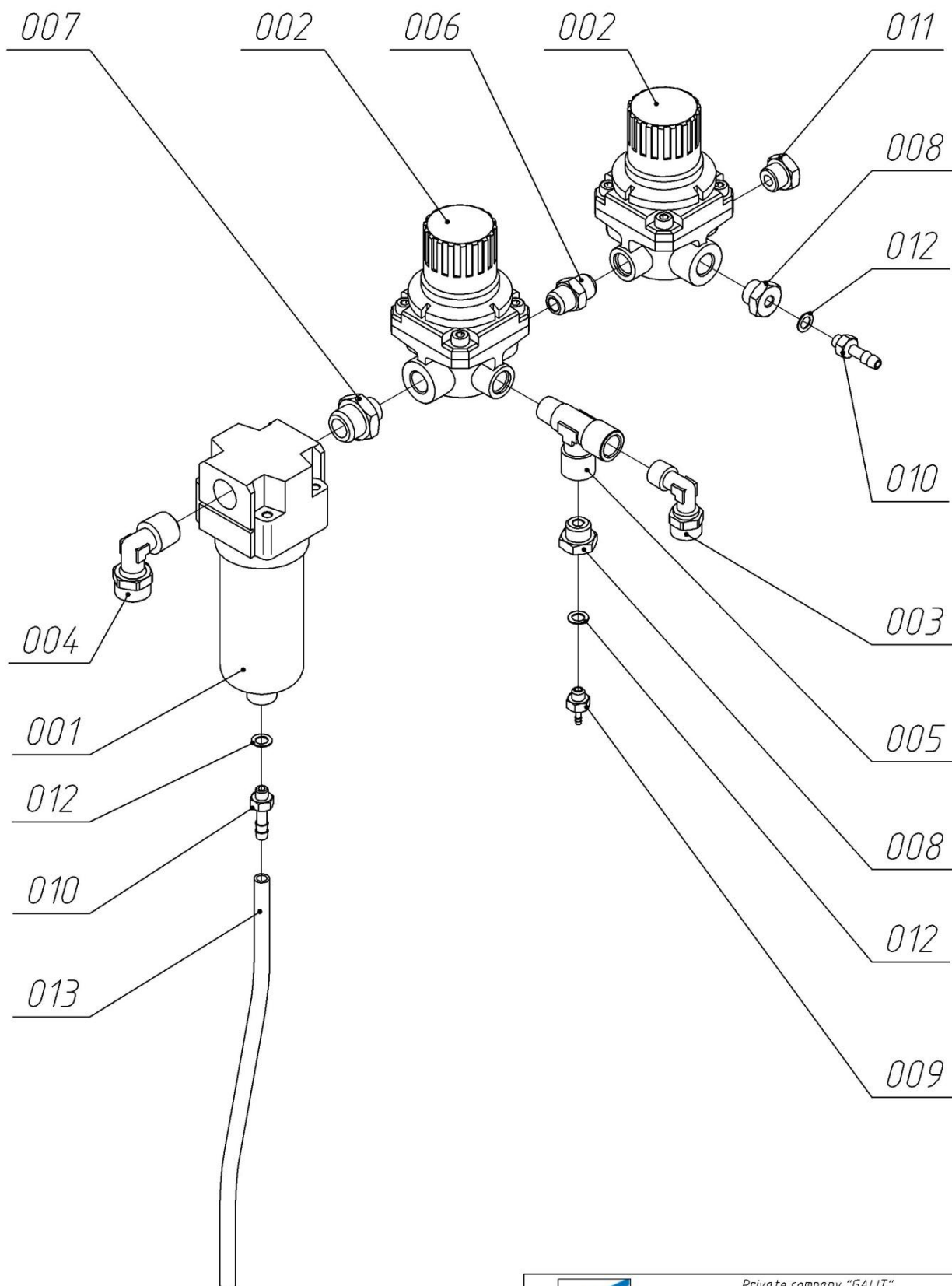


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.32

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.33		Фільтр СЧВ	AEGA5.886.010	
8.33	001	Подовжувач	AEGA7.018.005	
8.33	002	Втулка	AEGA7.867.002	
8.33	003	Притискач	AEGA7.867.003	
8.33	004	Сітка	AEGA7.062.002	

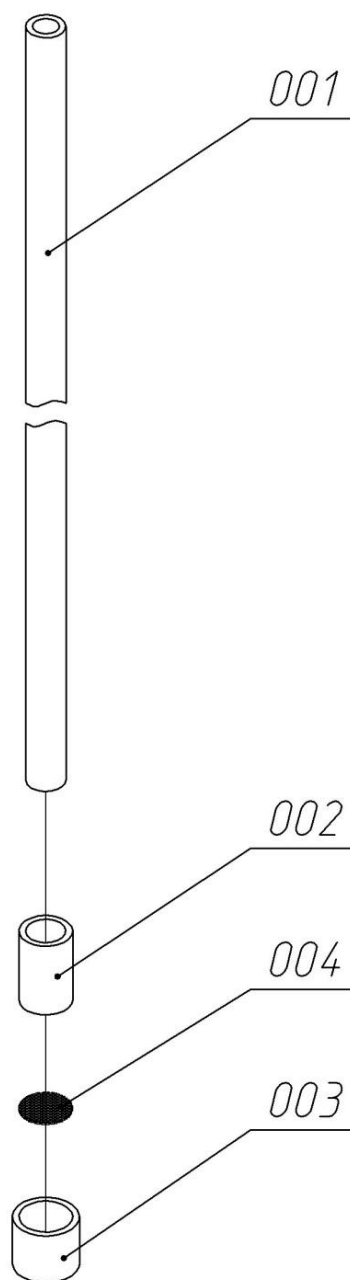


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.33

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.34		Резервуар для води	AEGA5.887.003	
8.34	001	Шток	AEGA6.366.018	
8.34	002	Шайба	AEGA7.685.005	
8.34	003	Прокладка	AEGA7.840.004	
8.34	004	Кільце	AEGA7.854.002	
8.34	005	Втулка	AEGA.226.017	
8.34	006	Ручка	AEGA8.671.002	
8.34	007	Колба	AEGA8.630.001	
8.34	008	Корпус	AEGA8.652.002	
8.34	009	Гайка	AEGA8.930.002	
8.34	010	Гайка	AEGA8.930.005	
8.34	011	Гвинт DIN 913 M5x6	985006-P	
8.34	012	Гвинт DIN 7985 M4x10	5M54010-2	
8.34	013	Кільце	048-054-36-2-2 GOST 9833-73	
8.34	014	Кільце	082-090-46-2-2 GOST 9833-73	
8.34	015	Фітинг	1463 8/6-3/8	
8.34	016	Фітинг	6522 6-1/8	
8.34	017	Фітинг	FIF-625-02	
8.34	018	Муфта	FIF-605-02	
8.34	019	Шланг	RILSAN TRN 6/4	
8.34	020	Шланг поліетиленовий 8/6		
8.34	021	Шланг Ø4	1A-006-07	
8.34	022	Шланг Ø4	1A-006-06	

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.35		Клапан плювальниці	AEGA5.891.001	
8.35	001	Кронштейн	AEGA8.090.019	
8.35	002	Гвинт DIN 912 M4x12	5154012-2	
8.35	003	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.35	004	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.35	005	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.35	006	Клапан плювальниці	7560-500-52	
8.35	007	Кільце захисне	0700-700-01	
8.35	008	Коліно	0700-700-04	
8.35	009	Трійник	0700-700-06	
8.35	010	Патрубок	0700-710-25	
8.35	011	Патрубок	0700-720-18	
8.35	012	Патрубок	0700-720-25	

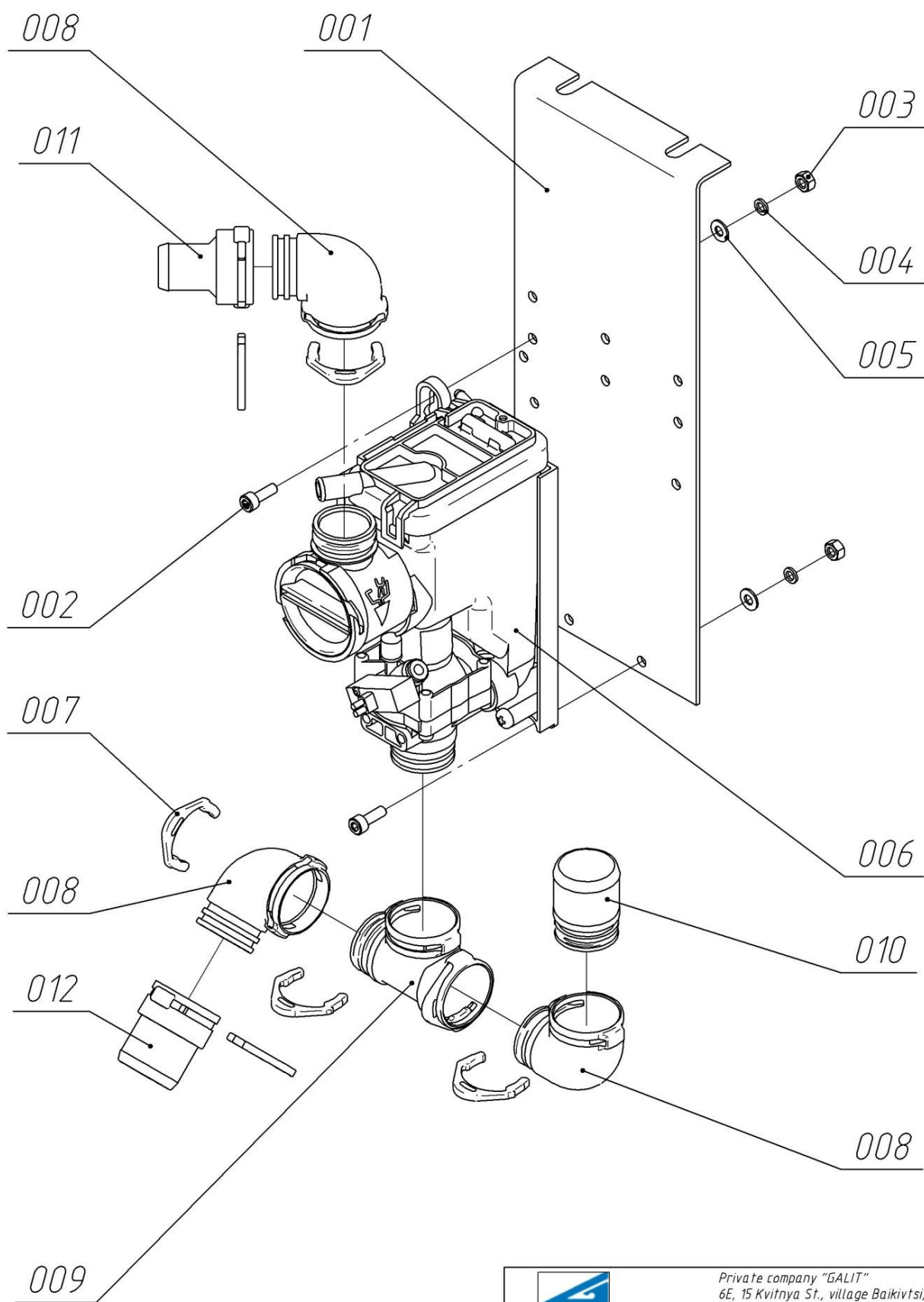


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.35

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.36		Панель	АЕГА6.172.008	
8.36	001	Панель	АЕГА8.050.030	
8.36	002	Гвинт DIN 965/963 M3x16	5M13016-2	
8.36	003	Гайка DIN 934 M3	6003-2	
8.36	004	Шайба DIN 125 3	7003-2	
8.36	005	Магнітна заціпка	246.26.720	

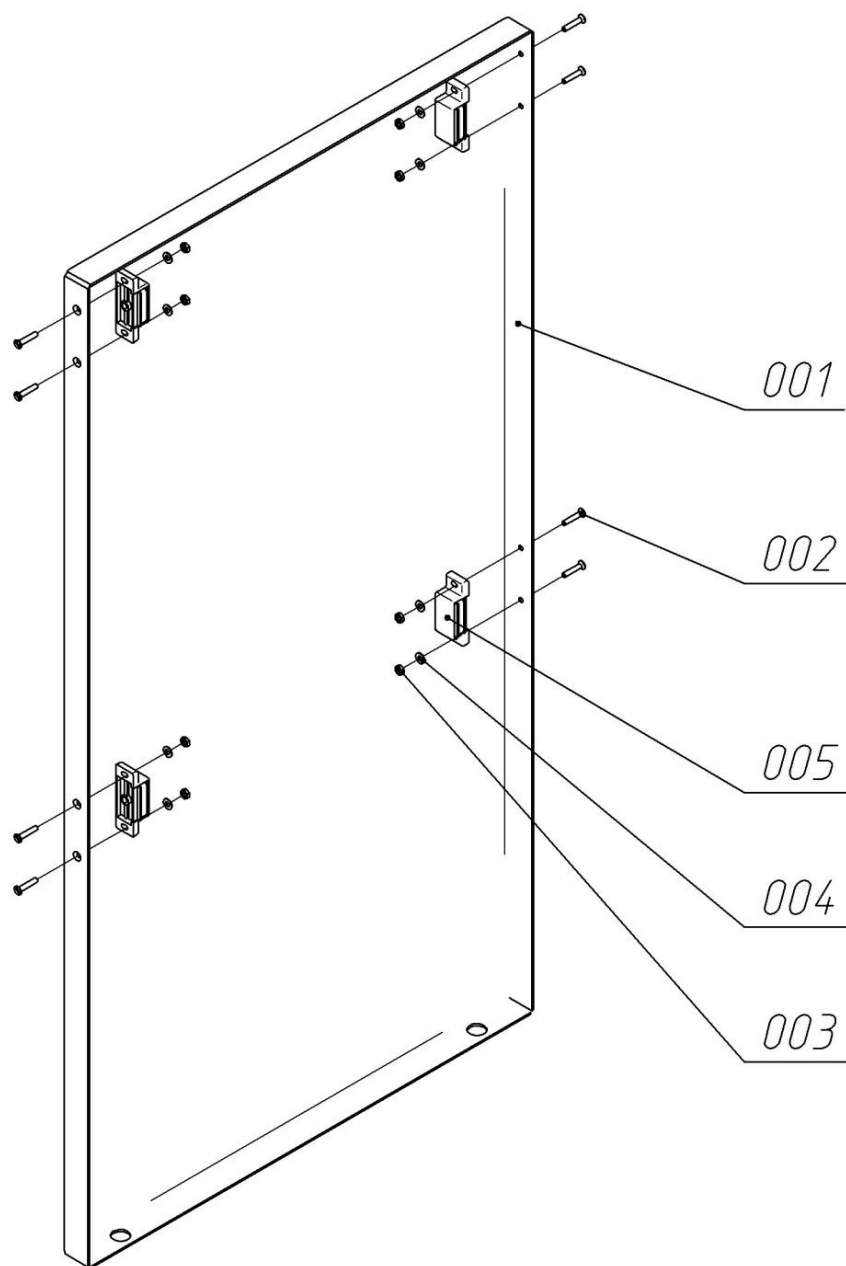


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.36

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.37		Панель	AEGA6.172.009	
8.37	001	Панель	AEGA8.050.030	
8.37	002	Кільце	AEGA216.00.00.010	
8.37	003	Гвинт DIN 965/963 M3x16	5M13016-2	
8.37	004	Гайка DIN 934 M3	6003-2	
8.37	005	Шайба DIN 125 3	7003-2	
8.37	006	Магнітна защіпка	246.26.720	
8.37	007	Ручка кругла, врізна, біла		

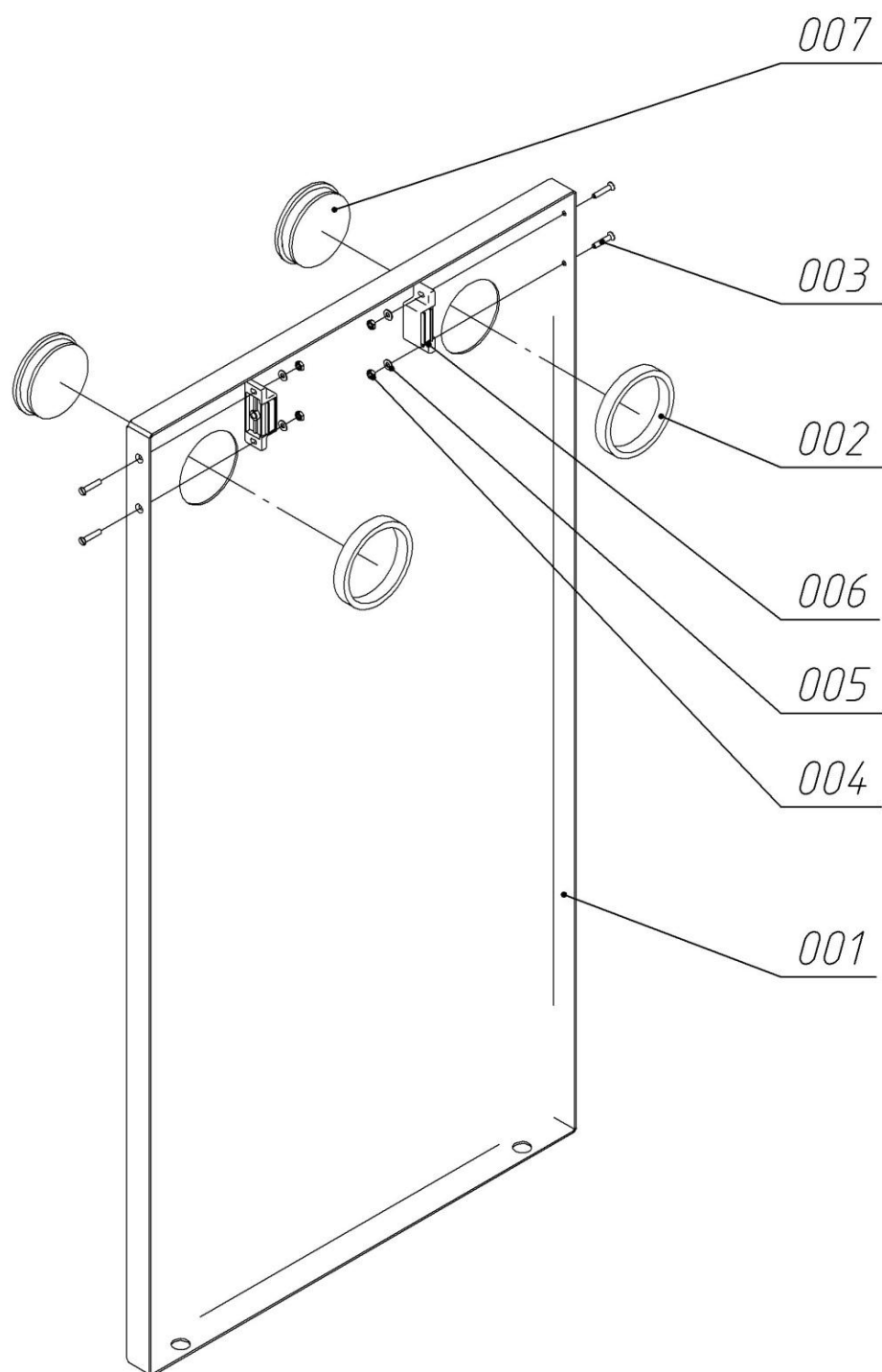


Private company "GALIT"
 6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
 region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.37

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.38		Панель	AEGA6.172.010	
8.38	001	Стійка	AEGA8.120.017	
8.38	002	Стійка	AEGA8.120.017-01	
8.38	003	Пластина	AEGA8.610.052	
8.38	004	Гайка DIN 934 M4	6004-2	
8.38	005	Гайка DIN 934 M5	6005-2	
8.38	006	Гвинт DIN 7985 M4x10	5M54010-2	
8.38	007	Гвинт DIN 7985 M5x20	5M55020-2	
8.38	008	Шайба DIN 7980 4	7P04-2	
8.38	009	Шайба DIN 7980 5	7P05-2	
8.38	010	Шайба DIN 125 4	7O04-2	
8.38	011	Шайба DIN 125 5	7O05-2	
8.38	012	Вентилятор	Mezaxial 3140	

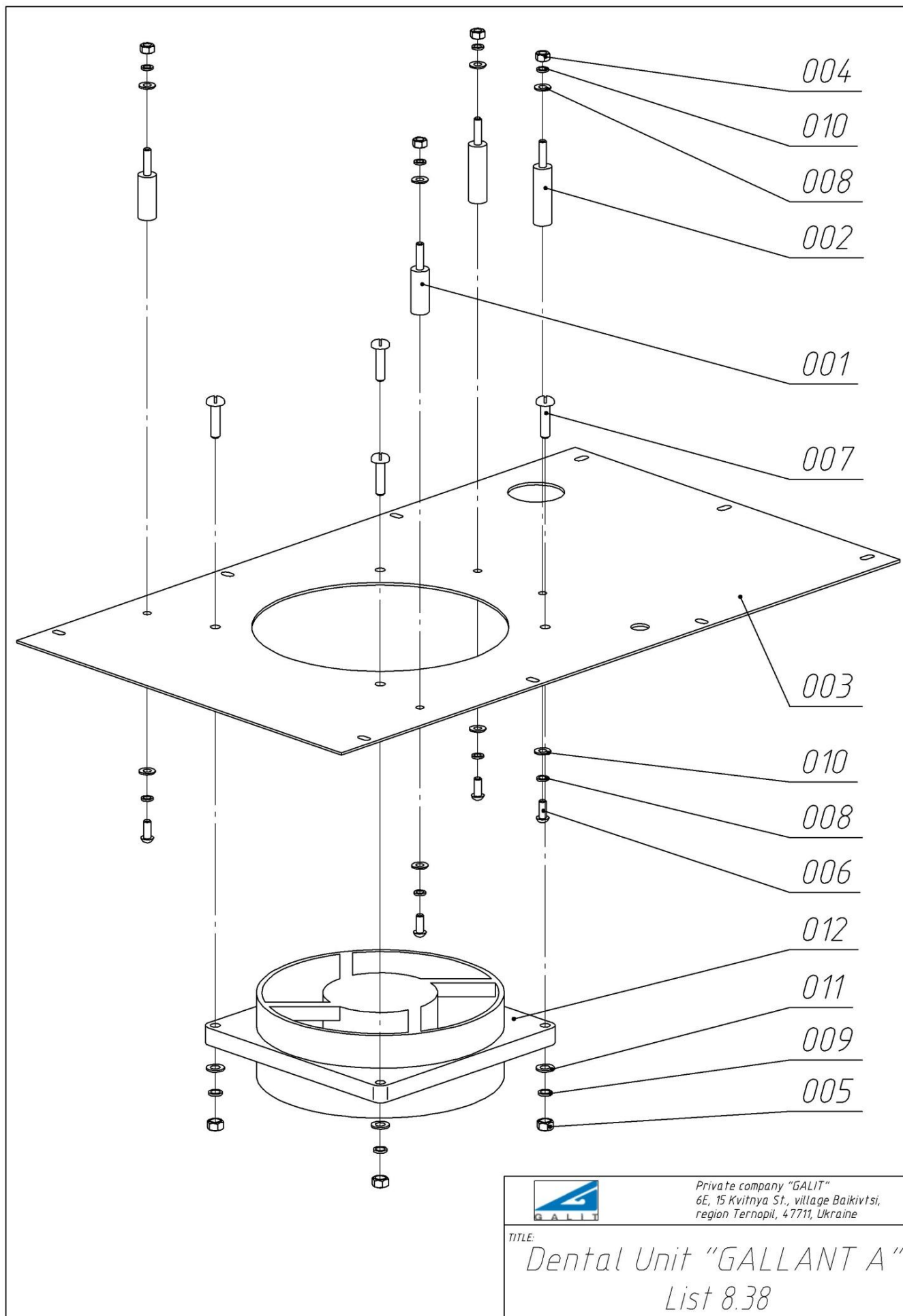


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.38

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.39		Панель	АЕГА6.172.011	
8.39	001	Панель	АЕГА8.050.030	
8.39	002	Гвинт DIN 965/963 M3x16	5M13016-2	
8.39	003	Гайка DIN 934 M3	6003-2	
8.39	004	Шайба DIN 125 3	7003-2	
8.39	005	Магнітна защіпка	246.26.720	

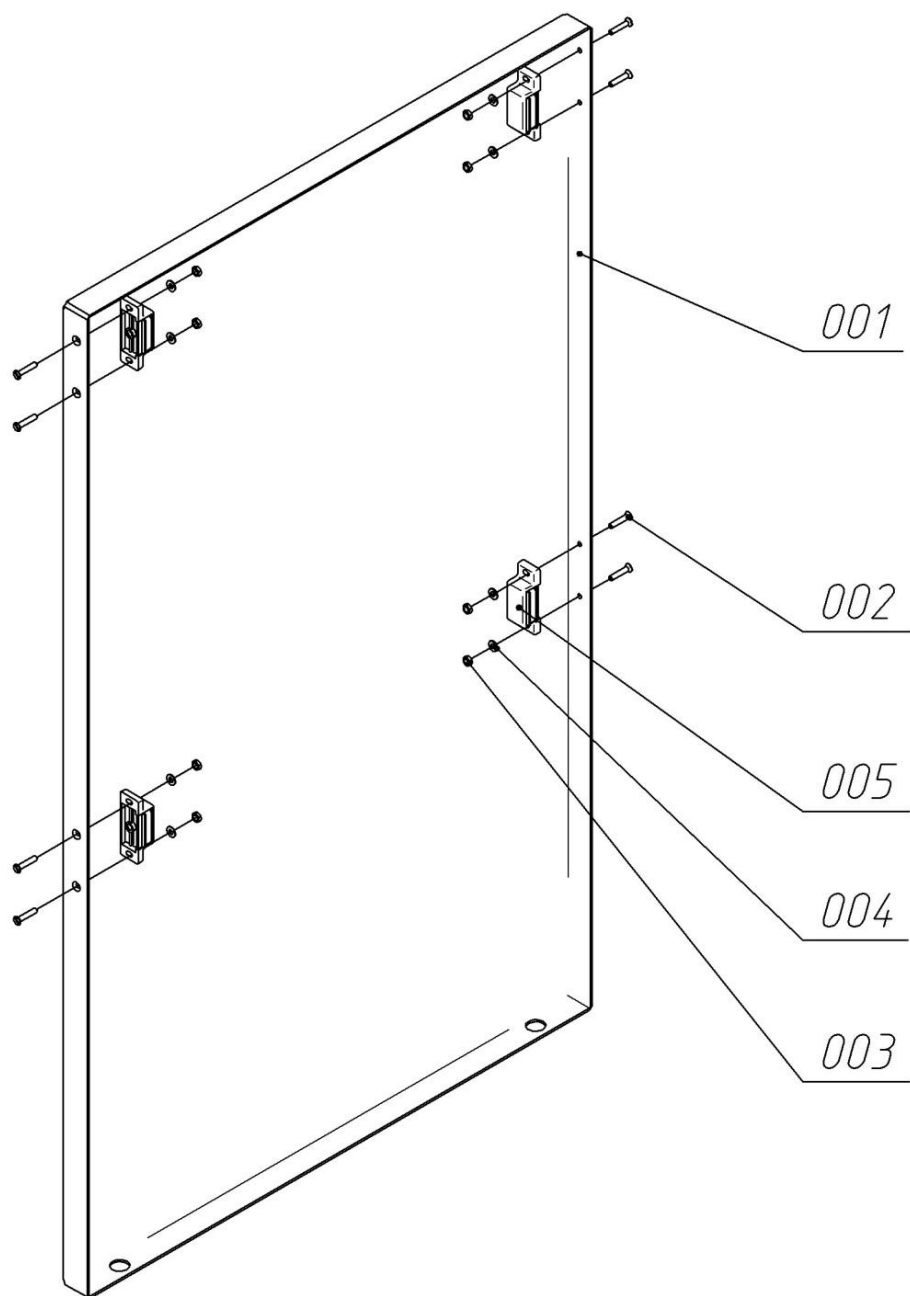


Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.39

Лист	№	Найменування	Код КД	Код ГАЛІТ
8.40		Панель	AEGA6.172.012	
8.40	001	Панель	AEGA8.050.030	
8.40	002	Кільце	AEGA216.00.00.010	
8.40	003	Гвинт DIN 965/963 M3x16	5M13016-2	
8.40	004	Гайка DIN 934 M3	6003-2	
8.40	005	Шайба DIN 125 3	7003-2	
8.40	006	Магнітна защіпка	246.26.720	
8.40	007	Ручка кругла, врізна, біла		

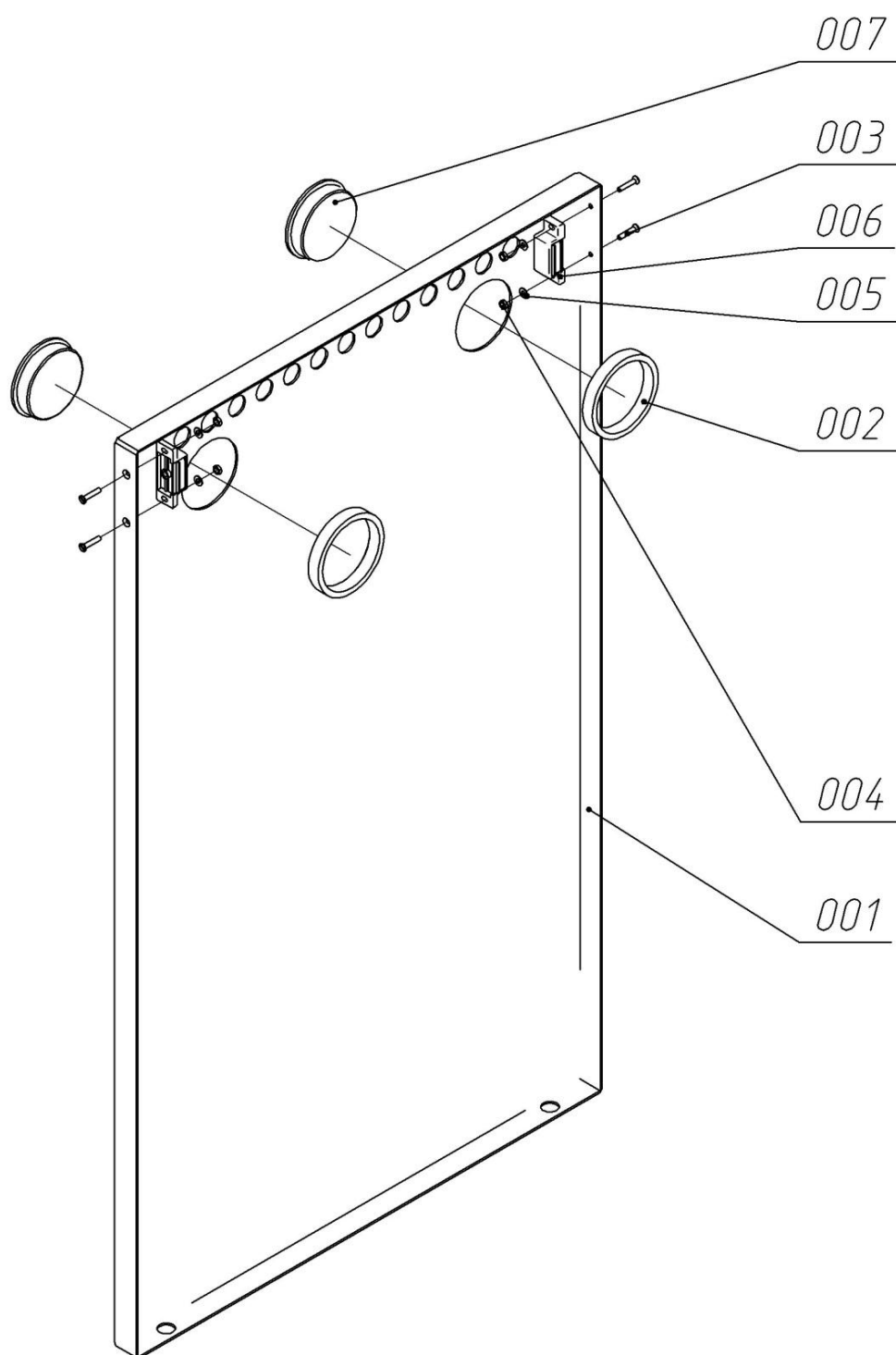

Private company "GALIT"
6E, 15 Kvitnya St., village Baikivtsi,
region Ternopil, 47711, Ukraine

TITLE:

Dental Unit "GALLANT A"
List 8.40